

Mirage™ SoftGel

NENÄMASKI

Sovitusohje



- Kierrä MicroFit-säädin asentoon 24 niin, että otsatuki on täysin ulkona.



- Avaa pääremmien alempi kiinnike, pidä maskia nenäsi päällä ja vedä pääremmit pään yli.



- Kiinnitä pääremmien alempi kiinnike ja varmista, että se naksahuttaa paikalleen.



- Säädä ylempiä hihnoja tasaisesti. Älä kiristä hihnoja liikaa.



- Säädä alemmat hihnat niin, että ne tuntuvat mukavilta. Älä kiristä hihnoja liikaa.



- Liitä ilmaletkun toinen pää pyörivään liittimeen ja toinen pää virtausgeneraattoriin.
- Laita virtausgeneraattori päälle.



- Kierrä säädintä, mikäli ilmaa tuntuu vuotavan nenän kohdalta.



- Säädä alempia hihnoja, mikäli ilmaa tuntuu vuotavan ylähuulen kohdalta.