



Übersicht

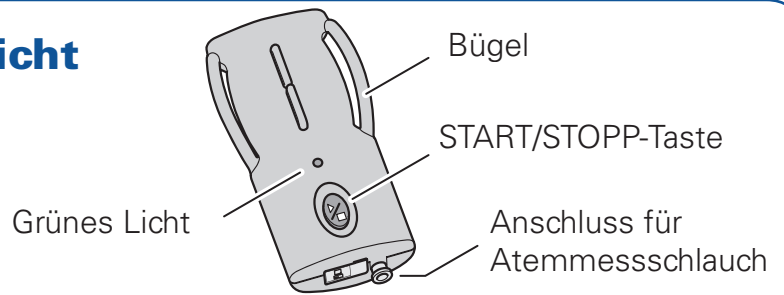


Auf die Plätze

Atemmessschlauch:

Atemmessschlauch wie abgebildet an ApneaLink anschrauben

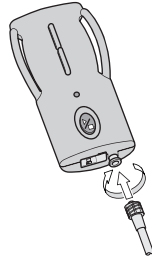


ApneaLink wie abgebildet mit dem verstellbaren Gurt an der Außenseite des Pyjamas befestigen.

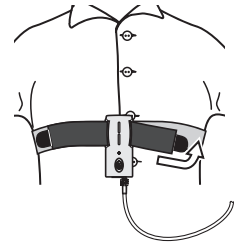

Fertig

Atemmessschlauch so einführen, dass die 2 Stifte zum Gesicht gebogen sind (A). Fixiererring in eine angenehme Position schieben (B).

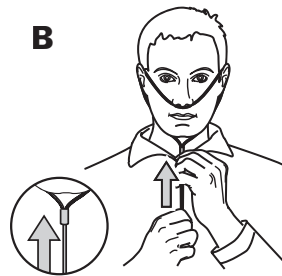

Falls Klebestreifen oder Pflaster mitgeliefert wurde: Klebestreifen wie dargestellt aufkleben, um den Sitz des Atemmessschlauchs zu sichern.

Los

START/STOPP Taste: Die Schwarze START/STOPP-Taste drücken und halten bis das **grüne Licht** angeht.

Sobald das Gerät eingeschaltet ist, wird das kleine grüne Licht gelegentlich aufleuchten. Das Licht wird nach 10 Minuten schwächer, während ApneaLink die Aufzeichnung fortsetzt.

In Nacht ApneaLink nicht ausschalten.

Guten Morgen

START/STOPP Taste: START/STOPP-Taste 3 mal nacheinander drücken um ApneaLink **Auszuschalten**. Das kleine grüne Licht wird dabei aufleuchten und dann ausgehen.

ApneaLink und den Gurt zurückgeben.