


#### Vue d'ensemble

Témoin vert

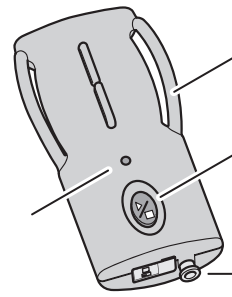


Passants

Touche de MARCHE/  
ARRET


Raccord des canules  
nasales de mesure  
de la pression

#### Prêt...

**Canules nasales :**  
raccordez les canules  
nasales à l'ApneaLink  
comme indiqué.


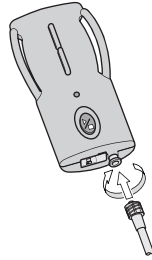


Fixez l'ApneaLink sur  
l'extérieur de votre pyjama/  
chemise de nuit à l'aide de  
la sangle réglable comme  
indiqué

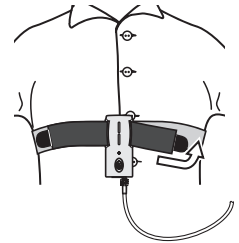

#### A vos marques

Insérez les canules nasales avec les 2 ergots orientés vers le visage (A). Faites glisser l'anneau de réglage jusqu'à ce que les canules soient confortables (B)

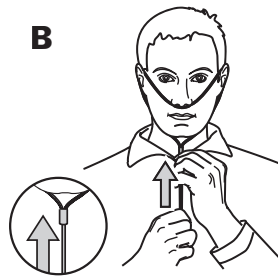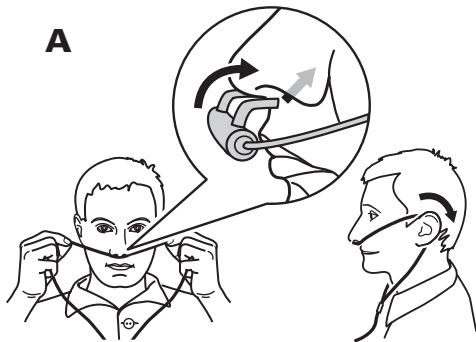

Si on vous a remis des tampons ou un ruban adhésifs, servez-vous en pour maintenir les canules en place.

#### Partez...

**Touche de MARCHE/ARRET :** appuyez sur la touche noire de MARCHE/ARRET et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le témoin vert **s'allume**.

Une fois que l'appareil est en marche, le petit témoin vert clignote par intermittence. Son intensité diminue au bout de 10 minutes, mais l'ApneaLink continue à enregistrer normalement.

*N'éteignez pas votre ApneaLink en cours de nuit.*

#### Bonjour

**Touche de MARCHE/ARRET :** appuyez sur la touche de MARCHE/ARRET 3 fois de suite pour **ARRETER** l'ApneaLink. Le petit témoin vert s'allume puis s'éteint.

Renvoyez l'ApneaLink et la sangle à votre prestataire de santé.