



Overzicht

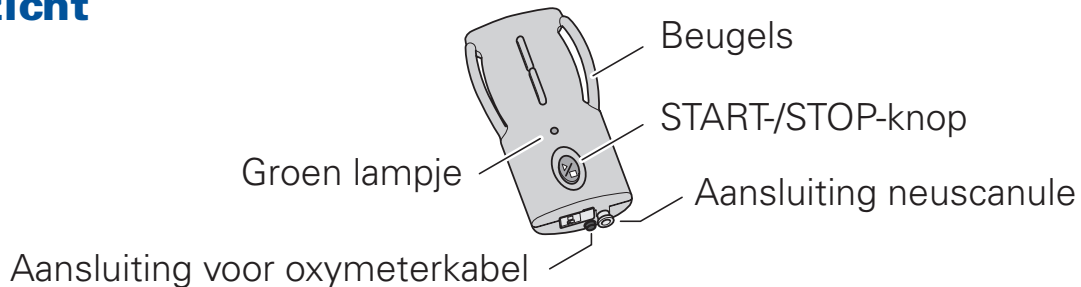

Alles bij de hand?

Neuscanule: Koppel de neuscanule aan de ApneaLink volgens de afbeelding.

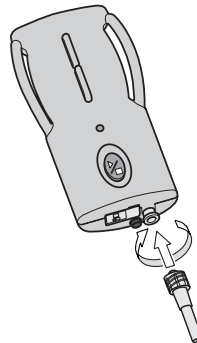


Klaar voor de start?

Breng de ApneaLink met behulp van de instelbare riem aan over uw nachtkleding zoals afgebeeld (A). Breng de neuscanule aan, en zorg dat de twee buisjes in de richting van uw gezicht gebogen zijn (B). Schuif aan de instelring van de canule tot alles prettig zit (C).



Vingerpulssensor: Bevestig de vingerpulssensor (indien meegegeven) op uw ringvinger zoals afgebeeld.

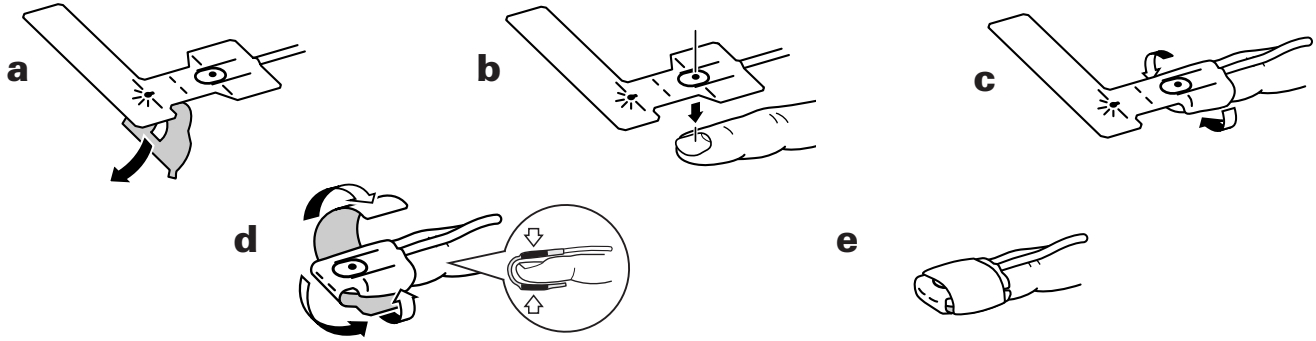

Oxymeter: Maak de kabel met de meegeleverde klem vast aan de ApneaLink-riem.



U bent zover

START/STOP-knop: Druk op de START/STOP-knop en houd hem ingedrukt tot het groene lampje **gaat branden**.

Als het apparaat ingeschakeld is, zal het groene lampje af en toe knipperen. Na 10 minuten dimt het licht, maar blijft de ApneaLink registreren.

Zet uw ApneaLink 's nachts niet uit.

Goedemorgen

START/STOP-knop: Druk de START/STOP-knop 3 keer achter elkaar in om de ApneaLink **UIT** te zetten. Het groene lampje licht op en gaat dan uit.

Lever de ApneaLink, riem, vingerpulssensor, oxymeter en klembevestiging weer in bij uw zorgverlener.