


ApneaLink™

Istruzioni per il paziente

Italiano


Panoramica

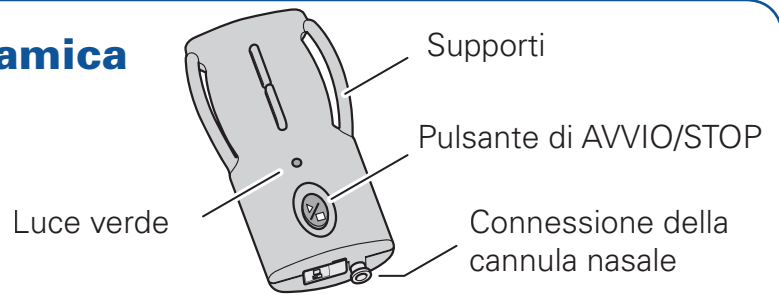


Partenza...

Cannula nasale:

Connettere la cannula nasale all'ApneaLink come mostrato.

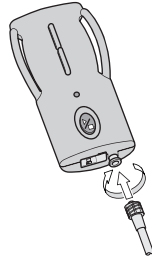


Fissare l'ApneaLink all'esterno dell'indumento che si indossa a letto usando la cintura regolabile come mostrato

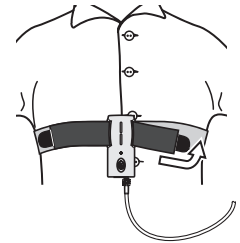

Get set

Inserire la cannula nasale con l'incurvatura dei due occhiali rivolti verso il viso (A). Spostare l'anello scorrevole di regolazione della cannula in una posizione confortevole (B).

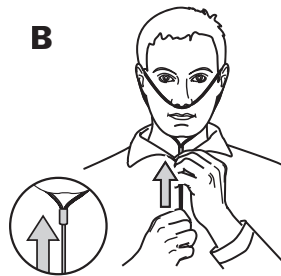

Se sono stati forniti un nastro o dei tamponi adesivi, collocarli come indicato per aiutare ad assicurare la cannula.

...Via!

Pulsante di AVVIO/STOP: Tenere premuto il pulsante nero di AVVIO/STOP fino a che **si accende** la spia verde.

Una volta accesa l'unità, la piccola spia verde si illuminerà di tanto in tanto. La spia si attenua dopo 10 minuti ma l'ApneaLink continua a registrare dati.

Non spegnere l'ApneaLink durante la notte.

Buon mattino

Pulsante di AVVIO/STOP: Premere tre volte in sequenza il pulsante di AVVIO/STOP per spegnere l'ApneaLink. La piccola spia verde si accenderà per poi spegnersi.

Restituire ApneaLink e cintura al proprio fornitore.