

ApneaLink™

Información del paciente

Español

1 Preparación


Elimine todo material extraño (incluido el esmalte de uñas) del dedo índice izquierdo. Use un pijama de mangas largas.

2 Conecte la cánula de presión nasal


a Desenrosque la tapa protectora del ApneaLink y manténgala en un lugar seguro.



b Enrosque la cánula de presión nasal sobre el dispositivo.

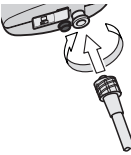

3 Ajuste el ApneaLink

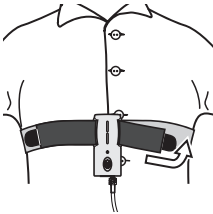


4 Sujete la cánula de presión nasal

a correcto incorrecto


b Haga pasar el bucle por detrás de las orejas y luego de nuevo hacia adelante. ¡No lo ponga sobre la cabeza!



c Tire hacia arriba el anillo de fijación, de manera que el bucle esté cómodo y bien sujeto.

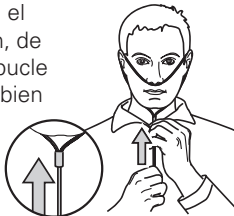


5 Sensor digital de pulso

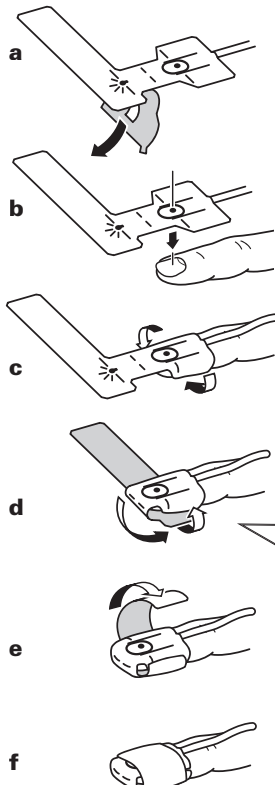


Coloque el sensor de pulso digital en el dedo índice izquierdo. El dedo que aparece en la tira adhesiva muestra en qué posición debe ponerse la tira adhesiva sobre la uña del dedo.

6 Oxímetro

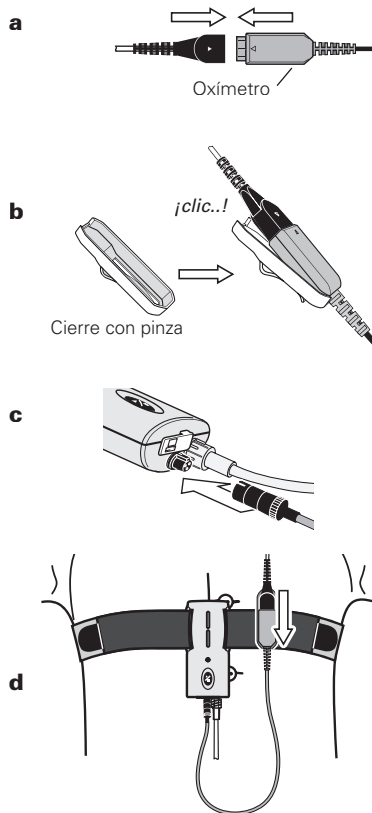

7 Comienzo del registro

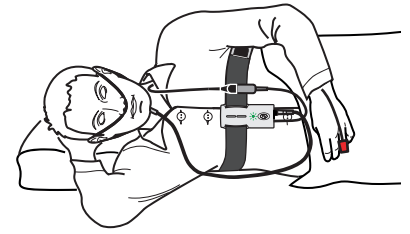

Inicie el registro en la cama presionando el botón de inicio/parada, hasta que se encienda en color **verde** la luz pequeña sobre el botón. El ApneaLink detecta eficazmente su respiración si esta luz verde se torna pálida cada vez que espire.

1.. 2.. seg



Luego de iniciar el registro, observe la luz pequeña en el dispositivo durante más o menos medio minuto. Si sigue de color verde, no es necesario realizar ninguna acción. Si se pone roja, se ha perdido la señal de oximetría. Verifique y corrija:

- el conector de oxímetro (sujetado a su cinturón ApneaLink), para asegurarse de que esté conectado debidamente.
- el sensor de pulso digital, para asegurarse de que esté colocado debidamente en el dedo.

Cuando se ajusta correctamente, **al cabo de unos segundos**, la luz del dispositivo cambiará de rojo a verde.

Después de 10 minutos, la luz se atenuará.

¡Buenas noches!

8 Detención del registro

Para detener el registro, presione el botón 3 veces seguidas hasta que se apague la luz pequeña del dispositivo.

3 x



Quítese el ApneaLink y los sensores. Desconecte del ApneaLink la cánula de presión nasal. Elimine únicamente la cánula de presión nasal. Enrosque cuidadosamente la tapa protectora sobre el dispositivo.



Devuelva el ApneaLink junto con la tapa protectora, el cinturón, el sensor de pulso digital, el oxímetro y el cierre con pinza.