

ApneaLink™ Patientinformation


Svenska

1 Förberedelse


Se till att avlägsna allt främmande material (inkl. nagellack) från vänster ringfinger. Ha på en långärmad pyjamas.

2 Anslutning av näs-/tryckkanyl

- Skruva av skyddslocket från ApneaLink-systemet och förvara det på säkert ställe
- Skruva fast näs-/tryckkanylen på enheten.

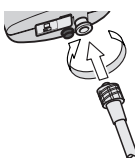

3 Anpassning av ApneaLink

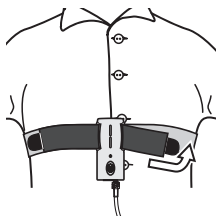

4 Anslutning av näs-/tryckkanyl


- korrekt

fel


- Passa in öglan över öronen och tillbaka igen åt framsidan. **Får ej dras över huvudet!**




- Dra upp fästringen så att öglan blir både komfortabel och säkert fastsatt.

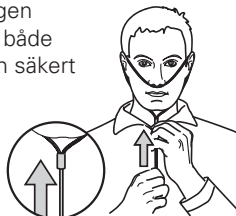





5 Fingerpulssensor

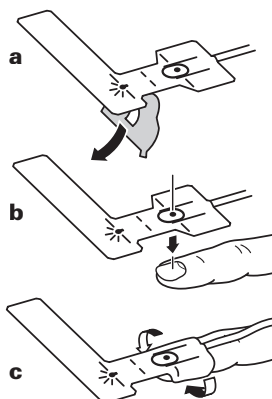


Sätt fast fingerpulssensorn på vänster ringfinger. Fingersymbolen på fästremman visar i vilket läge remman skall placeras på fingrets nagel.

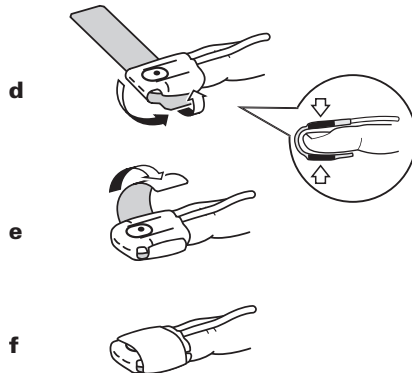

6 Pulsoximeter

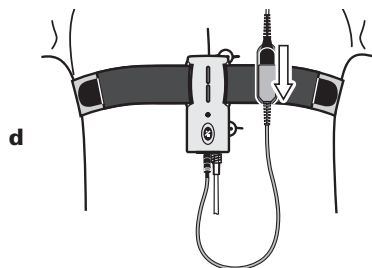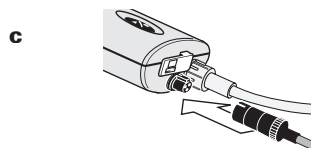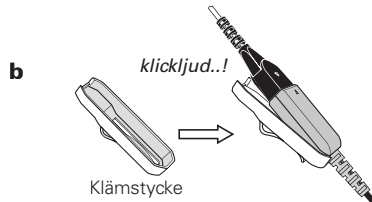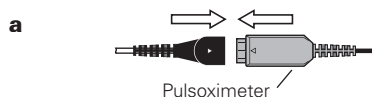

7 Starta inspelningen

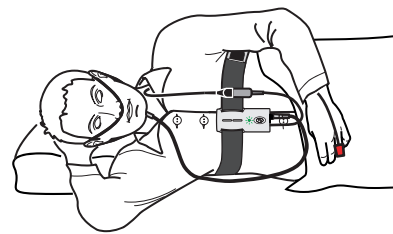

Starta inspelningen i sängen genom att trycka på START/STOP-knappen tills en liten indikator ovanför knappen tänds **grön**. ApneaLink detekterar din andning på korrekt sätt om den gröna ljusindikatorn dämpas något varje gång som du andas ut.



Observera, efter påbörjad inspelning, den lilla ljusindikatorn på enheten i cirka en halv minut. Ingen åtgärd krävs om indikatorn förblir **grön**. Om indikatorn blir **röd** så har pulsoximetersignalen avbrutt. Utför då kontroll och korrigerig av:

- pulsoximeterkontakten (som är fäst med klämma till ApneaLink-bältet) och se till att denna är korrekt ansluten.
- fingerpulssensorn och se till att den är fäst korrekt vid fingret.

Vid korrekt justering så kommer ljusindikatorn på enheten, **efter några få sekunder**, att skifta från rött till grönt.

Efter 10 minuter dämpas ljuset automatiskt ner.

God natt!

8 Stoppa inspelningen

Stoppa inspelningen genom att trycka på knappen 3 gånger i följd tills den lilla ljusindikatorn på enheten slocknar.



Ta av dig ApneaLink-enheten och sensorerna. Koppla ur näs-/tryckkanylen från ApneaLink-enheten. Kassera endast näs-/tryckkanylen. Skruva försiktigt på skyddslocket på enheten.



Skicka tillbaka ApneaLink-systemet tillsammans med skyddslocket, bältet, fingerpulssensorn, pulsoximetern och klämstycket.