

# Mirage Activa LT

## NESEMASKE

### Hurtigtilpasningsguide

#### ActiveCell™-teknologi

- Den unike cushion har en aktiv celle som utvider seg og trekker seg sammen automatisk for å tilpasse seg brukerens bevegelser og varierende trykk natten igjennom.
- Ideell for pasienter som sover urolig; ActiveCell-teknologien skaper et dynamisk forsvar mot lekkasje.

#### En finjustert passform

- MicroFit-skruen sørger for en enkel justering av pannestøtten med en hånd.
- Mindre avhengig av stramming og justering av hodestroppen for å opprettholde en effektiv forsegling (raskere tilpasningstid, færre pasienthenvelsels og forbedret compliance)

#### Enda mer stillestående

- Forbedret ventildesign sprer luften stille og mykt på kort avstand, vekk fra sengepartneren.
- Ventilene sitter på kneleddet for enkel rengjøring og demontering.



Ikke stram hodestroppene for hardt



- Vri skruen på pannestøtten til posisjon 24



- Ta av den nedre hodestroppklipsen, hold masken over nesens og dra hodestroppen over hodet.
- Fest den nederste hodestroppklipsen igjen og påse at den klikker på plass.



- Koble den ene enden av luftslangen til sivilen og den andre til apparatet.




- La det være nok plass til at cushions aktive celle kan blåses opp. Bruk to fingre som mål.




- Slå på apparatet.



- Still inn bryteren for å oppnå best mulig komfort og forsegling mens du ligger.

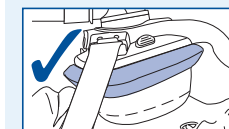

- Hvis masken sitter riktig, skal cushion være myk og den aktive cellen (markert) helt oppblåst.

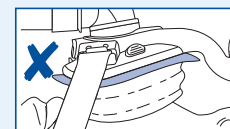

- Hvis masken sitter feil, vil cushion krølle seg og den aktive cellen ha for lite lufttrykk.