

## S8 Escape™

Compacto e eficaz

O S8 Escape™ da ResMed é o dispositivo de CPAP padrão da série S8. Destina-se a ser utilizado em casa e em viagem, para o tratamento da síndrome de apnéia obstrutiva do sono (SAOS) em adultos.

O dispositivo de CPAP S8 Escape é um dispositivo padrão de preço competitivo, com um conjunto avançado de funções que conferem mais liberdade a você e aos seus pacientes.

### O S8 Escape da ResMed dispõe de um conjunto abrangente de funções e oferece:

- um design pequeno, leve, robusto e adequado para viagens
- umidificação integrada opcional com o HumidAire 3i™
- entrada de alimentação de 12V ou 24V CC através do conversor DC-12 da ResMed, bem como comutação automática para corrente internacional
- capacidades flexíveis de gestão de pacientes, incluindo o cartão de dados ResScan™ que interage com o sistema de gestão de pacientes para PC da ResMed
- sistema exclusivo de lembretes para pacientes que aumenta a eficiência comercial e amplia as oportunidades de criar receitas
- combinação exclusiva de funções de gestão de pacientes e de sistema que lhe proporcionam o seu próprio "Assistente Pessoal".

### Soluções de comunicação flexíveis

O sistema exclusivo de gestão de pacientes da ResMed oferece uma solução de comunicação mais flexível para a terapêutica por CPAP. Os profissionais especializados em sono têm agora a opção de gerir a terapêutica remotamente ou diretamente através do dispositivo ou através do cartão de dados ResScan, mediante a utilização das aplicações da ResMed para PC.

### Cartão de dados ResScan

- Permite o acesso remoto aos dados do paciente armazenados.
- As configurações são atualizadas remotamente.
- Faz interface com a aplicação da ResMed para PC.
- Reconhece o dispositivo atual. As configurações podem ser especificamente dirigidas a um determinado paciente.
- Funciona como meio seguro para a transferência de dados.



## Umidificação integrada opcional

Uma ação exclusiva em espiral dupla permite que o HumidAire 3i umidifique eficazmente o ar fornecido às vias aéreas do paciente durante a terapêutica por CPAP. O design moderno e compacto do umidificador integra-se totalmente em um único dispositivo quando combinado com o S8 Escape.

## Sistema exclusivo de lembretes para o paciente incorporado

Os lembretes personalizáveis no S8 Escape são programados pelo profissional, de forma a informar os pacientes quando for necessário:

- entrar em contato com o médico ou o prestador de cuidados domiciliares
- substituir o filtro
- encomendar uma nova máscara
- efetuar a manutenção do dispositivo
- devolver o cartão de dados ResScan

Esta função exclusiva ajuda-o a otimizar a gestão dos pacientes e aumentar as receitas subseqüentes.

## REFERÊNCIA

### S8 Escape

Américas 33007

### HumidAire 3i

Américas 33906

## PERFEITO PARA OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO SONO

- Sistema de lembretes ao paciente—melhora a gestão de pacientes e as oportunidades de receitas subseqüentes
- Proteção do investimento—concebido de forma a integrar-se aos sistemas futuros
- Design modular—proporciona uma gestão de inventários racionalizada
- Cartão de dados ResScan—adapta-se a alterações das práticas comerciais e facilita a adoção da terapêutica. Os pacientes e os médicos podem acessar facilmente os dados, ao passo que a terapêutica também pode ser programada por um profissional em qualquer tempo, em qualquer lugar.
- Acesso por porta série e USB apenas quando solicitado—proporciona ao médico um maior controle sobre o acesso pelos pacientes (se disponível)

## PERFEITO PARA OS PACIENTES

- Design compacto—discreto no quarto e fácil de embalar para viagem
- Entrada de 12V ou 24V CC—aplicação vasta
- Definição de altitude em 4 níveis—liberdade para viajar
- Função de definição de rampa—0–45 minutos em incrementos de 5 minutos
- Menu de fácil utilização—proporciona um acesso flexível ao menu dos pacientes

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (APENAS PARA O S8 ESCAPE)

### Desempenho

Intervalo de pressões de funcionamento (ajuste manual da altitude) 4–20 cm H<sub>2</sub>O

### Armazenamento de dados

Horas de utilização e dias de utilização disponíveis a partir do gerador de fluxo. Dias de utilização para as 180 sessões mais recentes disponíveis local e remotamente através da aplicação para PC

### Dimensões (A x L x P)

(112 mm x 164 mm x 145 mm)  
4,6" x 6,5" x 5,7"

### Peso

Gerador de fluxo: 1,3 kg (2,9 lb)

### Intervalo de alimentação

100–240V CA, 50/60Hz, 12V ou 24V CC através do conversor DC-12 da ResMed. Consulte o Manual do Usuário para obter detalhes sobre os valores do consumo de energia em condições de tratamento típicas.

### Construção da caixa

Termoplástico de engenharia retardador de chama

### Condições ambientais

Temperatura de funcionamento: de +5°C a +40°C (de +41°F a +104°F)

### Filtro de ar

Duas camadas de fibra não tecida de poliéster unidas por pó

### Tubo de ar

Plástico flexível, 2 m (6'6") de comprimento

### Classificação

Classe II (isolamento duplo), Tipo CF  
IPX1  
US FCC Parte 15, Classe B\*  
IEC 60601-1

\*Antes de utilizar o dispositivo em uma aeronave, consulte o departamento médico da companhia aérea.

Nota: O fabricante reserva-se o direito de alterar estas especificações sem aviso prévio.