

RESMED

S8 II **S8 Escape™ II Auto**

APPAREIL DE PRESSION POSITIVE

Guide utilisateur

Français

Français

Sommaire

Introduction	1
Contre-indications	1
Effets secondaires	1
Composants du système S8 Escape II Auto	2
Masques	2
Humidificateurs	2
Carte de données ResScan	2
Utilisation de la S8 Escape II Auto	3
Installation de la S8 Escape II Auto	3
Utilisation du panneau de contrôle	4
Démarrage du traitement	5
Arrêt du traitement	5
Modification des réglages de votre S8 Escape II Auto	5
Utilisation de la carte de données pour collecter des données	8
Nettoyage et entretien	9
Quotidien	9
Hebdomadaire	9
Mensuel	10
Remplacement du filtre à air	10
Réparations	11
Foire aux questions	11
Stratégie de dépannage	13
Caractéristiques	14
Symboles apparaissant sur l'appareil	15
Avertissements et précautions d'ordre général	16
Garantie limitée	18

Introduction

La S8 Escape II Auto est un appareil autopiloté de pression positive prévu pour le traitement du syndrome d'apnées obstructives du sommeil (SAOS) chez l'adulte. La S8 Escape II Auto possède deux modes de traitement : APAP (titration automatique de la pression) et CPAP (pression fixe). La S8 Escape II Auto est prévue pour une utilisation à domicile ou en milieu médical.

Contre-indications

Le traitement par pression positive est contre-indiqué chez certains patients présentant l'une des pathologies préexistantes suivantes :

- affection pulmonaire bulleuse grave
- pneumothorax
- hypotension
- déshydratation
- fuite de liquide céphalo-rachidien, récent traumatisme crânien ou intervention chirurgicale crânienne.

Effets secondaires

Les patients doivent avertir leur médecin traitant en cas de douleurs thoraciques inhabituelles, de maux de tête sévères ou d'une dyspnée accrue. Une infection aiguë des voies aériennes supérieures peut nécessiter l'arrêt temporaire du traitement.

Les effets secondaires suivants peuvent apparaître au cours du traitement par pression positive :

- sécheresse nasale, buccale ou de la gorge
- saignements de nez
- ballonnements
- gêne au niveau de l'oreille ou des sinus
- irritation des yeux
- érythèmes cutanés
- gêne au niveau de la poitrine.



ATTENTION

Selon la loi fédérale américaine, cet appareil ne peut être vendu aux USA que par un médecin ou sur prescription médicale.


Composants du système S8 Escape II Auto

Votre S8 Escape II Auto fait partie d'un système complet qui comprend les éléments suivants :

- S8 Escape II Auto
- Circuit respiratoire 6'6" (2 m)
- Câble d'alimentation
- Sac de transport.

Les composants en option sont les suivants :

- Carte de données ResScan™
- Circuit respiratoire 9'9" (3 m)
- Convertisseur DC-12.

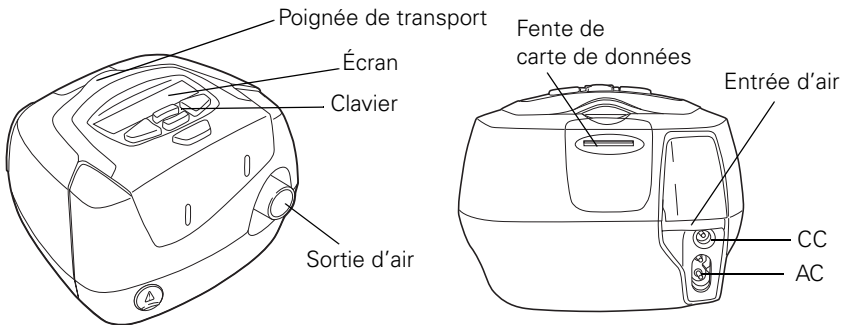

Masques

Pour les informations concernant l'utilisation des masques, veuillez vous référer au manuel de votre masque. Vous trouverez la liste des masques recommandés sur le site www.resmed.com, à la page **Produits** de la rubrique **SAV et assistance**.



AVERTISSEMENT

Seuls les masques ResMed peuvent être utilisés avec la S8 Escape II Auto. Veuillez vous référer à la section « Avertissements et précautions d'ordre général » page 16.

Humidificateurs

Vous trouverez la liste des humidificateurs compatibles avec les appareils ResMed sur le site www.resmed.com, à la page **Produits** de la rubrique **SAV et assistance**.


Carte de données ResScan

La carte de données ResScan peut être utilisée avec la S8 Escape II Auto pour aider votre clinicien à contrôler votre traitement ou pour vous donner des mises à jour pour les réglages de votre appareil.

Utilisation de la S8 Escape II Auto

Installation de la S8 Escape II Auto

- 1 Branchez le câble d'alimentation dans la prise située à l'arrière de l'appareil.
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble d'alimentation à une prise de courant.
- 3 Raccordez fermement une extrémité du circuit respiratoire à la sortie d'air.
- 4 Raccordez le masque assemblé à l'extrémité libre du circuit respiratoire. Pour de plus amples informations sur le montage du masque, veuillez vous référer au manuel de ce dernier.

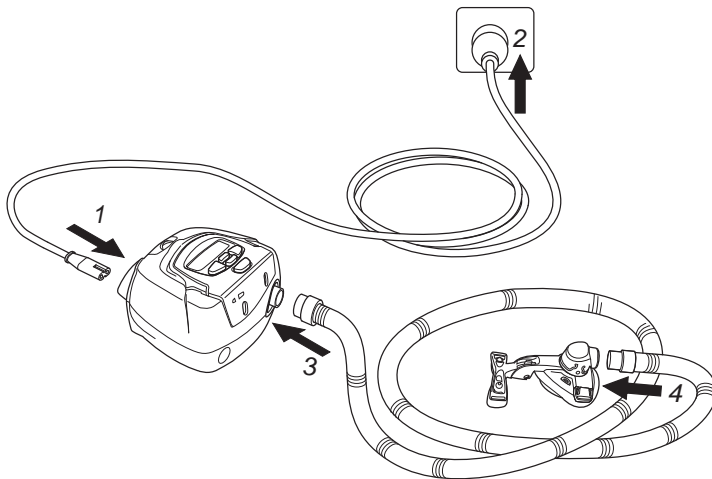

AVERTISSEMENT


- Vérifier que le câble d'alimentation et sa fiche ou le câble de l'adaptateur sont en bon état et que l'équipement n'est pas endommagé.
- Seul le circuit respiratoire ResMed peut être utilisé avec l'appareil. Les circuits respiratoires d'un autre type risquent de modifier la pression reçue et de réduire l'efficacité de votre traitement.
- L'obstruction du circuit et/ou de l'entrée d'air pendant le fonctionnement risque de causer une surchauffe de l'appareil.



ATTENTION



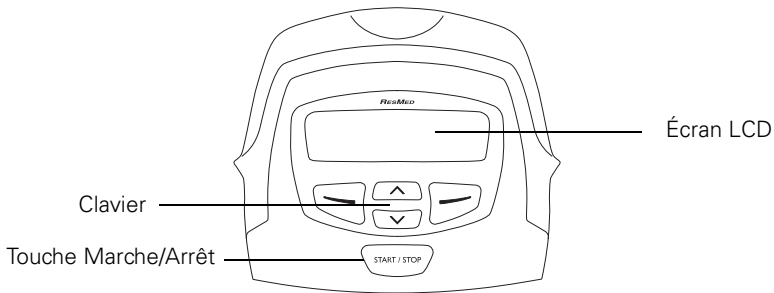


- Veiller à placer l'appareil de façon à éviter que quelqu'un puisse buter dedans, le faire tomber ou se prendre les pieds dans le câble d'alimentation.
- Si l'appareil est posé sur le sol, veiller à ce qu'il le soit dans un endroit exempt de poussière, de literie, de vêtements ou de tout autre objet susceptible d'obstruer l'entrée d'air.
- Vérifier que la zone autour de l'appareil est propre et sèche.

Utilisation du panneau de contrôle



Le panneau de contrôle de la S8 Escape II Auto comprend un écran LCD pour l'affichage des menus et des écrans de traitement. Il comprend également un clavier, qui vous permet de naviguer dans les menus et de démarrer ou d'arrêter le traitement.

Le clavier de la S8 Escape II Auto comprend les touches suivantes :

Touche	Fonction
Marche/Arrêt 	<ul style="list-style-type: none">• Permet de démarrer ou d'arrêter le traitement.
Déplacement vers le haut 	<ul style="list-style-type: none">• Permet de passer d'une option à l'autre dans le menu.• Permet d'augmenter les valeurs de réglage.
Déplacement vers le bas 	<ul style="list-style-type: none">• Permet de passer d'une option à l'autre dans le menu.• Permet de réduire les valeurs de réglage.
Gauche 	<ul style="list-style-type: none">• Permet d'exécuter la fonction indiquée par le texte d'explication affiché sur l'écran LCD au-dessus de cette touche (par ex. changer).
Droite 	<ul style="list-style-type: none">• Permet d'exécuter la fonction indiquée par le texte d'explication affiché sur l'écran LCD au-dessus de cette touche (par ex. quitter).

Le clavier et l'écran LCD sont équipés d'un rétro-éclairage qui s'allume lorsque l'appareil est en marche. Le rétro-éclairage de l'écran LCD s'éteint au bout de deux minutes d'inactivité et se rallume dès que vous appuyez sur une touche. Le rétro-éclairage du clavier est allumé en permanence lorsque la S8 Escape II Auto est sous tension.


Démarrage du traitement

- 1 Vérifiez que l'appareil est sous tension.
Le nom du produit s'affiche brièvement sur l'écran LCD, puis l'écran d'attente RAMPE/ATT. s'affiche. Le rétro-éclairage du clavier et celui de l'écran LCD s'allument également.
- 2 Allongez-vous et placez le circuit respiratoire de manière à ce qu'il puisse suivre vos mouvements pendant que vous dormez.



ATTENTION

Ne pas laisser de longueurs inutiles de tuyau en haut du lit. Elles pourraient s'enrouler autour de votre tête ou de votre cou pendant que vous dormez.


- 3 Modifiez la durée de rampe ou le temps d'attente si nécessaire.
- 4 Pour démarrer le traitement, appuyez sur la touche .
- 5 Mettez votre masque comme indiqué dans son mode d'emploi.



AVERTISSEMENT

Le masque ne peut être porté que si la S8 Escape II Auto est sous tension et si elle fonctionne correctement.


Arrêt du traitement

Pour arrêter le traitement à tout moment, retirez votre masque et appuyez sur la touche .

Modification des réglages de votre S8 Escape II Auto

Vous pouvez modifier les réglages (tels que la durée de rampe et le temps d'attente) de la S8 Escape II Auto en vous servant du clavier et de l'écran LCD. Lorsque la S8 Escape II Auto est en mode d'attente, vous pouvez afficher une série d'écrans (menu) sur l'écran LCD afin de voir et de modifier les réglages d'une fonction particulière.

Ce menu vous permet d'accéder à des données sur votre traitement, comme l'IAH et la pression, lorsque votre clinicien/médecin vous demande de le faire.

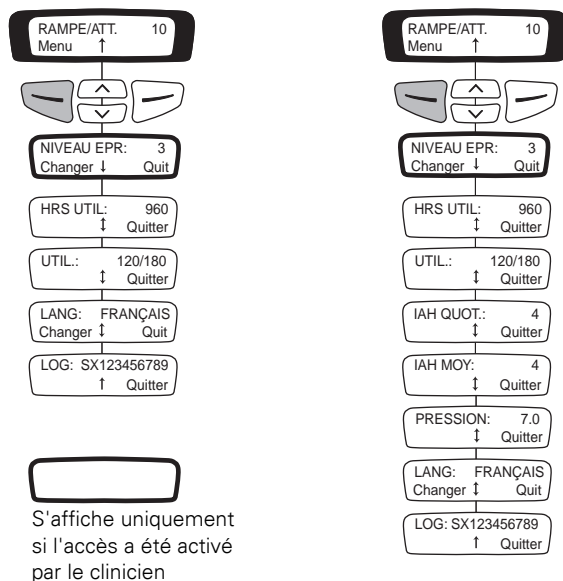




Modification de la durée de rampe ou du temps d'attente

Pendant la durée de rampe (en mode CPAP), la pression augmente d'une pression basse confortable à la pression prescrite pour le traitement.

En mode APAP, l'appareil maintient une pression minimum pendant le temps d'attente avant de commencer à ajuster la pression en réponse aux événements respiratoires.







Vous pouvez régler la durée de rampe/le temps d'attente par incréments de 5 minutes sur n'importe quelle valeur comprise entre 0 minute (OFF) et la durée maximale fixée par votre clinicien.

La durée de rampe ou le temps d'attente actuellement réglé est affiché dans le coin droit de l'écran d'attente.







- 1 Appuyez sur la touche  ou  jusqu'à ce que la durée de rampe ou le temps d'attente voulu s'affiche.
- 2 Une fois qu'une durée de rampe ou un temps d'attente a été sélectionné, démarrez le traitement en appuyant sur la touche . Lorsque la montée en pression ou l'attente commence, « MONTEE PRES » ou « APAP » s'affiche à l'écran LCD (selon le mode sélectionné), avec la pression actuelle indiquée sous forme de tirets. Chaque tiret correspond approximativement à 2 cm H₂O. Par exemple, 6 tirets correspondent à une pression d'environ 12 cm H₂O.

Modification du niveau d'EPR

L'EPR peut s'avérer utile pour soulager toute gêne que vous pourriez éventuellement ressentir durant le traitement lorsque vous expirez. Si votre clinicien a activé votre accès à ce paramètre, vous pouvez modifier le niveau d'EPR. Vous avez le choix entre quatre réglages : OFF (pas d'EPR) ; 1 (EPR légère) ; 2 (EPR moyenne) ; et 3 (EPR maximum).

- 1 À l'écran d'attente (RAMPE/ATT.), appuyez sur la touche  (Menu).
- 2 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que NIVEAU EPR s'affiche, puis appuyez sur la touche  (Changer).
- 3 Appuyez sur la touche  ou  jusqu'à ce que le réglage souhaité s'affiche.
- 4 Appuyez sur la touche  (Appliquer) pour enregistrer le réglage.

Modification du réglage de la langue






- 1 À l'écran d'attente (RAMPE/ATT.), appuyez sur la touche  (Menu).
- 2 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que LANG s'affiche, puis appuyez sur la touche  (Changer).
- 3 Appuyez sur  ou  jusqu'à ce que la langue souhaitée s'affiche.
- 4 Appuyez sur la touche  (Appliquer) pour enregistrer la nouvelle langue.

Messages affichés sur l'écran LCD de la S8 Escape II Auto

Votre clinicien a peut-être réglé votre S8 Escape II Auto pour qu'elle vous rappelle des choses importantes, comme le moment où vous devez remplacer votre masque, le moment où vous devez insérer votre carte de données (si votre appareil prend la carte de données en charge), etc.

Le message de rappel s'affiche sur l'écran LCD et peut être lu même lorsque l'appareil ne délivre pas de traitement. Le rétro-éclairage de l'écran LCD clignote lorsqu'un message s'affiche.

Votre clinicien peut régler les rappels suivants sur votre écran LCD :

Message	Description	Action
INSERER CARTE	Peut s'afficher si votre appareil prend la carte de données en charge.	Insérez votre carte de données et suivez les instructions que votre clinicien vous a données. Une fois que vous avez terminé, le message disparaît de l'écran. Vous pouvez également l'effacer en appuyant sur la touche  (Ok).
REPLACER MASQUE	Peut s'afficher lorsque votre masque doit être remplacé.	Appuyez sur la touche  (Ok) pour effacer le message de l'écran et remplacez votre masque par un neuf.
APPEL CLINICIEN	Peut s'afficher pour vous rappeler de contacter votre clinicien, par exemple pour discuter de votre traitement.	Appuyez sur la touche  (Ok) pour effacer le message de l'écran et contactez votre clinicien.
REPLACER FILTRE	Peut s'afficher pour vous rappeler de remplacer le filtre à air de votre appareil.	Appuyez sur la touche  (Ok) pour effacer le message de l'écran et remplacez le filtre à air.
ENTRETIEN ECHU	Peut s'afficher pour vous rappeler de retourner votre appareil pour entretien.	Appuyez sur la touche  (Ok) pour effacer le message de l'écran et contactez votre clinicien.

Utilisation de la carte de données pour collecter des données

Lorsque votre clinicien veut consulter les données de votre traitement, il vous demande d'utiliser la carte de données pour copier les données de votre S8 Escape II Auto et de lui renvoyer la carte.

Copie des données sur la carte de données

- 1 Mettez la S8 Escape II Auto sous tension et attendez que l'écran d'attente (RAMPE/ATT.) s'affiche.
- 2 Prenez la carte de données avec la flèche dirigée vers le haut et insérez-la dans la fente de carte de données jusqu'à la butée. La copie des données démarre automatiquement.

Le message « CARTE INSEREE Patientez SVP » s'affiche sur l'écran LCD pendant la copie des données. La copie prend environ cinq secondes. Le message « COPIE TERMINEE Retirez carte » s'affiche sur l'écran LCD une fois que la copie est terminée.

- 3** Retirez la carte de données en la prenant par le bout qui dépasse et en tirant.
- 4** Rangez la carte de données dans son étui de protection lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- 5** Pour retourner la carte à votre clinicien, mettez l'étui avec la carte dans une enveloppe postale.

Utilisation de la carte de données pour mettre les réglages à jour

Si votre clinicien vous a fourni une carte de données qui contient de nouveaux réglages pour votre appareil :

- 1** Avec l'appareil en mode d'attente, insérez la carte de données dans la fente du module de carte de données. La mise à jour des réglages commence automatiquement.

Le message « CARTE INSEREE Patientez SVP » s'affiche sur l'écran LCD pendant la mise à jour. La mise à jour prend environ cinq secondes.

Le message « CHARG. REUSSI Retirez carte » s'affiche sur l'écran LCD si la mise à jour des réglages a réussi.

Remarque : ce message ne s'affiche qu'une seule fois. Si vous insérez la carte de données une nouvelle fois après avoir mis vos réglages à jour, il ne s'affiche pas.

- 2** Retirez la carte de données de la S8 Escape II Auto.
- 3** Rangez la carte de données dans son étui de protection lorsqu'elle n'est pas utilisée.



AVERTISSEMENT

Si votre clinicien vous a demandé d'utiliser la carte de données pour mettre les réglages de votre appareil à jour et si le message « CHARG. REUSSI » ne s'affiche pas, contacter votre clinicien immédiatement.

Nettoyage et entretien

Quotidien

Détachez le circuit respiratoire et suspendez-le dans un endroit propre et sec jusqu'à la prochaine utilisation.

Hebdomadaire

- 1** Détachez le circuit respiratoire de la S8 et du masque.

- 2 Nettoyez le circuit respiratoire à l'eau tiède avec un détergent doux.
- 3 Rincez soigneusement et suspendez-le pour le faire sécher.
- 4 Avant la prochaine utilisation, raccordez à nouveau le circuit respiratoire à la sortie d'air et au masque.

Mensuel

- 1 Nettoyez l'extérieur de la S8 à l'aide d'un chiffon humide et de savon liquide doux.
- 2 Vérifiez que le filtre à air n'est ni percé ni bloqué par de la saleté ou de la poussière.



AVERTISSEMENT

- Risque de chocs électriques. Ne pas immerger l'appareil ni le câble d'alimentation dans l'eau. Systématiquement débrancher l'appareil avant de le nettoyer et vérifier qu'il est bien sec avant de le rebrancher.
- Le masque et le circuit respiratoire subissent une usure normale. Les inspecter régulièrement pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés.




ATTENTION

- Ne pas suspendre le circuit respiratoire à la lumière directe du soleil afin d'éviter qu'il ne durcisse ou ne se fissure avec le temps.
- Ne pas utiliser d'eau de Javel, de chlore, d'alcool ou de solutions parfumées (y compris les huiles parfumées), ni de savons hydratants ou antibactériens pour le nettoyage du circuit respiratoire ou de la S8. Ces solutions peuvent causer le durcissement du matériel et réduire sa durée de vie.

Remplacement du filtre à air

Remplacez le filtre à air tous les six mois (ou plus souvent si nécessaire).

- 1 Retirez le couvercle du logement du filtre à air à l'arrière de la S8.

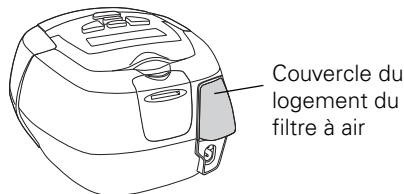

- 2 Retirez et jetez le filtre à air usagé.
- 3 Insérez un nouveau filtre à air avec la face bleue dirigée vers l'extérieur.
- 4 Remettez le couvercle du logement du filtre à air en place.

**AVERTISSEMENT**

- Ne pas laver le filtre à air. Il n'est ni lavable ni réutilisable.
- Le couvercle du logement du filtre à air protège l'appareil contre tout déversement accidentel de liquides. Veiller à ce que le filtre à air et le couvercle de son logement soient toujours en place.

Réparations

Ce produit (S8 Escape II Auto) doit être inspecté par un service technique agréé ResMed 5 ans après la date de fabrication. Avant cette date, l'appareil devrait assurer un fonctionnement fiable et sûr à condition qu'il soit utilisé et entretenu conformément aux instructions fournies par ResMed. Les informations concernant la garantie ResMed sont fournies avec l'appareil lors de sa livraison initiale. Comme avec tous les appareils électriques, si vous constatez un défaut quelconque, vous devez faire vérifier l'appareil par un service technique agréé ResMed.

Si vous pensez que votre appareil ne fonctionne pas correctement, voir « Stratégie de dépannage » page 13.

**ATTENTION**

- Ne pas essayer d'ouvrir le boîtier de la S8 Escape II Auto. Il ne contient aucune pièce pouvant être entretenue par l'utilisateur.
- L'inspection et les réparations doivent être effectuées par un technicien agréé. Ne jamais essayer d'entretenir ou de réparer la S8 Escape II Auto vous-même.

Foire aux questions**Quelle sensation est-ce que je vais ressentir la première fois que je respirerai avec la S8 II ?**

Lors de la première utilisation de votre S8 II, il est possible que vous ressentiez une gêne lorsque vous respirez contre le débit d'air. Ceci est normal. Vous continuerez à respirer normalement pendant que vous dormez. Le paramètre EPR peut également améliorer le confort du traitement. Prenez le temps de vous habituer à cette nouvelle sensation.

Qu'est-ce que je dois faire si j'ai besoin de me lever la nuit ?

Si vous devez vous lever pendant la nuit, retirez votre masque et arrêtez l'appareil à l'aide de la touche Marche/Arrêt. N'oubliez pas de remettre le masque et de redémarrer l'appareil lorsque vous retournez vous coucher.

Qu'est-ce que je dois faire si je sens des fuites d'air au niveau du masque ?

La S8 II délivre un traitement optimal lorsque le masque est bien ajusté et confortable sans être trop serré. Le traitement peut être affecté par les fuites ; c'est pourquoi il est important de les éliminer lorsqu'elles se produisent. Vous pouvez par exemple essayer de repositionner le masque et d'ajuster les sangles.

Si vous utilisez un masque nasal, essayez de garder la bouche fermée pendant le traitement. Les fuites d'air buccales peuvent diminuer l'efficacité de votre traitement. Si les fuites buccales vous posent problème, vous avez la possibilité d'utiliser un masque facial ou une mentonnière. Contactez votre clinicien ou votre prestataire de santé pour de plus amples informations.

Si vous utilisez un masque facial et avez du mal à ajuster votre masque confortablement, contactez votre clinicien ou votre prestataire de santé. Il est possible qu'une autre taille ou un autre type de masque permette de résoudre votre problème.

Est-ce que je dois prendre des précautions spéciales avant de mettre le masque ?

Avant de mettre votre masque, lavez-vous le visage pour éliminer tout excès de sébum. Cette précaution permet un meilleur ajustement du masque et prolonge la durée de vie de la bulle du masque.

N'utilisez pas de crème hydratante lorsque vous portez le masque.

J'ai la bouche sèche pendant le traitement – Qu'est-ce que je peux faire ?

Il est possible que vous souffriez de sécheresse nasale, buccale ou de la gorge pendant le traitement, notamment pendant les mois d'hiver. Dans de nombreux cas, l'utilisation d'un humidificateur permet de pallier ce problème. Contactez votre clinicien pour plus de détails.

J'ai le nez irrité pendant le traitement – Qu'est-ce que je peux faire ?

Il est possible que vous éternuez et/ou que votre nez coule ou se bouche lors des premières semaines de traitement. Dans de nombreux cas, ces symptômes d'irritation nasale peuvent être éliminés à l'aide d'un humidificateur. Consultez votre clinicien ou votre prestataire de santé pour plus de détails.

Est-ce que je peux emporter la S8 II avec moi en voyage ?

Votre S8 II est équipée d'une carte d'alimentation qui lui permet de fonctionner dans différents pays. Elle peut fonctionner avec des courants de 100 – 240 V et 50/60 Hz. Aucun réglage spécial n'est requis, mais vous aurez besoin d'un câble d'alimentation homologué pour le pays où vous voulez utiliser l'appareil.

Veuillez consulter le service médical de votre compagnie aérienne si vous souhaitez utiliser votre S8 II à bord d'un avion. La S8 II est conforme aux règlements de la FCC (USA), Partie 15, normes applicables aux équipements de Classe B.

***Remarque :** n'utilisez pas votre S8 II pendant le décollage ou l'atterrissage.*

Est-ce que je peux utiliser ma S8 II s'il n'y a pas d'alimentation secteur (AC) ?

Un convertisseur DC-12 a été prévu pour la connexion de la S8 II à une alimentation de 12 ou 24 V CC. Contactez ResMed pour plus de détails.



ATTENTION

L'appareil ne doit pas être connecté simultanément à une alimentation AC et à une alimentation CC.

Stratégie de dépannage

En cas de problème, reportez-vous aux suggestions suivantes. Si le problème persiste, contactez votre prestataire de santé ou ResMed. N'essayez pas d'ouvrir l'appareil.

Problème/Cause possible	Solution
-------------------------	----------

Aucun affichage.

L'alimentation n'est pas connectée.

Vérifiez que le câble d'alimentation est branché et que l'interrupteur de la prise de courant (le cas échéant) est sur marche.

Le débit d'air délivré par la S8 II est insuffisant.

La durée de rampe est activée.

Attendez que la pression augmente ou modifiez la durée de rampe.

Le filtre à air est sale.

Remplacez le filtre à air.

Le circuit respiratoire est entortillé ou percé.

Désentortillez ou remplacez le circuit respiratoire.

Le circuit respiratoire n'est pas correctement raccordé.

Vérifiez le circuit respiratoire.

Le masque et le harnais sont mal mis en place.

Ajustez la position du masque et du harnais.

Un ou des bouchons manquent au niveau des ports du masque.

Remplacez le(s) bouchon(s).

La pression requise pour le traitement a peut-être changé.

Consultez votre clinicien pour ajuster la pression.

Affichage du message d'erreur : Exxxx Appel SERVICE! (où xxxxx correspond à un numéro d'erreur) ou DEFAULT MOTEUR Appel SERVICE! ou CHARGER LANGUES Appel SERVICE! ou DONNEES PERDUES Appel SERVICE!

Composant défectueux.

Contactez le service après-vente.

Le message suivant s'affiche sur l'écran LCD après que vous avez essayé de mettre les réglages à jour ou de copier les données sur la carte de données : ERREUR CARTE Retirez carte

La carte de données n'est pas correctement insérée.

Vérifiez que la carte de données est insérée dans le module de carte de données avec la flèche dirigée vers le haut et lorsque la S8 II est sous tension mais qu'elle ne délivre pas de traitement (mode d'attente).

La carte de données est insérée partiellement seulement.

Vérifiez que la carte de données est insérée dans la fente de carte de données jusqu'à la butée.

Problème/Cause possible	Solution
Vous avez peut-être retiré la carte de données avant que les réglages n'aient été copiés sur la S8 II.	Insérez la carte de données à nouveau et attendez que le message CHARG. REUSSI Retirez carte s'affiche sur l'écran LCD.
La carte n'est pas une carte de données ResScan.	Utilisez uniquement une carte de données ResScan.
Le message suivant s'affiche sur l'écran LCD après que vous avez essayé de mettre les réglages à jour ou de copier les données sur la carte de données : REGL. INVALIDES Retirez carte	
Les données d'identification de la carte de données ne correspondent pas à celles de votre appareil.	Contactez votre clinicien immédiatement.
Le message suivant s'affiche sur l'écran LCD après que vous avez essayé de mettre les réglages à jour ou de copier les données sur la carte de données : ERREUR REGLAGES Retirez carte	
Erreur de données sur la carte de données.	Contactez votre clinicien immédiatement.
Le message suivant ne s'affiche PAS sur l'écran LCD après que vous avez essayé de mettre les réglages à jour à l'aide de la carte de données : CHARG. REUSSI Retirez carte	
Les réglages n'ont pas été mis à jour.	Contactez votre clinicien immédiatement.







Caractéristiques

Pression de fonctionnement	4 à 20 cm H ₂ O
Dimensions (H x l x P)	4,6" x 6,5" x 5,7" (112 mm x 164 mm x 145 mm)
Poids	2,9 lb (1,3 kg)
Alimentation électrique	<ul style="list-style-type: none"> • Courant pour la S8 Escape II Auto avec l'H4i : 100 – 240 V, 50/60 Hz ; 110 V, 400 Hz ; 2,5 A < 140 VA (110 W) (consommation maximale de courant). Puissance maximale instantanée < 340 VA. • Veuillez vous référer au mode d'emploi du convertisseur DC-12 pour les valeurs nominales de courant continu. Utilisez uniquement le convertisseur DC-12 ResMed avec l'entrée CC. • La consommation typique de courant à 20 cm H₂O est 34 VA ou 20 W.
Filtre à air	Deux couches de mousse à cellules ouvertes de polyester, imprégnées de fibres polyester
Circuit respiratoire	Plastique flexible, longueur 6'6" (2 m)

Sortie d'air	Le raccord de sortie conique 22 mm est conforme à la norme EN 1281-1
Classifications CEI 60601-1	Classe II (double isolation), Type CF
Niveau de pression acoustique	Le niveau de pression acoustique est mesuré à moins de 26 ± 2 dBA à 10 cm H ₂ O et à 3' 3,36" (1 m) de distance conformément à ISO17510-1.
Adjonction d'oxygène	Débit maximum recommandé pour l'adjonction d'oxygène : 4 l/min
Boîtier	Thermoplastique ignifugé
Température de fonctionnement	+41°F à +95°F (+5°C à +35°C)
Humidité de fonctionnement	10 à 95 % sans condensation
Température de stockage et de transport	-4°F à +140°F (-20°C à +60°C)
Humidité de stockage et de transport	10 à 95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	Niveau de la mer à 8500' (2591 m)
Compatibilité électromagnétique	Le produit est conforme à toutes les exigences de compatibilité électromagnétique (CEM) applicables, conformément à CEI60601-1-2, pour les environnements commerciaux et résidentiels, et pour l'industrie légère. Vous trouverez les tableaux de compatibilité électromagnétique pour ces appareils ResMed sur le site www.resmed.com , à la page Produits de la rubrique SAV et assistance . Une fois sur cette page, cliquez sur le fichier PDF qui correspond à votre appareil.

Remarque : le fabricant se réserve le droit de modifier ces caractéristiques sans notification préalable.

Symboles apparaissant sur l'appareil

-  Attention, veuillez consulter la documentation jointe ;  Protection anti-gouttes ;
-  Équipement de type CF ;  Tension potentiellement dangereuse ;
-  Équipement de classe II ;  Marche/Arrêt.

Avertissements et précautions d'ordre général



AVERTISSEMENTS

- Lire le manuel entièrement avant d'utiliser la S8 II.
- Les conseils donnés dans ce guide ne remplacent pas les instructions du médecin traitant.
- Un patient ne doit connecter aucun appareil au port de communication de données sauf si son prestataire de santé ou son médecin lui a demandé de le faire. Seuls les produits ResMed peuvent être connectés au port de communication de données. La connexion d'autres appareils peut causer des blessures ou endommager la S8 II.
- La S8 II doit être utilisée avec les masques (et raccords)* recommandés par ResMed, un médecin ou un kinésithérapeute respiratoire. Le masque ne peut être porté que si la S8 II est sous tension et si elle fonctionne correctement. Les orifices de ventilation du masque ne doivent jamais être obstrués.

Explication : la S8 II est conçue pour être utilisée avec des masques (ou raccords)* spéciaux possédant des orifices de ventilation qui permettent l'écoulement continu de l'air hors du masque. Lorsque l'appareil est sous tension et qu'il fonctionne correctement, de l'air propre provenant de l'appareil expulse l'air expiré via les orifices de ventilation du masque. Cependant, lorsque l'appareil ne fonctionne pas, le débit d'air propre délivré dans le masque est insuffisant et une réinhalation de l'air expiré peut se produire. Si la réinhalation de l'air expiré dure plus de quelques minutes, elle peut, dans certains cas, entraîner une suffocation. Cela vaut pour la plupart des appareils de pression positive.

- En cas de coupure de courant ou de dysfonctionnement de l'appareil, retirer le masque.
- La S8 II peut être réglée pour délivrer des pressions pouvant aller jusqu'à 20 cm H₂O. Dans le cas peu probable d'une défaillance, les pressions peuvent s'élever jusqu'à 30 cm H₂O.
- Si de l'oxygène est utilisé avec cet appareil, l'alimentation en oxygène doit être fermée lorsque l'appareil n'est pas en mode de fonctionnement. Si l'alimentation en oxygène a été laissée ouverte, mettre l'appareil hors tension, puis attendre 30 minutes avant de le remettre sous tension.

Explication : lorsque l'appareil de pression positive n'est pas en marche et que l'alimentation en oxygène n'est pas coupée, l'oxygène délivré dans le circuit respiratoire peut s'accumuler dans l'appareil et créer un risque d'incendie. Cela vaut pour la plupart des appareils de pression positive.

- L'oxygène est inflammable. Ne pas fumer ni approcher de flamme nue de l'appareil lors de l'utilisation d'oxygène.

* Des ports peuvent être intégrés au masque ou à des raccords proches du masque.

- Systématiquement vérifier qu'un débit d'air est généré par l'appareil avant d'ouvrir l'alimentation en oxygène.
- Systématiquement couper l'alimentation en oxygène avant d'arrêter le débit d'air de l'appareil.

Remarque : *lorsque l'adjonction d'oxygène est délivrée à un débit fixe, la concentration de l'oxygène inhalé varie en fonction du point d'entrée de l'oxygène, des réglages de pression, de la respiration du patient, du masque sélectionné ainsi que du niveau de fuite.*

- Ne pas utiliser la S8 II en cas de défauts externes évidents ou si sa performance devient aléatoire.
- Ne pas ouvrir le boîtier de la S8 II. Il ne contient aucune pièce pouvant être entretenue par l'utilisateur. Les réparations et l'entretien interne doivent être effectués par un technicien agréé.
- Risque d'explosion – Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'anesthésiques inflammables.



ATTENTION

- À basses pressions, le débit aux orifices de ventilation de votre masque peut s'avérer insuffisant pour expulser tous les gaz expirés hors du circuit respiratoire. Une réinhalation peut se produire.
- La température du débit d'air produit par cet appareil peut être supérieure de 11°F (6°C) à la température ambiante. Des précautions particulières devront être prises lorsque la température ambiante est supérieure à 90°F (32°C).
- En l'absence d'alimentation secteur AC (100/240 V AC), systématiquement utiliser un convertisseur DC-12. (Le convertisseur DC-12 est vendu comme accessoire optionnel. Il n'est pas fourni avec tous les modèles.)

Remarque : *les avertissements et précautions précédents sont d'ordre général. Les avertissements, précautions et remarques spécifiques sont donnés avec les instructions auxquelles ils se rapportent dans le manuel.*

Garantie limitée

ResMed garantit votre produit ResMed contre tout défaut de matériaux et de main-d'œuvre pour la période spécifiée ci-après à compter de la date d'achat par le client d'origine. Cette garantie n'est pas cessible.

Produit	Durée de la garantie
Humidificateurs ResMed, ResControl™, ResLink™, ResTraxx™	1 an
Appareils de traitement ResMed	2 ans
Accessoires, masques (y compris entourage rigide, bulle, harnais et circuit respiratoire). Les appareils à usage unique sont exclus.	90 jours

Remarque : certains modèles ne sont pas disponibles dans tous les pays.

En cas de défaillance du produit dans des conditions normales d'utilisation, ResMed, à son entière discrétion, répare ou remplace le produit défectueux ou toute pièce. Cette garantie limitée ne couvre pas :

- a) tout dommage résultant d'une utilisation incorrecte, d'un usage abusif ou d'une modification ou transformation opérée sur le produit ;
- b) les réparations et l'entretien effectués par tout service de réparation sans l'autorisation expresse de ResMed ;
- c) tout dommage ou contamination causé par de la fumée de cigarette, de pipe, de cigare ou autre ;
- d) tout dommage causé par de l'eau renversée sur ou dans un appareil.

La garantie est annulée pour les produits vendus ou revendus dans un pays autre que celui où ils ont été achetés à l'origine.

Les réclamations au titre de la garantie pour les produits défectueux doivent être présentées au lieu d'achat par le client initial.

Cette garantie remplace toute autre garantie expresse ou implicite, y compris toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Certains pays ou états n'autorisent pas les limitations de durée pour les garanties implicites ; il est donc possible que la limitation susmentionnée ne s'applique pas à votre cas.

ResMed ne peut être tenue pour responsable de tout dommage accessoire ou indirect résultant de la vente, de l'installation ou de l'utilisation de tout produit ResMed. Certains pays ou états n'autorisent ni l'exclusion ni la limitation des dommages accessoires ou indirects ; il est donc possible que la limitation susmentionnée ne s'applique pas à votre cas. Cette garantie vous octroie des droits reconnus par la loi, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient en fonction du pays où vous habitez.

Pour de plus amples informations sur vos droits de garantie, veuillez contacter votre prestataire de santé ou ResMed.