

Lista de Compatibilidade entre Máscara/Dispositivo

Este documento especifica as máscaras compatíveis com dispositivos de pressão positiva das vias respiratórias da ResMed e a configuração da máscara, caso necessário. Para obter todos os detalhes do uso correto desses dispositivos, consulte os Manuais do Usuário específicos. **Nota:** nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões.

Máscaras faciais

Dispositivo	Mirage Quattro™	Mirage Liberty™	Ultra Mirage	Facial para Uso Hospitalar
S9 AutoSet™	Facial	Facial	Facial	Facial
S9 Elite™	Facial	Facial	Facial	Facial
C-Series Tango™	Nenhuma configuração necessária. Consulte seu médico antes de mudar o tipo de máscara.			
S7 Elite	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL
S8 AutoSet Vantage™	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL
S8 Compact™	Nenhuma configuração necessária. Consulte seu médico antes de mudar o tipo de máscara.			
S8 Elite™	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL
S8 Escape™	Nenhuma configuração necessária. Consulte seu médico antes de mudar o tipo de máscara.			
S8 AutoSet™ II	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL
S8 Elite™ II	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL
S8 Escape™ II	Nenhuma configuração necessária. Consulte seu médico antes de mudar o tipo de máscara.			
VPAP™ III VPAP™ III ST-A	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL
VPAP Adapt SV™	FACIAL	FACIAL ¹	FACIAL	FACIAL
VPAP™ Auto 25	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL
VPAP Malibu™	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL
VPAP™ S VPAP™ ST	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL

¹ O SmartStop poderá não funcionar corretamente quando se estiver usando uma máscara com o VPAP Adapt SV da ResMed.

Máscaras nasais

Dispositivo	Mirage™ SoftGel	Mirage Activa™ LT	Mirage Micro™	Ultra Mirage II	Mirage Kidsta™	Mirage Activa™	Mirage Vista™	Nasal para Uso Hospitalar
S9 AutoSet™	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
S9 Elite™	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
C-Series Tango™	Nenhuma configuração necessária. Consulte seu médico antes de mudar o tipo de máscara.							
S7 Elite	STANDARD	STANDARD	STANDARD	ULTRA	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 AutoSet Vantage™	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD	ULTRA	STANDARD	ACTIVA	STANDARD	STANDARD
S8 Compact™	Nenhuma configuração necessária. Consulte seu médico antes de mudar o tipo de máscara.							
S8 Elite™	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD	ULTRA	STANDARD	ACTIVA	STANDARD	STANDARD
S8 Escape™	Nenhuma configuração necessária. Consulte seu médico antes de mudar o tipo de máscara.							
S8 Spirit™ II	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD	ULTRA	STANDARD	ACTIVA	STANDARD	STANDARD
S8 Elite™ II	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD	ULTRA	STANDARD	ACTIVA	STANDARD	STANDARD
S8 Escape™ II	Nenhuma configuração necessária. Consulte seu médico antes de mudar o tipo de máscara.							
VPAP™ III VPAP™ III ST-A	STANDARD	STANDARD	STANDARD	ULTRA	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/A
VPAP Adapt SV™	ACTIVA	ACTIVA	VISTA ¹	ULTRA	VISTA	ACTIVA	VISTA	VISTA
VPAP™ Auto 25	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD	ULTRA	STANDARD	ACTIVA	STANDARD	STANDARD
VPAP Malibu™	N/V	N/V	MERIDIAN	ULTRA	VISTA	N/A	VISTA	MERIDIAN
VPAP™ S VPAP™ ST	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD	ULTRA	STANDARD	ACTIVA	STANDARD	STANDARD

¹ O SmartStop poderá não funcionar corretamente quando se estiver usando uma máscara com o VPAP Adapt SV da ResMed.

N/A = a máscara não foi aprovada para este dispositivo.

Almofadas nasais

Dispositivo	Swift™ FX	Swift™ LT for Her	Swift™ LT	Mirage Swift™ II
S9 AutoSet™	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas
S9 Elite™	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas
C-Series Tango™	Nenhuma configuração necessária. Consulte seu médico antes de mudar o tipo de máscara.			
S7 Elite	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE
S8 AutoSet Vantage™	MIRAGE	MIRAGE	SWIFT	SWIFT
S8 Compact™	Nenhuma configuração necessária. Consulte seu médico antes de mudar o tipo de máscara.			
S8 Elite™	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 Escape™	Nenhuma configuração necessária. Consulte seu médico antes de mudar o tipo de máscara.			
S8 AutoSet™ II	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 Elite™ II	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 Escape™ II	Nenhuma configuração necessária. Consulte seu médico antes de mudar o tipo de máscara.			
VPAP™ III VPAP™ III ST-A	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE
VPAP Adapt SV™	N/A	N/A	N/A	N/A
VPAP™ Auto 25	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP Malibu™	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ S VPAP™ ST	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT

N/A = a máscara não foi aprovada para este dispositivo.