

## Lista de compatibilidad entre los equipos y las mascarillas

El presente documento indica qué mascarillas son compatibles con los equipos de presión positiva en las vías respiratorias de ResMed, así como la configuración que debe ingresarse en los equipos al utilizar cada una de ellas, si esto fuera necesario. Para obtener la información completa acerca de cómo utilizar correctamente los equipos, consulte los manuales del usuario correspondientes a cada uno de ellos. *Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones.*

### Mascarillas faciales

Equipo	Mirage Quattro™	Mirage Liberty™	Ultra Mirage	Mascarilla facial para hospital
S9 AutoSet™	Facial	Facial	Facial	Facial
S9 Elite™	Facial	Facial	Facial	Facial
Tango™ Serie C	No requiere configuración. Consulte al médico antes de utilizar un tipo de mascarilla diferente.			
S7 Elite	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL
S8 AutoSet Vantage™	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL
S8 Compact™	No requiere configuración. Consulte al médico antes de utilizar un tipo de mascarilla diferente.			
S8 Elite™	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL
S8 Escape™	No requiere configuración. Consulte al médico antes de utilizar un tipo de mascarilla diferente.			
S8 AutoSet™ II	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL
S8 Elite™ II	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL
S8 Escape™ II	No requiere configuración. Consulte al médico antes de utilizar un tipo de mascarilla diferente.			
VPAP™ III VPAP™ III ST-A	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL
VPAP Adapt SV™	FACIAL	FACIAL <sup>1</sup>	FACIAL	FACIAL
VPAP™ Auto 25	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL
VPAP Malibu™	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL
VPAP™ S VPAP™ ST	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL

<sup>1</sup> Es posible que SmartStop no funcione según se ha descrito cuando se usa la mascarilla con el VPAP Adapt SV de ResMed.

## Mascarillas nasales

Equipo	Mirage™ SoftGel	Mirage Activa™ LT	Mirage Micro™	Ultra Mirage II	Mirage Kidsta™	Mirage Activa™	Mirage Vista™	Mascarilla nasal para hospital
S9 AutoSet™	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
S9 Elite™	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
Tango™ Serie C	No requiere configuración. Consulte al médico antes de utilizar un tipo de mascarilla diferente.							
S7 Elite	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ULTRA	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR
S8 AutoSet Vantage™	ACTIVA	ACTIVA	ESTÁNDAR	ULTRA	ESTÁNDAR	ACTIVA	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR
S8 Compact™	No requiere configuración. Consulte al médico antes de utilizar un tipo de mascarilla diferente.							
S8 Elite™	ACTIVA	ACTIVA	ESTÁNDAR	ULTRA	ESTÁNDAR	ACTIVA	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR
S8 Escape™	No requiere configuración. Consulte al médico antes de utilizar un tipo de mascarilla diferente.							
S8 AutoSet™ II	ACTIVA	ACTIVA	ESTÁNDAR	ULTRA	ESTÁNDAR	ACTIVA	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR
S8 Elite™ II	ACTIVA	ACTIVA	ESTÁNDAR	ULTRA	ESTÁNDAR	ACTIVA	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR
S8 Escape™ II	No requiere configuración. Consulte al médico antes de utilizar un tipo de mascarilla diferente.							
VPAP™ III VPAP™ III ST-A	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ULTRA	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	N/V
VPAP Adapt SV™	ACTIVA	ACTIVA	VISTA <sup>1</sup>	ULTRA	VISTA	ACTIVA	VISTA	VISTA
VPAP™ Auto 25	ACTIVA	ACTIVA	ESTÁNDAR	ULTRA	ESTÁNDAR	ACTIVA	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR
VPAP Malibu™	N/V	N/V	MERIDIAN	ULTRA	VISTA	N/V	VISTA	MERIDIAN
VPAP™ S VPAP™ ST	ACTIVA	ACTIVA	ESTÁNDAR	ULTRA	ESTÁNDAR	ACTIVA	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR

<sup>1</sup> Es posible que SmartStop no funcione según se ha descrito cuando se usa la mascarilla con el VPAP Adapt SV de ResMed.

N/V = La mascarilla no ha sido validada para este equipo.

## Almohadillas nasales

Equipo	Swift™ FX	Swift™ LT for Her	Swift™ LT	Mirage Swift™ II
S9 AutoSet™	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas
S9 Elite™	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas
Tango™ Serie C	No requiere configuración. Consulte al médico antes de utilizar un tipo de mascarilla diferente.			
S7 Elite	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE
S8 AutoSet Vantage™	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 Compact™	No requiere configuración. Consulte al médico antes de utilizar un tipo de mascarilla diferente.			
S8 Elite™	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 Escape™	No requiere configuración. Consulte al médico antes de utilizar un tipo de mascarilla diferente.			
S8 AutoSet™ II	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 Elite™ II	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 Escape™ II	No requiere configuración. Consulte al médico antes de utilizar un tipo de mascarilla diferente.			
VPAP™ III VPAP™ III ST-A	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE
VPAP Adapt SV™	N/V	N/V	N/V	N/V
VPAP™ Auto 25	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP Malibu™	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ S VPAP™ ST	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT

N/V = La mascarilla no ha sido validada para este equipo.