

Guide de mise en place



- Avant de mettre le masque en place, retirez le coude du masque en appuyant sur les deux pattes d'attache latérales.



- Raccordez le coude au circuit respiratoire de l'appareil.



- Avec les deux sangles inférieures du harnais détachées, maintenez le masque sur votre visage et tirez le harnais par-dessus votre tête.



- Faites passer les sangles inférieures sous les oreilles pour fixer le harnais aux crochets inférieurs prévus à cet effet sur l'entourage rigide.



- Défaites les bandes Velcro®, tirez uniformément sur les sangles supérieures du harnais jusqu'à ce qu'elles soient bien en place, tout en étant confortables, puis rattachez les bandes Velcro.



- Répétez l'étape 5 pour les sangles inférieures du harnais.



- Fixez l'ensemble coude et circuit respiratoire au masque en appuyant sur les pattes d'attache latérales et en poussant sur l'entourage rigide.
- Mettez l'appareil en marche.

Mirage™ FX
MASQUE NASAL