

Anpassungsleitfaden



- Nehmen Sie vor dem Anlegen der Maske das Kniestück von der Maske ab, indem Sie auf die beiden seitlichen Laschen drücken.



- Verbinden Sie das Kniestück mit dem Atemschlauch des Gerätes.



- Halten Sie die Maske mit geöffneten unteren Kopfbändern an das Gesicht und ziehen Sie das Kopfband über den Kopf.



- Führen Sie nun die unteren Bänder unterhalb der Ohren entlang und schieben Sie sie über die Aufnahmen des Maskenrahmens.



- Öffnen Sie die oberen Klettverschlüsse und ziehen Sie die oberen Kopfbänder gleichmäßig an, bis sie bequem und sicher sitzen. Schließen Sie die Klettverschlüsse in der gewählten Position.



- Wiederholen Sie Schritt 5 mit den unteren Kopfbändern.



- Bringen Sie Kniestück und Atemschlauch an der Maske an, indem Sie auf die seitlichen Laschen drücken und das Kniestück in den Maskenrahmen stecken.
- Schalten Sie das Gerät ein.

Mirage™ FX
NASENMASKE