

## Größenauswahl und Anpassungsschablone


1. Drucken Sie diese Vorlage aus.
2. Schneiden Sie die Schablone entlang der gestrichelten Linie aus. Sie gibt die Größe des Nasenpolsters im Maßstab 1:1 wieder.
3. Das **Nasenpolster der Größe Large** wird als das **Standardpolster** betrachtet und ist ideal für Medium, Large und Extra Large Masken. Das Nasenpolster der Größe Small ist ideal für Masken der Größe Small, Extra Small und Petite.
4. Legen Sie die ausgeschnittene Nasenpolsterschablone auf Ihr Gesicht, um die passende Größe für Ihr Nasenpolster zu bestimmen. **Wenn Sie zwischen den Größen liegen, empfehlen wir die Größe Large.**



Generell sollten die Flügel des Nasenpolsters zwischen den Pupillen und den äußeren Augenwinkeln aufliegen (siehe oben).

Das Nasenpolster kann verschieden angewinkelt werden, um sich den individuellen Gesichtskonturen anzupassen.

**Die Auswahl der richtigen Maskengröße und die Maskenanpassung sind entscheidend für den späteren Tragekomfort.**

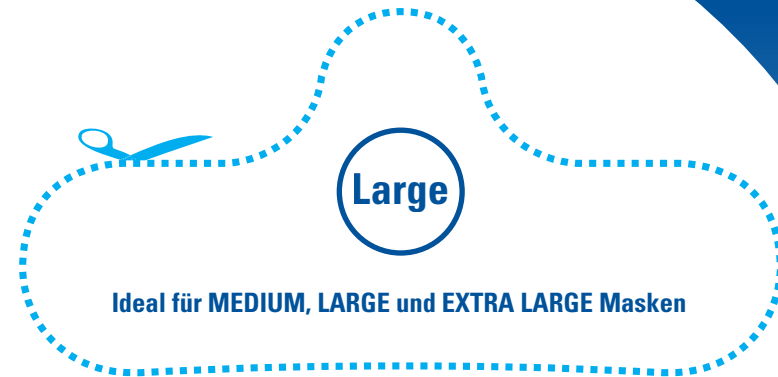

### Nasenpolster der Größe Large

Größte Breite: 10,7 cm Größte Höhe: 5,1 cm



### Nasenpolster der Größe Small

Größte Breite: 8.9 cm Größte Höhe: 3.8 cm



**Gecko™**  
NASAL PAD

© ResMed 2011 618194/1 2011-07