

## Protezione nasale: misure e istruzioni per l'uso


1. Stampare questo foglio.
2. Ritagliare le protezioni nasali con un paio di forbici seguendo la linea tratteggiata. La sagoma rispecchia le dimensioni reali.
3. **La protezione grande (Large) è considerata standard** ed è ideale per le maschere Medium, Large ed Extra Large. La protezione nasale piccola (Small) è ideale invece per le misure Small, Extra Small e Petite.
4. Posizionare le sagome ritagliate sul viso per determinare la misura corretta della protezione nasale da usare. **Se il risultato non è chiaramente a favore di una misura o dell'altra, si consiglia di optare per la Large.**



A titolo indicativo, le alette della protezione nasale dovrebbero terminare tra le pupille e gli angoli esterni degli occhi, come illustrato qui sopra.

La protezione nasale può essere facilmente regolata su diverse angolazioni per conformarsi al contorno del viso del paziente.

**Scegliere la misura corretta e seguire scrupolosamente la procedura di applicazione migliorano il comfort della maschera.**

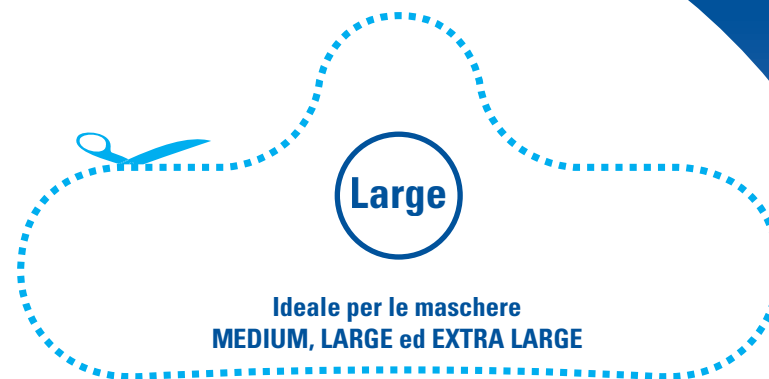

Ideale per le maschere  
**MEDIUM, LARGE ed EXTRA LARGE**

### Protezione nasale grande (Large)

Larghezza maggiore: 10,7 cm Altezza maggiore: 5,1 cm



Ideale per le maschere  
**SMALL, EXTRA SMALL e PETITE**

### Protezione nasale piccola (Small)

Larghezza maggiore: 8,9 cm Altezza maggiore: 3,8 cm



**Gecko™**  
NASAL PAD

© ResMed 2011 618196/1 2011-07