



**ResMed**

**AirCurve™ 10** CS PACEWAVE



Pulsante Home per tornare alla schermata iniziale in qualsiasi momento

Pulsante Start/Stop per avviare la terapia

Selettore per navigare tra le opzioni e modificarle

Presca d'aria per la connessione del circuito respiratorio

Guida rapida  
Italiano

Prima di utilizzare il dispositivo AirCurve™ 10 leggere interamente la relativa guida all'uso.

## Configurazione




1 Collocare il dispositivo su una superficie piana e stabile.



2 Collegare il connettore di alimentazione sul retro del dispositivo. Collegare una estremità del cavo di alimentazione nell'alimentatore e l'altra estremità nella presa di corrente.



3 Collegare saldamente il circuito respiratorio all'uscita dell'aria ubicata sul retro del dispositivo.

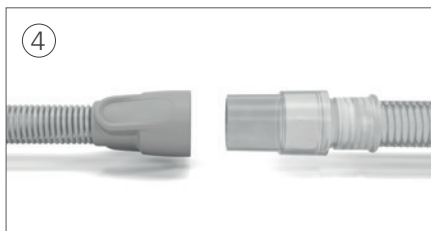

4 Collegare saldamente l'estremità libera del circuito respiratorio alla maschera assemblata. Premere Start/Stop per avviare la terapia.

## AirCurve 10 con HumidAir

Se si utilizza un dispositivo AirCurve 10 con HumidAir™, riempire l'umidificatore come di seguito indicato:



1 Aprire l'umidificatore e riempirlo di acqua fino alla tacca indicante il livello massimo dell'acqua.



2 Chiudere l'umidificatore e introdurlo lateralmente al dispositivo.

L'umidificazione riscaldata offre sollievo da secchezza e congestione ed è stata progettata per rendere la terapia più confortevole. Se state utilizzando AirCurve 10 senza HumidAir, prendete in considerazione l'acquisto di HumidAir e di un circuito respiratorio riscaldata ClimateLineAir™.

## Adattarsi alla terapia


Chi utilizza il dispositivo per la prima volta potrebbe avere bisogno di tempo per abituarsi alla terapia. Non è un fatto insolito dal momento che per la maggior parte dei pazienti sono necessarie da una a due settimane per adattarsi alla pressione dell'aria.

### Come superare i sintomi modificando le impostazioni di comfort


Se avete di difficoltà ad abituarvi alla terapia, utilizzare le funzioni di comfort del dispositivo AirCurve 10 per facilitare il percorso per un sonno migliore.

- **Difficoltà ad addormentarsi**— se si ha difficoltà ad addormentarsi con l'alta pressione, attivare la Rampa o aumentare il valore T. rampa.
- **Senso di pienezza**— se si avverte un leggero senso di pienezza dato dall'ingestione di aria, attivare la Rampa o aumentare il valore T. rampa.
- **Sensazione di non ricevere aria a sufficienza**—Quando si avverte la sensazione di non ricevere sufficiente aria, disattivare il parametro T. rampa.


Per modificare il parametro T. rampa:

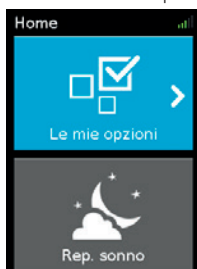


1. Premere il selettore per inserire Le mie opzioni.

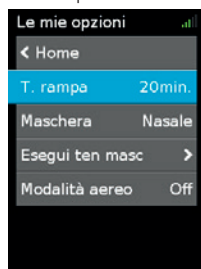

2. Ruotare il selettore per evidenziare T. rampa, quindi premere per selezionare.

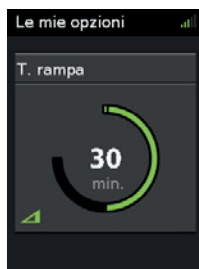

3. Ruotare il selettore per regolare l'impostazione desiderata.

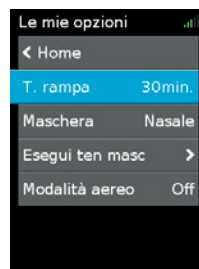

4. Premere il selettore per salvare la modifica.

Il dispositivo AirCurve 10 con HumidAir dispone di un maggior numero di funzioni di comfort che rendono la terapia più confortevole.

- **Naso secco o che cola** – In caso di naso secco o che cola, aumentare l'impostazione Livello Umidità.
- **Goccioline d'acqua (condensa)** – Se si formano goccioline d'acqua sul naso, sulla maschera o nel circuito respiratorio, diminuire l'impostazione Livello Umidità.



# ResMed

## Pulizia

1. Lavare il circuito respiratorio in acqua tiepida usando un detergente delicato. Non lavarli in lavatrice o lavastoviglie.
2. Sciacquare bene il circuito respiratorio e lasciarlo asciugare al riparo dalla luce diretta del sole e/o da fonti di calore.
3. Pulire l'esterno del dispositivo con un panno asciutto.

Se si utilizza un dispositivo AirCurve 10 con HumidAir, pulire l'umidificatore come indicato ai punti 1 e 2.

Per istruzioni dettagliate relative alla pulizia della maschera, consultare la guida all'uso della maschera.

## Controllo e sostituzione periodica dei componenti

Per il vostro confort e per il vostro benessere è necessario controllare e sostituire periodicamente parti e componenti del dispositivo. La sostituzione periodica di parti e componenti garantisce una terapia ottimale e un confort prolungato.

Per istruzioni dettagliate sui controlli da effettuare, consultare la guida all'uso del dispositivo AirCurve 10. Contattare il proprio fornitore di dispositivi medicali per ricevere informazioni relative alla tempistica delle sostituzioni.

Numero di serie	Numero dell'apparecchio
Tipo e misura della maschera	Data di configurazione
Note	



**ResMed Ltd**

1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia

VEDERE [www.resmed.com](http://www.resmed.com) PER LE ALTRI SEDI ResMed INTERNAZIONALI. AirCurve, ClimateLine, e HumidAir SONO MARCHI DI FABBRICA DI ResMed Ltd. ClimateLine è registrato presso l'ufficio marchi e brevetti statunitense. Per informazioni sui brevetti, visitare il sito [www.resmed.com/ip](http://www.resmed.com/ip). © 2017 ResMed Ltd. 378376/2 2017-10

**CE** 0123



378376

**ResMed.com**