


## Komponentenkarte

Deutsch

**Komplettmaske**  
inkl. beider Kopfbandoptionen

**XS** Extra Small\*  
**S** Small  
**M** Medium } **61569**  
**L** Large

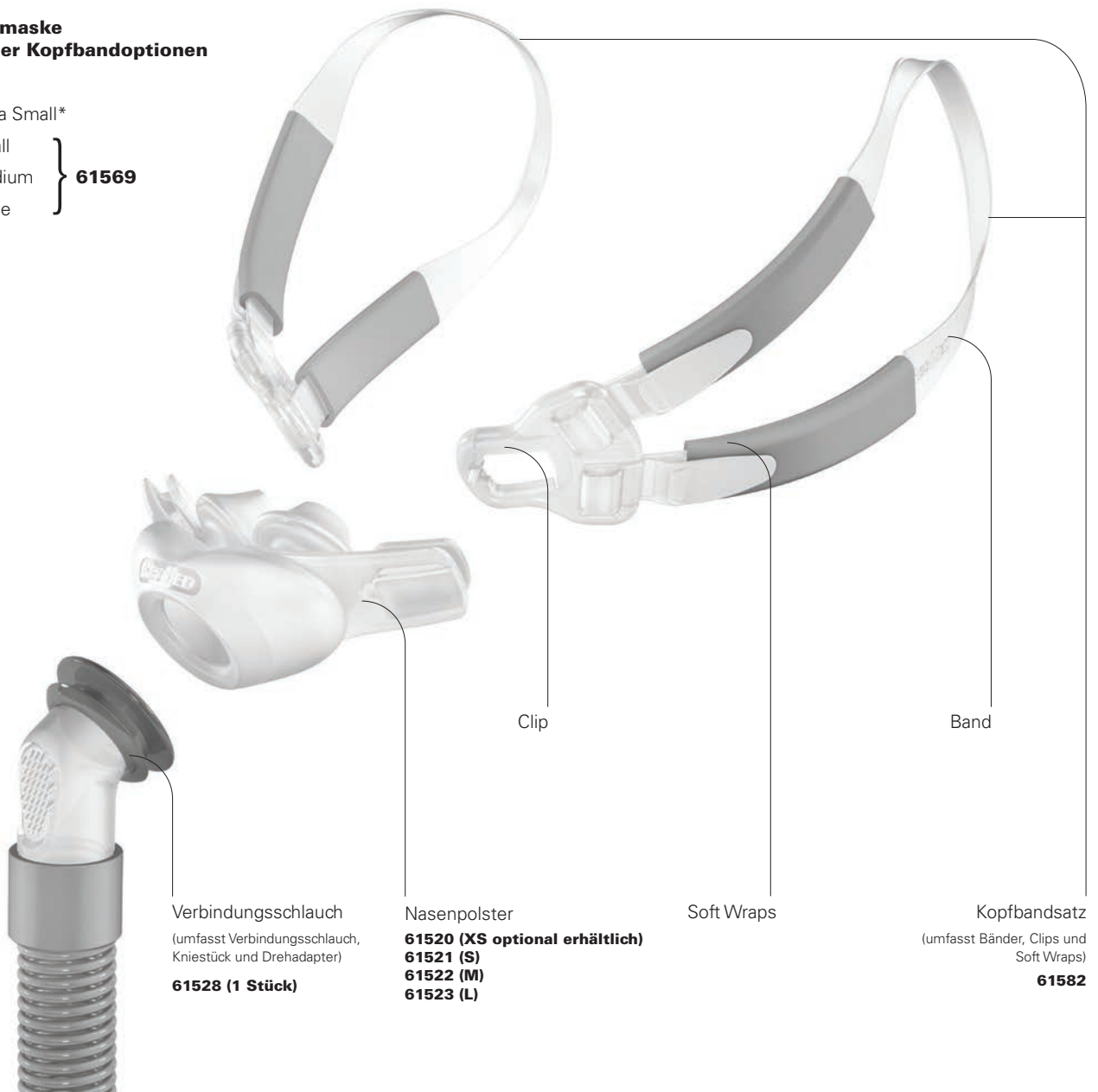

## Artikelnummern

Swift FX Bella Gray Maskensystem *	<b>61569</b>
Swift FX Bella Gray Kopfband	<b>61582</b>
Swift FX Bella Gray / Swift FX Kopfbandkombination	<b>61583</b>


\* Im Lieferumfang der Swift FX Bella Gray ist zusätzlich das Swift FX Kopfband enthalten.  
Die Nasenpolster sind mit beiden Kopfbandoptionen verwendbar.  
Nasenpolster in Größe XS (Extra Small) sind separat erhältlich.

**Swift™ FX Bella Gray**  
NASENPOLSTERMASKE

## Anpassungsleitfaden



- Halten Sie die Nasenpolster so an Ihre Nase, dass das ResMed-Logo nach oben zeigt. Führen Sie eines der Bänder um Ihr Ohr herum.

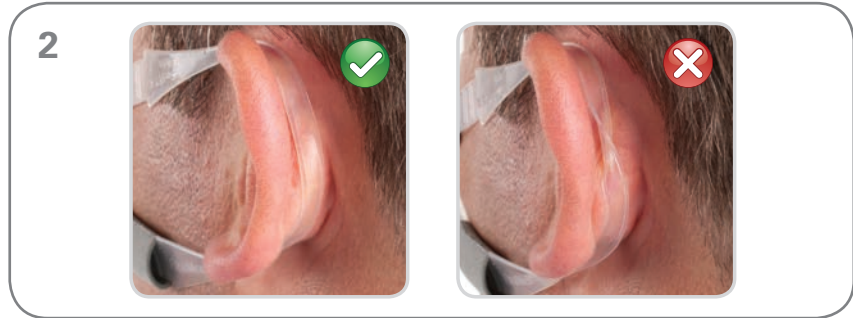

- Vergewissern Sie sich, dass das Band flach und bequem hinter dem Ohr anliegt. Achten Sie darauf, das Band nicht zu verdrehen.



- Verfahren Sie genauso mit dem anderen Band.



- Verbessern Sie den Maskensitz, indem Sie die beiden oberen Bänder gleichzeitig entlang der Kerben ziehen, bis sie bequem sitzen.



- Verfahren Sie genauso mit den unteren Bändern der Maske. Nicht zu stramm anziehen.



- Stellen Sie sicher, dass die Nasenpolster aufrecht am Naseneingang sitzen, und schließen Sie dann das freie Ende des Verbindungsschlauches an den Atemschlauch des Gerätes an. Schalten Sie das Gerät ein.

### Optional



Sie haben darüber hinaus die Möglichkeit, das Swift FX Kopfband zu nutzen, das im Lieferumfang enthalten ist. Für weitere Informationen besuchen Sie [www.resmed.de](http://www.resmed.de)

**Swift™ FX Bella Gray**  
 NASENPOLSTERMASKE

Vertrieb durch: ResMed Deutschland GmbH · Haferswende 40 · 28357 Bremen · Tel. 0421 48993-0 · Fax 0421 48993-10 · E-Mail [info@resmed-deutschland.de](mailto:info@resmed-deutschland.de)

Vertrieb durch: ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA. [CE/REP] ResMed (UK) Ltd 96 Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RY UK. Informationen zu weltweiten Geschäftsstellen von ResMed finden Sie auf unserer Website unter [www.resmed.com](http://www.resmed.com). Swift ist eine Marke der ResMed Ltd und ist beim Patent- und Markenamt in den USA registriert. © 2012 ResMed Ltd. Die technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. 1015280/1 2012-02