

Swift™ FX Nano - Anpassungsleitfaden



- Halten Sie das Maskenkissen so, dass der untere Rand der Öffnung unten an der Nase anliegt, und setzen Sie dann die Maske über die Nase.
 - Ziehen Sie jetzt das Kopfband über den Kopf. Es sollte zwischen Ohren und Augen verlaufen.



- Stellen Sie zuerst das obere Kopfband ein.
 - Ziehen Sie Raster für Raster.
 - Nicht zu fest anziehen.



- Passen Sie das hintere Kopfband zur Feineinstellung an.
 - Nicht zu fest anziehen.
 - Befestigen Sie die beiden Verschlüsse gleichzeitig auf dem hinteren Kopfband.



- Das hintere Kopfband kann oberhalb oder unterhalb der Haare verlaufen.



- Richten Sie das Maskenkissen so aus, dass es bequem auf der Nase sitzt.
 - Schließen Sie das freie Ende des Verbindungsschlauches an den Atemschlauch des Geräts an. Schalten Sie dann das Gerät ein.



- Überprüfen Sie die Maske auf Leckagen und korrigieren Sie den Sitz nach Bedarf. Wenn Luft entweicht, passen Sie zuerst das hintere Kopfband und dann das obere Kopfband neu an.
 - Die Maske ist jetzt einsatzbereit.


Optionale Komfortpolster



- Legen Sie die Komfortpolster auf beiden Seiten um das Kopfband. Befestigen Sie dabei das von oben kommende Verschlussband auf dem unteren.
- Die Komfortpolster sollten auf den Wangenknochen aufliegen. Achten Sie darauf, dass der Verschluss nach außen weist.

Swift™ FX Nano - Komponentenkarte

Deutsch

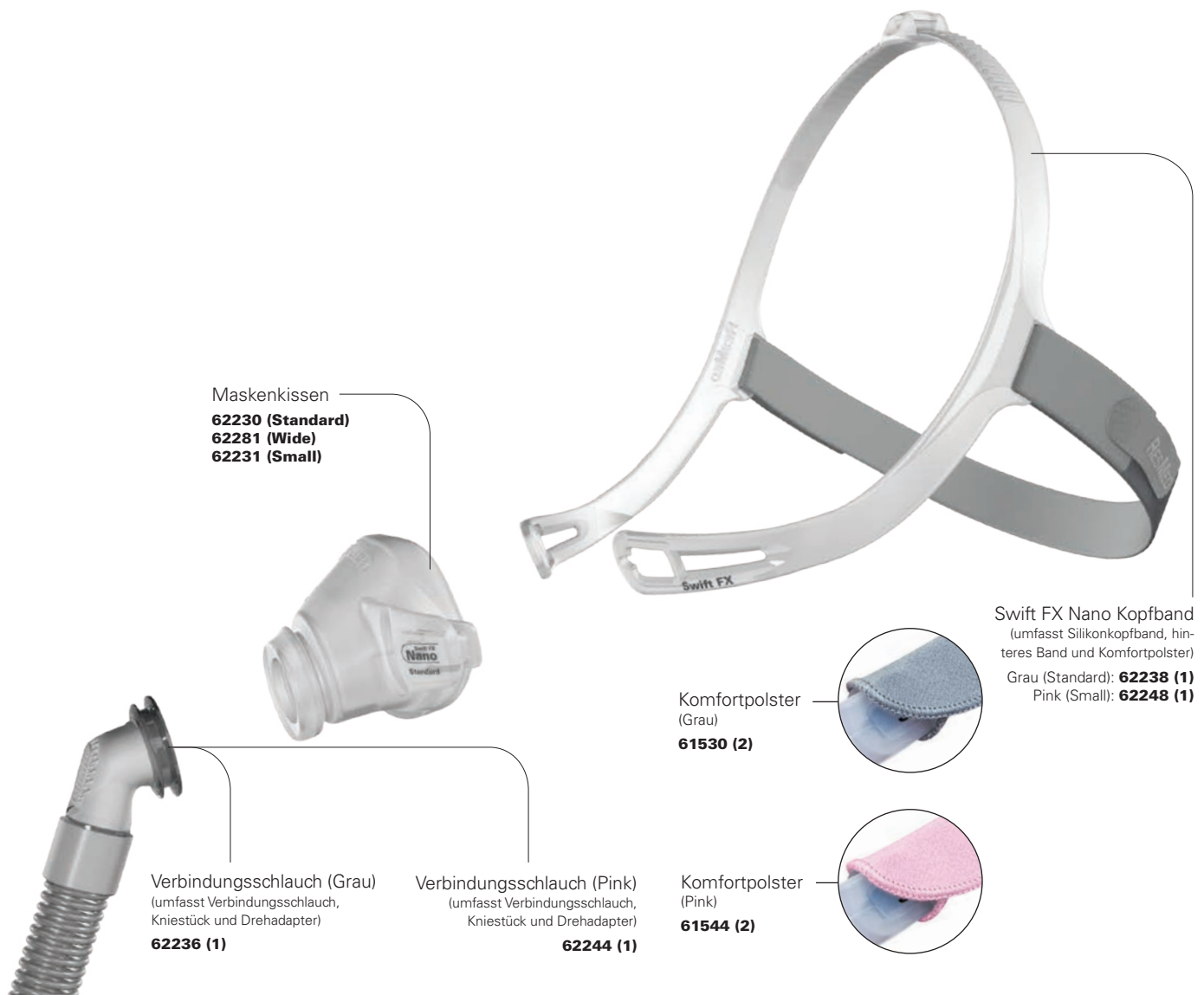

Artikelnummern

| | |
|---|--------------|
| Swift FX Nano for Her Maskensystem* (Small) | 62203 |
| Swift FX Nano Maskensystem** (Standard) | 62202 |
| Swift FX Nano Maskensystem** (Wide) | 62253 |

* Umfasst Maskenkissen (Small), Schlauch und Kniestück (pink) und Swift FX Nano for Her Kopfbandsatz (pink).

** Umfasst Maskenkissen (Standard oder Wide), Schlauch und Kniestück (grau) und Swift FX Nano Kopfbandsatz (grau).

Swift™ FX Nano
Swift™ FX Nano for Her
 NASENMASKE