

## Ultra Mirage™ II Nasenmaske




### Das Allround-System

Die Ultra Mirage™ II Nasenmaske von ResMed ist für die meisten Patienten geeignet, die sich einer Therapie mit positivem Atemwegsdruck mit CPAP-, Bilevel- oder AutoSet™ Geräten von ResMed unterziehen.

Da die Maskenkissen der Ultra Mirage II in vier Größen erhältlich sind (Standard, Large, Shallow und Shallow-wide), passt die Maske den meisten Patienten — beim ersten Mal und jedes Mal wieder.


Die Ultra Mirage II setzt fortwährend den Maßstab für Nasenmasken, wenn es um guten Sitz, Komfort und Geräuscharmheit geht — wichtige Eigenschaften für eine wirksame Behandlung.

Sie verfügt über die bekannte doppelwandige Mirage Maskenkissenteknologie von ResMed und das einzigartige Luftauslassdesign, das für einen ultra-leisen Betrieb sorgt.

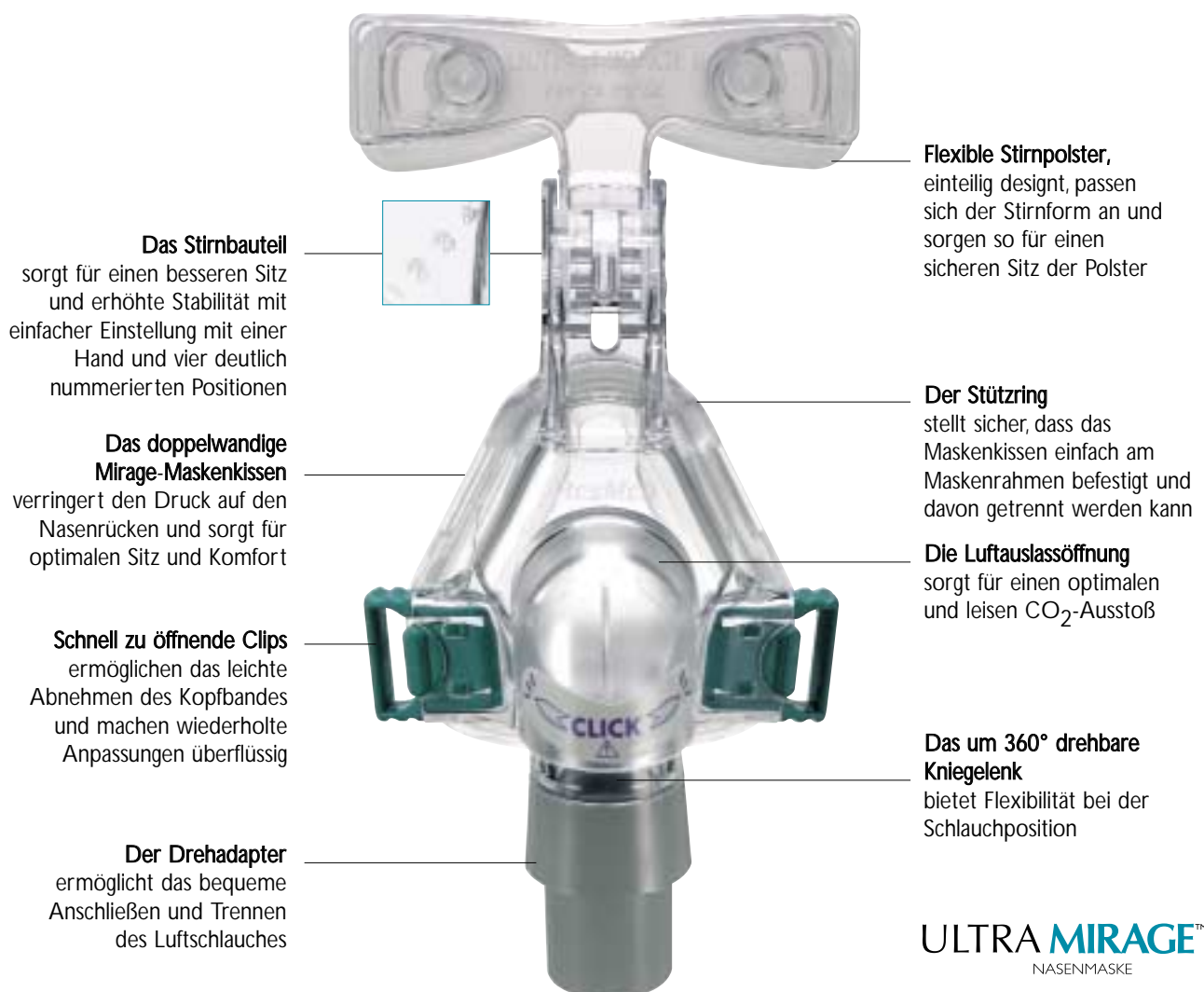

## Ein technisches Highlight — der einzigartige Luftauslass

- Das einzigartige Design der Luftauslassöffnung minimiert die Luftflussintensität und die Geräuschentwicklung.
- Die Luft aus der Auslassöffnung wird entlang des Luftschlauches abgeleitet und stört somit weder den Nutzer noch dessen Bettpartner.
- Der Luftauslass wurde speziell entwickelt, um einen angemessenen Fluss des exhalieren CO<sub>2</sub> aus der Maske heraus zu gewährleisten.

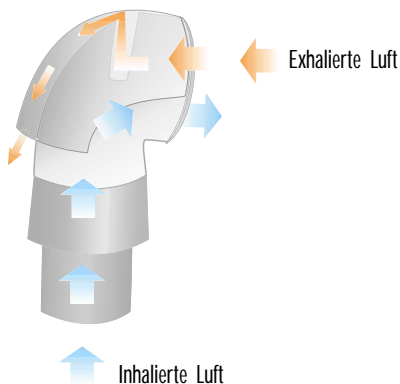

### Einstellbares Stirnbauteil

- Bietet eine zusätzliche Abstützung, insbesondere bei Patienten, die mit höherem Druck bzw. mit der Bilevel-Therapie behandelt werden.
- Bietet vier nummerierte Positionen und sorgt damit für einen besseren Sitz und höchste Stabilität.

### Drehadapter

- Ermöglicht das einfache Anschließen und Trennen des Luftschlauches, ohne dass die Maske abgenommen werden muss.
- Gibt dem Patienten mehr Bewegungsfreiheit.

### Drehbares Kniegelenk

- Das um 360° drehbare Kniegelenk gibt Patienten die Wahl der Schlauchposition und somit höchstmöglichen Komfort.

### Sicheres und bequemes Kopfband

- Die Kopfbandclips ermöglichen ein schnelles Öffnen und Schließen des Kopfbandes und machen ein wiederholtes Einstellen überflüssig.
- Die Vierpunktverbindung zum Maskenrahmen sorgt für mehr Stabilität.

### Schnelles Anpassen

- Die Maske wird vollständig zusammengebaut mit Kopfband geliefert.
- Bei der ersten Anpassung ist lediglich die Einstellung des Stirnbauteils und des Kopfbandes erforderlich.

## Das Ultra Mirage II Nasenmaskensystem

### Artikelnummern

Nord- und Südamerika		Europa (außer GB) und Asien	
Standard	16548	Standard	16545
Large	16549	Large	16546
Shallow	16550	Shallow	16547
Shallow-wide	16577	Shallow-wide	16578
GB		Australien & Neuseeland	
Standard	16321	Standard	16579
Large	16322	Large	16580
Shallow	16323	Shallow	16581
Shallow-wide	16324	Shallow-wide	16582



Verstellbares Stirnbauteil — vier deutlich nummerierte Positionen



Drehbares Kniestück — Flexibilität bei der Luftschlauchposition