



كيفية تنظيف الكوع الخاص بقناعك؟

- ٤ اغسل الكوع بعناية تحت الماء الجاري.
- ٥ اترك الكوع ليجف في الهواء دون تعريضه إلى أشعة الشمس المباشرة.

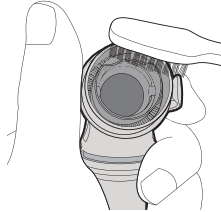


إذا لم يبدو الكوع نظيفًا، فقم بتكرار خطوات التنظيف.

- ٣ قم برجّ الكوع بقوة في الماء لمدة دقيقة واحدة على الأقل واغسله يدويًا بفرشاة ذات شعر ناعم. انتبه بشكل خاص إلى جميع مواضع التوصيل وفتحات وصلة الهواء الخاصة بالكوع وصماماته.

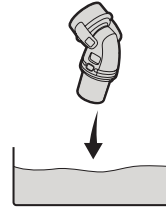

- ٢ اغمر الكوع في ماء دافئ (في درجة حرارة ما بين ٣٠ درجة مئوية / ٨٦ درجة فهرنهايت) مع منظف سائل خفيف لفترة تصل إلى عشر دقائق.

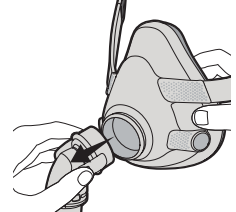

- ١ لفك الكوع من القناع، اضغط الزرين الجانبيين الموجودين على الكوع وافصله عن الإطار.

تنبيه: من المهم أن تكون وصلة الهواء جافة قبل الاستعمال.

ما المعدل الزمني لتنظيف وصلة الهواء؟

نوصيك بتنظيف وصلة الهواء يوميًا بعد كل استعمال.
ملاحظة: ينبغي أيضًا أن يتم تنظيف بقية القناع (المصد والإطار) يوميًا.
ينبغي تنظيف أحزمة التثبيت في الرأس مرة في الأسبوع.

ماذا يحدث لو لم أقم بتنظيف الكوع؟

التزم بتنظيف القناع ومكوناته بشكل منتظم للحفاظ على جودة القناع الذي تقننيه وللوقاية من نمو الجراثيم التي قد تضر بصحتك.

ما الذي ينبغي علي القيام به إذا بدت وصلة الهواء تالفة؟

اتصل بمختص تقديم الرعاية المنزلية الذي تتعامل معه، فقد يلزم استبدال وصلة الهواء.



اتبع إرشادات التنظيف الموضحة في دليل المستخدم. تتوفر مقاطع فيديو تعليمية يسهل اتباعها على صفحة دعم القناع على [ResMed.com](https://www.ResMed.com).