

Sovitusohje

Ennen kuin aloitat maskin sovittamisen, ota pois joustavan runko-osan oranssi tuki maskin takaa ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.



- Anna pääremmien molempien alempien kiinnikkeiden olla auki ja aseta pehmike kallelleen nenänvartta vasten.



- Pidä maskin yläosaa paikallaan ja heilauta sen alaosa alas kasvoja vasten.



- Pidä maskia tukevasti kasvoja vasten ja vedä pääremmit pään yli.



- Sijoita alemmat hihnat korvien alapuolelle ja kiinnitä pääremmit joustavan runko-osan alaosaan.



- Avaa Velcro®-tarrakiinnikkeet ja vedä pääremmien ylempiä hihnoja tasaisesti, kunnes ne istuvat mukavasti ja tukevasti, ja kiinnitä sitten tarrakiinnikkeet.



- Toista vaihe 5 pääremmien alemmille hihnoille.



- Liitä ilmaletkun toinen pää pyörivään liittimeen ja toinen pää hengityslaitteeseen.
- Laita hengityslaitte päälle.

Vihje 1



- Varmista, että pääremmit on sijoitettu oikein pään ympärille.

Vihje 2



- Varmista, että maski istuu nenänvarren keskikohdassa ja ettei se ole silmien tiellä.

Quattro™ FX
FULL FACE MASK

www.quattrofx.com