

## Oikean koon valitseminen ja sovittaminen

1. Tulosta tämä paperiarkki.
2. Leikkaa pehmiketyynyjen kuvat saksilla katkoviivoja pitkin. Ääriviivat vastaavat pehmiketyynyn todellista kokoa.
3. **Large-pehmiketyyny on tavallisin vaihtoehto** ja se sopii käytettäväksi Medium-, Large- ja Extra large -maskin kanssa. Small-pehmiketyyny sopii käytettäväksi Small-, Extra small - ja Petite-maskin kanssa.
4. Aseta paperista leikkaamasi mallit kasvoillesi nähdäksesi, mikä kokoista pehmiketyynyä sinun tulisi käyttää. **Jos sopiva koko tuntuisi olevan jotain niiden väliltä, on suositeltavaa valita Large-pehmiketyyny.**



Yleisenä ohjeena voidaan pitää, että pehmiketyynyn päiden tulisi ulottua pupillien ja silmien ulkonurkkien välille, kuten kuvassa on esitetty.

Pehmiketyyny on helppo sijoittaa eri kulmiin kunkin käyttäjän kasvonpiirteiden mukaan.

**Maskin mukavuutta voidaan parantaa valitsemalla oikea koko ja säätämällä pehmiketyyny sopivaksi.**



### Large-pehmiketyyny

Leveys enimmillään: 10,7 cm Korkeus enimmillään: 5,1 cm



### Small-pehmiketyyny

Leveys enimmillään: 8,9 cm Korkeus enimmillään: 3,8 cm



**Gecko™**  
NASAL PAD

© ResMed 2011 618200/1 2011-07