

Mirage™ SoftGel

MASQUE NASAL

Guide de mise en place



1

- Mettez la molette de réglage MicroFit sur la position 24 de façon à ouvrir complètement le support frontal.



2

- Déconnectez le clip inférieur du harnais, maintenez le masque en position sur le nez et faites passer le harnais par-dessus la tête.



3

- Reconnectez le clip inférieur du harnais en veillant à ce qu'il s'emboîte correctement.



4

- Ajustez les sangles supérieures de façon égale. Ne serrez pas trop fort.



5

- Ajustez les sangles inférieures pour votre confort. Ne serrez pas trop fort.



6

- Connectez une extrémité du circuit respiratoire à la pièce pivotante et l'autre extrémité à l'appareil.
- Mettez l'appareil en marche.



ASTUCE

- Ajustez la molette de réglage pour arrêter toute fuite au niveau du nez.



ASTUCE

- Ajustez les sangles inférieures pour arrêter toute fuite au niveau de la lèvre supérieure.