

## Mirage™ SoftGel

NASENMASKE

### Anleitung zur Anpassung



1

- Stellen Sie den MicroFit-Regler auf Position 24 ein, bei der die Stirnstütze ganz herausgezogen ist.



2

- Öffnen Sie den unteren Kopfband-Clip, halten Sie die Maske über die Nase und ziehen Sie das Kopfband über den Kopf.



3

- Bringen Sie den unteren Kopfband-Clip an und stellen Sie sicher, dass er einrastet.



4

- Ziehen Sie die oberen Bänder gleichmässig an. Ziehen Sie sie nicht zu fest.



5

- Ziehen Sie an den unteren Bänder, bis die Maske bequem sitzt. Ebenfalls nicht zu fest anziehen.



6

- Schliessen Sie das eine Ende des Atemschlauches am Drehadapter und das andere Ende am Atemtherapiegerät an.
- Schalten Sie das Gerät ein.



TIPP

- Verstellen Sie den Regler, um Leckagen an der Nase zu verhindern.



TIPP

- Ziehen Sie die unteren Bänder etwas nach, um Leckagen an der Oberlippe zu verhindern.