



Masque Mirage Vista™

MISE EN PLACE

Mise en place du masque Mirage Vista

- ▶ Tenez l'entourage rigide avec la marque  sur le haut. Fixez le harnais à l'entourage rigide d'un côté à l'aide d'un des clips du harnais.
- ▶ Placez le harnais sur votre tête, les sangles inférieures passant sous vos oreilles.



1 Maintenez l'entourage rigide sur le nez et attachez l'autre clip.



2 Serrez les sangles latérales simultanément à l'arrière de la tête pour ajuster le masque de manière confortable, sans trop serrer.



3 Serrez uniformément les sangles supérieures une après l'autre.



4 Placez la boucle transversale sur le dessus de votre tête : les stabilisateurs latéraux doivent reposer à plat de chaque côté du visage.



5 Fixez le coude cliquable au masque avec le générateur d'air en marche.



6 Réglez l'inclinaison à l'aide du sélecteur d'angle en appuyant sur la languette et en plaçant le sélecteur d'abord dans la position du milieu (5 positions sont possibles).

Ajustez chaque côté vers le haut ou vers le bas : Le masque doit être confortable. Il ne doit pas ou peu fuir.

AVANT la mise en place

- ▶ Veuillez utiliser le gabarit pour le choix de la bonne taille de bulle - standard ou profonde.
- ▶ La bulle ne doit pas exercer de pression sur l'arête du nez (elle devrait reposer au milieu du nez).
- ▶ Vérifiez que la bulle ne gêne pas l'ouverture des narines. Vérifiez également que le bord en silicone de la bulle n'est pas trop étiré au niveau de l'arête du nez et des narines.
- ▶ Détachez le coude cliquable de l'entourage rigide et fixez le tuyau à air court au circuit respiratoire du générateur d'air.