



## Mirage Vista™ Maske

### ANLEITUNG ZUM ANLEGEN DER MASKE

#### Anpassen der Mirage Vista Maske

- ▶ Halten Sie den Maskenhalter mit dem **◆** nach oben (die Anschlüsse zur Sauerstoffgabe und Druckabnahme zeigen dann nach unten).
- ▶ Ziehen Sie das Kopfband über den Kopf. Die unteren Seitenbänder sollten unter den Ohren verlaufen.



**1** Drücken Sie den Maskenhalter leicht auf die Nase und schließen Sie den Kopfbandclip auf der anderen Seite.



**2** Ziehen Sie die beide Seitenbänder am Hinterkopf gleichzeitig an, bis sie bequem und nicht zu stramm sitzen.



**3** Ziehen Sie die oberen Bänder nacheinander gleichmäßig an.



**4** Positionieren Sie die Kreuzschnalle auf dem Kopf, so dass die seitlichen Stabilisierungskomponenten flach an den Schläfen anliegen.



**5** Befestigen Sie den Easy Lock Schlauchanschluss bei laufendem Luftstromgenerator an der Maske.



**6** Stellen Sie den Neigungswinkel des Maskenhalters durch Herunterdrücken der Lasche ein. Beginnen Sie mit der Mittelstellung (5 Winkeleinstellungen möglich). Stellen Sie die Winkel auf beiden Seiten so ein, dass die Maske bequem sitzt und nur eine minimale bzw. keine Leckagen aufweist.

Treten weiterhin Leckagen auf, versuchen Sie eine andere Maskeneinsatzgröße oder verstellen Sie nochmals die Kopfbänder.

#### VOR dem Anlegen der Maske

- ▶ Wählen Sie die richtige Maskeneinsatzgröße (Standard oder Tief) aus.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass der Maskeneinsatz mit der Nasenwurzel abschließt (sollte auf dem Nasenrücken aufliegen). Vergewissern Sie sich, dass die Nasenlöcher frei bleiben. Stellen Sie sicher, dass die Silikonmembran des Maskeneinsatzes am Nasenrücken und um die Nasenlöcher nicht zu stramm sitzt.
- ▶ Nehmen Sie den Easy Lock Schlauchanschluss vom Maskenhalter ab und schließen Sie den kurzen Schlauch an den Luftstromgenerator – schlauch an.