

ResMed

Pour un positionnement optimal de la bulle :

Les masques Quattro Air et Quattro FX se positionnent plus bas sur l'arête nasale que le masque Mirage Quattro. Cela diminue les points de pression sur la zone fragile de l'arête nasale et dégage le champ de vision.



Mirage Quattro se positionne dans le creux supérieur du nez.




Quattro Air se positionne plus bas sur l'arête nasale que le Mirage Quattro.



Quattro FX se positionne plus bas que les autres masques faciaux ResMed, juste sous le niveau des yeux.

Les images ci-dessus sont approximatives et montrent le positionnement des masques pour la plupart des patients. Elles ne doivent servir que de guide. Pour des instructions de mise en place complètes, merci de vous référer au guide d'utilisateur.

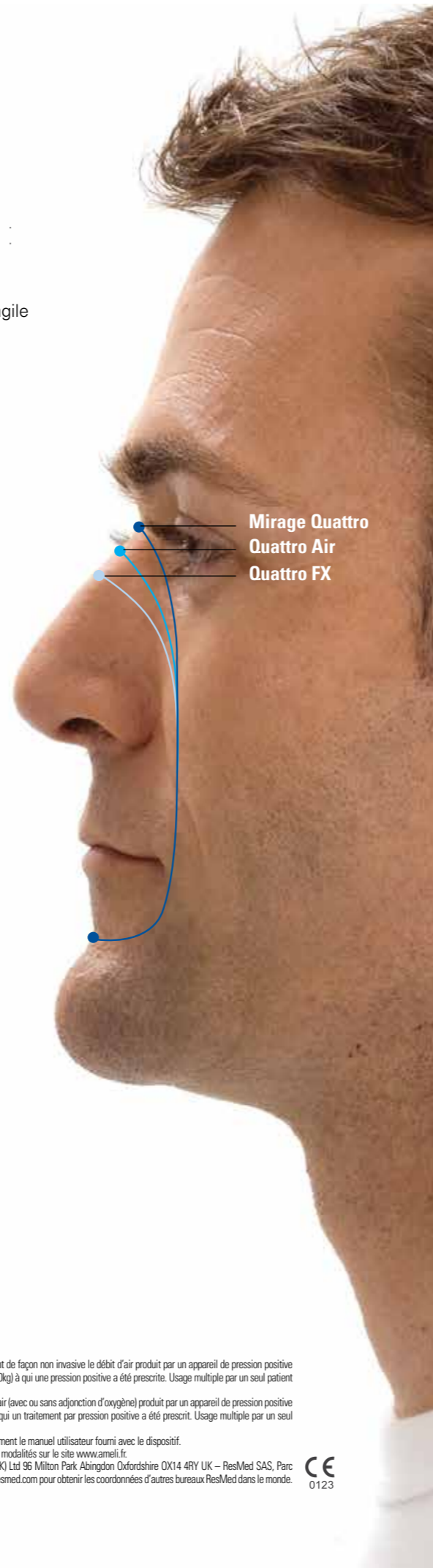


Mirage Quattro
Quattro Air
Quattro FX



ResMed

Quattro™ Air

Conseils de mise en place

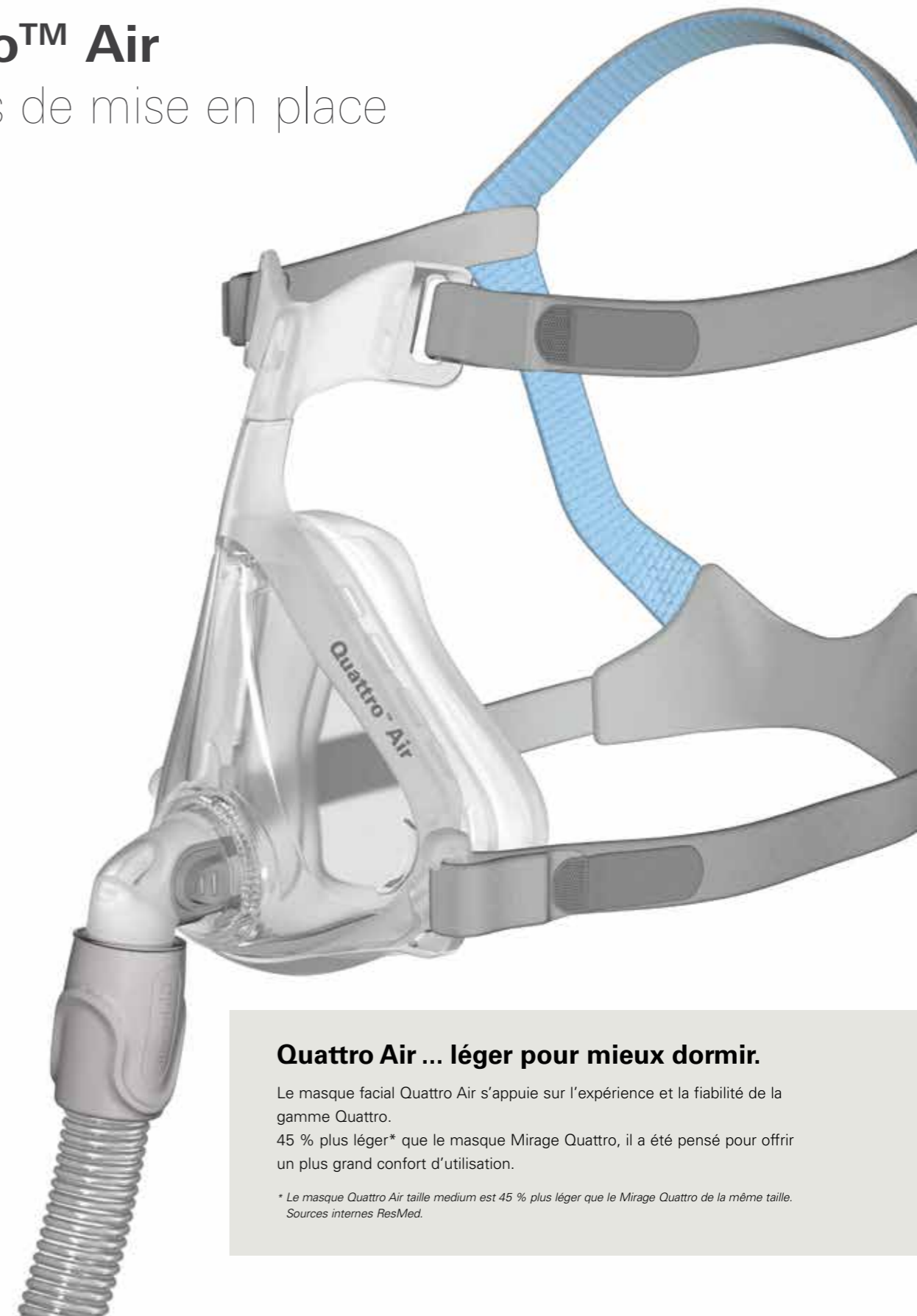

Quattro Air ... léger pour mieux dormir.

Le masque facial Quattro Air s'appuie sur l'expérience et la fiabilité de la gamme Quattro. 45 % plus léger* que le masque Mirage Quattro, il a été pensé pour offrir un plus grand confort d'utilisation.

* Le masque Quattro Air taille medium est 45 % plus léger que le Mirage Quattro de la même taille. Sources internes ResMed.

ResMed Ltd
1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153 Australia


ResMed.com

Dénomination : Quattro™ FX / Mirage™ Quattro - **Indications :** Masques faciaux destinés à acheminer au patient de façon non invasive le débit d'air produit par un appareil de pression positive continue (PPC) ou d'aide inspiratoire avec PEP (pression expiratoire positive). Utilisation par des patients adultes (> 30kg) à qui une pression positive a été prescrite. Usage multiple par un seul patient à domicile ou usage multiple par plusieurs patients en milieu hospitalier.
Dénomination : Quattro™ AIR - **Indications :** Masque facial non invasif destiné à acheminer au patient le débit d'air (avec ou sans adjonction d'oxygène) produit par un appareil de pression positive continue (PPC) ou d'aide inspiratoire avec PEP (pression expiratoire positive). Utilisation par des patients (>30kg) à qui un traitement par pression positive a été prescrite. Usage multiple par un seul patient à domicile ou usage multiple par plusieurs patients en milieu hospitalier.
Dispositifs médicaux de classe : IIa. **Evaluation de la conformité par :** TÜV0123. **Bon usage :** Lire attentivement le manuel utilisateur fourni avec le dispositif.
Remboursement : Pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans certaines situations : consultez les modalités sur le site www.ameli.fr.
Distribué par : ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA - **CE/RECEP** ResMed (UK) Ltd 96 Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RY UK - ResMed SAS, Parc Technologique de Lyon, 292 allée Jacques Monod, 69791 Saint Priest Cedex, France. Veuillez consulter le site www.resmed.com pour obtenir les coordonnées d'autres bureaux ResMed dans le monde.
© 2014 ResMed Ltd. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans notification préalable. 1017096/1 2014-02



Quelques conseils pour bien choisir la taille du Quattro Air

Afin de choisir la taille la plus adaptée, utilisez le gabarit du Quattro Air comme guide. Positionnez la partie inférieure du gabarit sur le creux du menton du patient. Alignez la partie supérieure avec le coin de l'oeil de votre patient. La taille adaptée est celle indiquée sur le gabarit, comme indiqué sur le schéma ci-dessous.

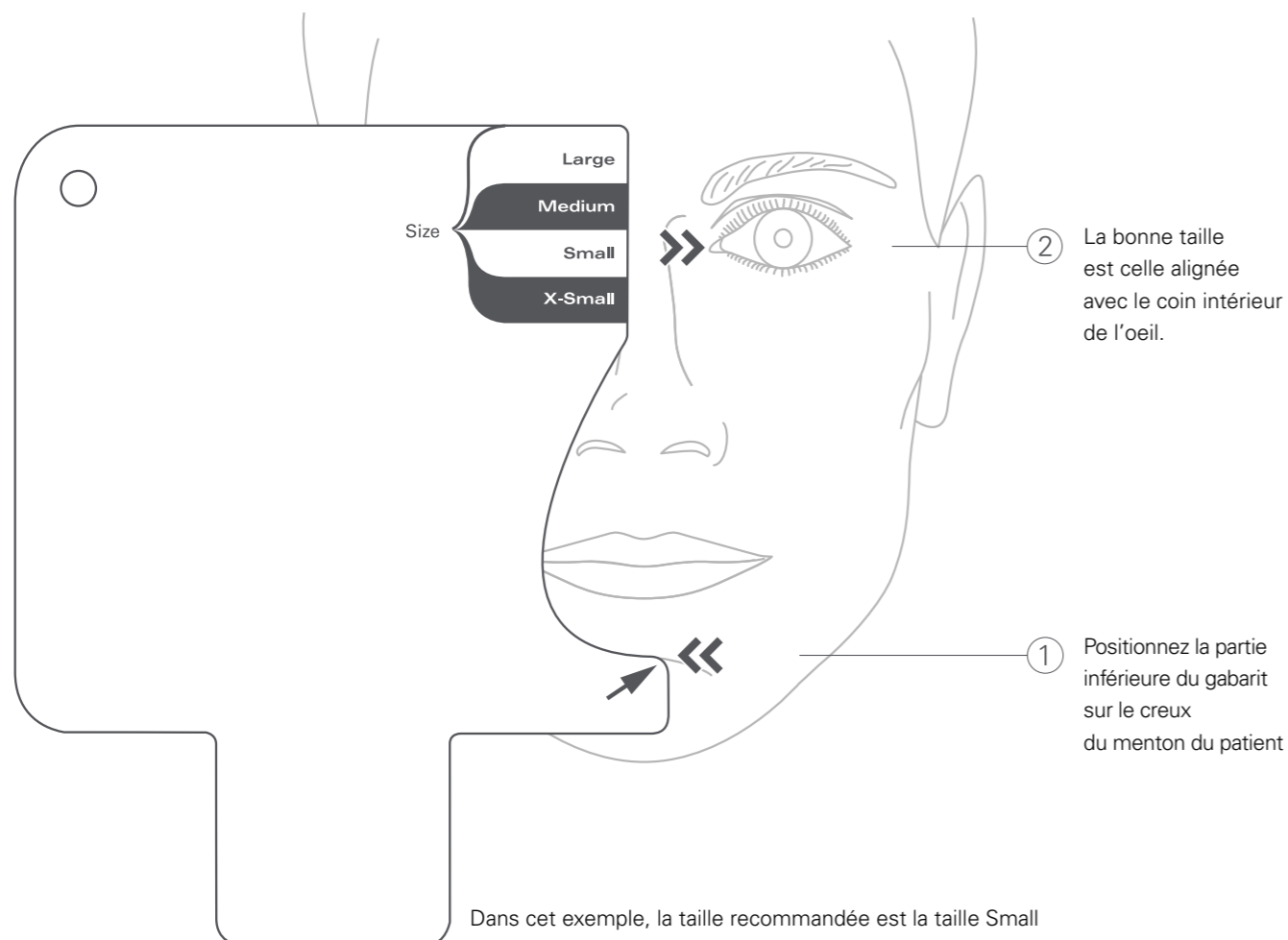

Guide de mise en place du Quattro™ Air



- Avant de mettre le masque en place, retirez le coude du masque en appuyant sur les boutons situés sur les côtés et en le tirant pour l'ôter.
- Détachez les deux sangles inférieures du harnais, puis maintenez le masque sur votre visage et faites passer le harnais par-dessus votre tête.



- Ajustez les deux sangles supérieures du harnais de façon égale jusqu'à ce que le masque soit stable.



- Faites passer les sangles inférieures sous vos oreilles, puis fixez le harnais aux crochets inférieurs prévus à cet effet sur l'entourage rigide du masque.



- Ajustez les sangles inférieures du harnais de façon égale jusqu'à ce que le masque soit stable.
- Le masque doit être ajusté fermement sans être inconfortable.
- Ne serrez pas trop fort.



- Raccordez le coude au circuit respiratoire de votre appareil.
- Fixez l'ensemble coude et circuit respiratoire au masque en appuyant sur les boutons situés sur les côtés et en poussant sur l'entourage rigide.
- Allumez votre appareil pour obtenir un débit d'air.



- Défaites les bandes Velcro® des sangles supérieures du harnais.
- Repositionnez les deux sangles de façon égale, juste assez pour assurer l'étanchéité, puis rattachez les bandes Velcro®.
- Votre masque est maintenant prêt à être utilisé.

Informations utiles

- Même si le masque Quattro Air semble plus petit que le masque Mirage Quattro, les patients peuvent être appareillés avec des tailles identiques sur les 2 masques.
- Assurez-vous que la bouche du patient soit entre-ouverte lors du choix de la taille.

Conseils :

- Lors de la mise en place du masque, assurez-vous que la bulle se positionne dans le creux du menton, puis basculez le masque vers le haut et vers le nez du patient.
- Veillez à ne pas trop serrer les sangles du harnais.
- Mettez la machine en marche, décollez la bulle du visage du patient puis repositionnez la, afin qu'elle se gonfle correctement.

