



Guide Remote Assist

Français









Pour parcourir le système, ouvrir le dossier du patient et cliquer sur Remote Assist.

Barre d'état de l'appareil

Affiche des messages relatifs au bon ou au mauvais fonctionnement de l'appareil :

-  L'appareil fonctionne comme prévu
-  Une erreur s'est produite







✓
L'appareil fonctionne de la manière prévue.

 Appareil AirSense 10 AutoSet Numéro de série 11941854299 SmartStart Off Tps Total Utilis. 120 h	 Humidificateur Interne: Connecté Niveau d'Humidité  Niveau 4 Climate Control  Auto Humidité ambiante 7 mg/L: Dry	 Circuit respiratoire ClimateLineAir: Connecté I Température du circuit  82°F (28°C)	 Utilisation récente et fuite 07/31 08/04  Masque (en ligne) AirFit P10: Médium Masque (appareil) Narinaire
--	--	---	--

Appareil	Humidificateur	Circuit respiratoire	Utilisation récente et fuite / Masque
Affiche le type et le numéro de série de l'appareil, y compris les réglages : SmartStart [On, Off] Tps Total Utilis. [h].	Affiche le type et l'état de connexion de l'humidificateur, y compris les réglages : Niveau d'humidité [Off, 1 à 8] Climate Control [Manuel, Auto] Humidité ambiante [Sec, Modéré, Humide].	Affiche le type et l'état de connexion du circuit respiratoire, y compris : Température du circuit.	Affiche Utilisation récente et fuite (derniers cinq jours), telles qu'indiquées sur l'écran Patients télésuivis dans AirView. Affiche le type de masque comme : Masque (en ligne) , tel qu'il est renseigné dans AirView Masque (appareil) , tel qu'il est réglé dans l'appareil



Appareil
 Humidificateur
 Circuit respiratoire
 Utilisation récente et fuite / Masque

Problème signalé	État Remote Assist	Conseils pour les patients
J'ai la bouche sèche.	 L'appareil fonctionne comme prévu Le réglage du niveau d'humidité est bas tandis que l'humidité ambiante est sèche.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Expliquer que l'environnement est sec et qu'une humidité supplémentaire peut être nécessaire. 2. Ajuster les réglages selon les besoins. 3. Rappeler si des problèmes sont identifiés.
J'ai l'impression que mon humidificateur ne fonctionne pas.	 L'appareil fonctionne comme prévu Le réglage du niveau d'humidité est élevé tandis que l'humidité ambiante est élevée.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Expliquer que si l'environnement est humide, l'appareil n'ajoute pas d'humidité supplémentaire au débit d'air. 2. Ajuster les réglages selon les besoins. 3. Rappeler si des problèmes sont identifiés.
Mon ClimateLineAir ne fonctionne pas.	 L'appareil fonctionne comme prévu Le circuit respiratoire connecté affiche SlimLine.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Déconnecter le ClimateLineAir et le reconnecter fermement. 2. Vérifier que l'état de la connexion est bien « Connecté ». 3. Tester le nouveau réglage au cours d'une nuit. 4. Rappeler si des problèmes sont identifiés.
J'ai l'impression que la pression d'air n'est pas correcte.	 L'appareil fonctionne comme prévu Utilisation récente et fuite indique une fuite importante, ou le masque utilisé ne correspond pas au réglage de l'appareil.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifier que le type de masque réglé pour Masque (en ligne) et indiqué pour Masque (appareil) est le même. 2. Faire les réglages nécessaires. 3. S'assurer que la fuite est contrôlée.
Mon appareil s'arrête régulièrement.	 L'appareil fonctionne comme prévu SmartStart est sur On (activé). Utilisation récente indique une fuite.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Régler SmartStart sur Off (désactivé). 2. Tester le nouveau réglage au cours d'une nuit. 3. Rappeler si des problèmes sont identifiés.
Mon appareil s'arrête régulièrement avec une erreur.	 Une erreur s'est produite Le message d'erreur de l'appareil s'affiche.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Retourner l'appareil à un revendeur ou bureau ResMed proche.

Remarque : Pour d'autres scénarios de dépannage, consulter le guide d'utilisation AirSense 10.

ResMed Ltd
 1 Elizabeth Macarthur Drive
 Bella Vista NSW 2153 Australie

DISTRIBUÉ PAR
 ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 États-Unis
IC REP ResMed (UK) Ltd 96 Jubilee Ave Milton Park Abingdon
 Oxfordshire OX14 4RW R-U

Consultez le site www.resmed.com pour les bureaux ResMed à l'international. Pour en savoir plus sur les brevets, consultez www.resmed.com/ip.
 AirView est une marque commerciale de ResMed Ltd.
 © 2014 ResMed Ltd. 228784/2 2014-10