

Tabella compatibilità maschera/apparecchio

Italiano

Questo documento specifica quali sono le maschere compatibili con gli apparecchi a pressione positiva alle vie aeree di ResMed e l'impostazione di maschera da configurare, se necessaria. Per informazioni complete sull'uso corretto di questi apparecchi, si rimanda alle rispettive Guide per l'utente.

Nota: Non tutti i prodotti sono disponibili in tutti i Paesi.

Maschere oro-nasali

Apparecchio	AcuCare F1-4	AirFit™ F30	AirTouch™ F20 / AirTouch™ F20 for Her AirFit™ F20 / AirFit™ F20 for Her	AirFit™ F10 / AirFit™ F10 for Her	Mirage™	Mirage Series 2	Ultra Mirage™	Mirage Quattro™	Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her	Mirage Liberty™	Oro-nasale per uso ospedaliero
AirMini	X	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X
Air 10 Serie	N.O.	Oro-nasale	Oro-nasale	Oro-nasale	N.O.	N.O.	Oro-nasale	Oro-nasale	Oro-nasale	Oro-nasale	Oro-nasale
Lumis™	N.O.	N.O.	Oro-nasale	Oro-nasale	N.O.	N.O.	Oro-nasale	Oro-nasale	Oro-nasale	Oro-nasale	Oro-nasale
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	N.O.	N.O.	Oro-nasale	Oro-nasale	N.O.	N.O.	Oro-nasale	Oro-nasale	Oro-nasale	Oro-nasale	Oro-nasale
S9 Escape™	N.O.	N.O.	Oro-nasale	Oro-nasale	N.O.	N.O.	Oro-nasale	Oro-nasale	Oro-nasale	Oro-nasale	Oro-nasale
AutoSet CS™ 2	N.O.	N.O.	N.O.	ORO-NASALE	ORO-NASALE	ORO-NASALE	ORO-NASALE	ORO-NASALE	ORO-NASALE	ORO-NASALE!	ORO-NASALE
AutoSet CS™ (S9)	N.O.	N.O.	Oro-nasale	Oro-nasale	N.O.	N.O.	Oro-nasale	Oro-nasale	Oro-nasale	Oro-nasale	Oro-nasale
AutoSet CS™ (S9 PaceWave) / AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N.O.	N.O.	Oro-nasale	Oro-nasale	N.O.	N.O.	Oro-nasale	Oro-nasale	Oro-nasale	Oro-nasale	Oro-nasale
C-Series Tango™	N.O.	N.O.	N.O.	Nessuna impostazione richiesta. Consultare il proprio medico prima di passare a un tipo diverso di maschera.							
S7™ Lightweight	N.O.	N.O.	N.O.	Nessuna impostazione richiesta. Consultare il proprio medico prima di passare a un tipo diverso di maschera.							
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N.O.	N.O.	N.O.	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S7 AutoSet Respond™	N.O.	N.O.	N.O.	MIRAGE	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIR FULL	MIR FULL
S8™ Auto 25	N.O.	N.O.	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Spirit™	N.O.	N.O.	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Vantage™	N.O.	N.O.	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 Escape™	N.O.	N.O.	N.O.	Necessita di taratura della pressione a 12 cm H ₂ O. Rivolgersi al proprio medico e consultare la guida per l'utente.							
S8 Escape™ II	N.O.	N.O.	Necessita di taratura della pressione a 12 cm H ₂ O. Rivolgersi al proprio medico e consultare la guida per l'utente.								
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N.O.	N.O.	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Spirit™ II	N.O.	N.O.	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 Compact™	N.O.	N.O.	N.O.	Nessuna impostazione richiesta. Consultare il proprio medico prima di passare a un tipo diverso di maschera.							
VPAP™ III / VPAP™ III ST	N.O.	N.O.	N.O.	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ III ST-A	N.O.	N.O.	N.O.	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ IV / VPAP IV ST	N.O.	N.O.	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ Adapt SV	N.O.	N.O.	N.O.	ORO-NASALE	ORO-NASALE	ORO-NASALE	ORO-NASALE	ORO-NASALE	ORO-NASALE	ORO-NASALE!	ORO-NASALE
VPAP™ Adapt (S9)	N.O.	N.O.	Oro-nasale	Oro-nasale	N.O.	N.O.	Oro-nasale	Oro-nasale	Oro-nasale	Oro-nasale	Oro-nasale

Apparecchio	AcuCare F1-4	AirFit™ F30	AirTouch™ F20 / AirTouch™ F20 for Her AirFit™ F20 / AirFit™ F20 for Her	AirFit™ F10 / AirFit™ F10 for Her	Mirage™	Mirage Series 2	Ultra Mirage™	Mirage Quattro™	Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her	Mirage Liberty™	Oro-nasale per uso ospedaliero
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	N.O.	N.O.	Oro-nasale	Oro-nasale	N.O.	N.O.	Oro-nasale	Oro-nasale	Oro-nasale	Oro-nasale	Oro-nasale
VPAP™ Malibu	N.O.	N.O.	N.O.	ORO-NASALE	ORO-NASALE	ORO-NASALE	ORO-NASALE	ORO-NASALE	ORO-NASALE	ORO-NASALE	ORO-NASALE
VPAP™ Auto 25	N.O.	N.O.	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
Auto 25 (S9)	N.O.	N.O.	Oro-nasale	Oro-nasale	N.O.	N.O.	Oro-nasale	Oro-nasale	Oro-nasale	Oro-nasale	Oro-nasale
VPAP™ S / VPAP™ ST	N.O.	N.O.	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9) / VPAP™ ST-A (S9)	N.O.	N.O.	Oro-nasale	Oro-nasale	N.O.	N.O.	Oro-nasale	Oro-nasale	Oro-nasale	Oro-nasale	Oro-nasale
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	N.O.	N.O.	Oro-nasale	Oro-nasale	N.O.	N.O.	Oro-nasale	Oro-nasale	Oro-nasale	Oro-nasale	Oro-nasale
VPAP™ Tx	N.O.	N.O.	N.O.	ORO-NASALE	N.O.	N.O.	ORO-NASALE	ORO-NASALE	ORO-NASALE	ORO-NASALE	ORO-NASALE
Stellar™	N.O.	N.O.	ORO-NASALE	ORO-NASALE	N.O.	N.O.	ORO-NASALE	ORO-NASALE	ORO-NASALE	ORO-NASALE	ORO-NASALE
VS Ultra™ / VS Integra™	✓	N.O.	N.O.	✓	N.O.	N.O.	✓	✓	N.O.	✓	✓
VS III™	N.O.	N.O.	N.O.	✓	N.O.	N.O.	✓	✓	N.O.	✓	✓
Astral™	ORO-NASALE	N.O.	ORO-NASALE	N.O.	N.O.	N.O.	ORO-NASALE	ORO-NASALE	ORO-NASALE	ORO-NASALE	ORO-NASALE

¹ Lo SmartStop può non funzionare come descritto quando si usa la maschera con gli apparecchi AutoSet CS 2 o VPAP Adapt SV di ResMed.

N.O. = La maschera non è stata omologata per questo apparecchio.

✓ = Compatibile X = Non compatibile

Maschere nasali 1

Apparecchio	AirFit™ N30i	AirFit™ N20 Classic	AirFit™ N20 / AirFit™ N20 for Her	AirFit™ N10 / AirFit™ N10 for Her	Swift™ FX Nano / Swift™ FX Nano for Her	Mirage™ FX / Mirage FX™ for Her	Mirage Activa™ LT	Mirage™ SoftGel	Hospital Nasal	
AirMini™	X	✓	✓	X	X	X	X	X	X	
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	Cuscineti	Cuscineti	Cuscineti	Cuscineti	Cuscineti	Nasale	Nasale	Nasale	Nasale	
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	Cuscineti	Cuscineti	Cuscineti	Cuscineti	Cuscineti	Nasale	Nasale	Nasale	Nasale	
AirCurve™ 10 CS Pacewave	Cuscineti	Cuscineti	Cuscineti	Cuscineti	Cuscineti	Nasale	Nasale	Nasale	Nasale	
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	X	Cuscineti	Cuscineti	Cuscineti	Cuscineti	Nasale	Nasale	Nasale	Nasale	
Lumis™	X	Cuscineti	Cuscineti	Cuscineti	Cuscineti	Nasale	Nasale	Nasale	Nasale	
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	Cuscineti	Cuscineti	Cuscineti	Cuscineti	Cuscineti	Nasale	Nasale	Nasale	Nasale	
S9 Escape™	Cuscineti	Cuscineti	Cuscineti	Cuscineti	Cuscineti	Nasale	Nasale	Nasale	Nasale	
AutoSet CS™ 2	X	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	VISTA ¹	ACTIVA	ACTIVA	VISTA	
AutoSet CS™ (S9)	Cuscineti	Cuscineti	Cuscineti	Cuscineti	Cuscineti	Nasale	Nasale	Nasale	Nasale	
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	Cuscineti	Cuscineti	Cuscineti	Cuscineti	Cuscineti	Nasale	Nasale	Nasale	Nasale	
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	X	Cuscineti	Cuscineti	Cuscineti	Cuscineti	Nasale	Nasale	Nasale	Nasale	
C-Series Tango™	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	Nessuna impostazione richiesta. Consultare il proprio medico prima di passare a un tipo diverso di maschera.				
S7™ Lightweight	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	Nessuna impostazione richiesta. Consultare il proprio medico prima di passare a un tipo diverso di maschera.				
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD	
S7 AutoSet Respond™	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD	
S8™ Auto 25	X	N.O.	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD	
S8 AutoSet Spirit™	N.O.	N.O.	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD	

Apparecchio	AirFit™ N30i	AirFit™ N20 Classic	AirFit™ N20 / AirFit™ N20 for Her	AirFit™ N10 / AirFit™ N10 for Her	Swift™ FX Nano / Swift™ FX Nano for Her	Mirage™ FX / Mirage FX™ for Her	Mirage Activa™ LT	Mirage™ SoftGel	Hospital Nasal
S8 AutoSet Vantage™	N.O.	N.O.	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 Escape™	N.O.	N.O.	N.O.	Necessita di taratura della pressione a 12 cm H ₂ O. Rivolgersi al proprio medico e consultare la guida per l'utente.					
S8 Escape™ II	N.O.	N.O.	Necessita di taratura della pressione a 12 cm H ₂ O. Rivolgersi al proprio medico e consultare la guida per l'utente.						
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N.O.	N.O.	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 AutoSet Spirit™ II	N.O.	N.O.	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 Compact™	N.O.	N.O.	N.O.	Nessuna impostazione richiesta. Consultare il proprio medico prima di passare a un tipo diverso di maschera.					
VPAP™ III / VPAP™ III ST	X	N.O.	N.O.	MIRAGE	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N.O.
VPAP™ III ST-A	X	N.O.	N.O.	MIRAGE	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N.O.
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	X	N.O.	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
VPAP™ Adapt SV	X	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	VISTA ¹	ACTIVA	ACTIVA	VISTA
VPAP™ Adapt (S9)	Cuscinetti	Cuscinetti	Cuscinetti	Cuscinetti	Cuscinetti	Nasale	Nasale	Nasale	Nasale
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	Cuscinetti	Cuscinetti	Cuscinetti	Cuscinetti	Cuscinetti	Nasale	Nasale	Nasale	Nasale
VPAP™ Malibu	X	N.O.	N.O.	SWIFT	SWIFT	VISTA ¹	N.O.	N.O.	MERIDIAN
VPAP™ Auto 25	X	N.O.	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
Auto 25 (S9)	Cuscinetti	Cuscinetti	Cuscinetti	Cuscinetti	Cuscinetti	Nasale	Nasale	Nasale	Nasale
VPAP™ S / VPAP™ ST	X	N.O.	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	Cuscinetti	Cuscinetti	Cuscinetti	Cuscinetti	Cuscinetti	Nasale	Nasale	Nasale	Nasale
VPAP™ ST-A (S9)	X	Cuscinetti	Cuscinetti	Cuscinetti	Cuscinetti	Nasale	Nasale	Nasale	Nasale
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	X	Cuscinetti	Cuscinetti	Cuscinetti	Cuscinetti	Nasale	Nasale	Nasale	Nasale
VPAP™ Tx	X	N.O.	N.O.	CUSCINETTI	CUSCINETTI	NASALE	NASALE	NASALE	NASALE
Stellar™	X	CUSCINETTI	CUSCINETTI	CUSCINETTI ¹	CUSCINETTI ¹	NASALE	NASALE	NASALE	NASALE
VS Ultra™ / VS Integra™	X	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.
VS III™	X	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	✓	N.O.	✓
Astral™	X	Cuscinetti	Cuscinetti	N.O.	N.O.	Nasale	N.O.	Nasale	Nasale

¹ Lo SmartStop può non funzionare come descritto quando si usa la maschera con gli apparecchi AutoSet CS 2 o VPAP Adapt SV, Stellar di ResMed.

N.O. = La maschera non è stata omologata per questo apparecchio.

✓ = Compatibile X = Non compatibile

Maschere nasali 2

Apparecchio	Pixi™	Mirage Kidsta™	Mirage Micro™	Mirage Vista™	Ultra Mirage II	Mirage	Mirage Activa™	Modular	Papillon™	Meridian
AirMini™	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Air 10 Serie	N.O.	Nasale	Nasale	Nasale	Nasale	N.O.	Nasale	N.O.	N.O.	Nasale
Lumis™	N.O.	Nasale	Nasale	Nasale	Nasale	N.O.	Nasale	N.O.	N.O.	Nasale
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	N.O.	N.O.	Nasale	Nasale	Nasale Ultra	N.O.	Nasale	Nasale	Nasale	Nasale
S9 Escape™	N.O.	N.O.	Nasale	Nasale	Nasale Ultra	N.O.	Nasale	Nasale	Nasale	Nasale
AutoSet CS™ 2	N.O.	N.O.	VISTA ¹	VISTA	ULTRA	N.O.	ACTIVA	N.O.	PAPILLON	VISTA
AutoSet CS™ (S9)	N.O.	N.O.	Nasale	Nasale	Nasale Ultra	N.O.	Nasale	Nasale	Nasale	Nasale
AutoSet CS™ (S9 PaceWave) / AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N.O.	N.O.	Nasale	Nasale	Nasale Ultra	N.O.	Nasale	Nasale	Nasale	Nasale

Apparecchio	Pixi™	Mirage Kidsta™	Mirage Micro™	Mirage Vista™	Ultra Mirage II	Mirage	Mirage Activa™	Modular	Papillon™	Meridian
C-Series Tango™	N.O.	N.O.	N.O.	Nessuna impostazione richiesta. Consultare il proprio medico prima di passare a un tipo diverso di maschera.						N.O.
S7™ Lightweight	N.O.	N.O.	N.O.	Nessuna impostazione richiesta. Consultare il proprio medico prima di passare a un tipo diverso di maschera.						N.O.
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N.O.	N.O.	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N.O.
S7 AutoSet Respond™	N.O.	N.O.	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N.O.
S8™ Auto 25	N.O.	N.O.	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N.O.	N.O.	STANDARD
S8 AutoSet Spirit™	N.O.	N.O.	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 AutoSet Vantage™	N.O.	N.O.	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 Escape™	N.O.	N.O.	Necessita di taratura della pressione a 12 cm H ₂ O. Rivolgersi al proprio medico e consultare la guida per l'utente.							
S8 Escape™ II	N.O.	N.O.	Necessita di taratura della pressione a 12 cm H ₂ O. Rivolgersi al proprio medico e consultare la guida per l'utente.							
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N.O.	N.O.	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 AutoSet Spirit™ II	N.O.	N.O.	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 Compact™	N.O.	N.O.	Nessuna impostazione richiesta. Consultare il proprio medico prima di passare a un tipo diverso di maschera.							
VPAP™ III / VPAP™ III ST	N.O.	N.O.	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	N.O.	N.O.
VPAP™ III ST-A	N.O.	STANDARD	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	N.O.	N.O.
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	N.O.	N.O.	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N.O.	N.O.	STANDARD
VPAP™ Adapt SV	N.O.	N.O.	VISTA ¹	VISTA	ULTRA	N.O.	ACTIVA	N.O.	N.O.	VISTA
VPAP™ Adapt (S9)	N.O.	N.O.	Nasale	Nasale	Nasale Ultra	N.O.	Nasale	Nasale	Nasale	Nasale
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	N.O.	N.O.	Nasale	Nasale	Nasale Ultra	N.O.	Nasale	Nasale	Nasale	Nasale
VPAP™ Malibu	N.O.	N.O.	MERIDIAN	VISTA	ULTRA	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	MERIDIAN
VPAP™ Auto 25	N.O.	N.O.	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N.O.	N.O.	STANDARD
Auto 25 (S9)	N.O.	N.O.	Nasale	Nasale	Nasale Ultra	N.O.	Nasale	Nasale	Nasale	STANDARD
VPAP™ S / VPAP™ ST	N.O.	N.O.	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N.O.	N.O.	STANDARD
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9) / VPAP™ ST-A (S9)	Pediatrica	N.O.	Nasale	Nasale	Nasale Ultra	N.O.	Nasale	Nasale	Nasale	Nasale
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	Pediatrica	N.O.	Nasale	Nasale	Nasale Ultra	N.O.	Nasale	Nasale	Nasale	Nasale
VPAP™ Tx	N.O.	NASALE	NASALE	NASALE	NASALE-ULTRA	N.O.	NASALE	N.O.	N.O.	NASALE
Stellar™	Pediatrica	NASALE	NASALE	NASALE	ULTRA	N.O.	NASALE	N.O.	N.O.	N.O.
VS Ultra™ / VS Integra™	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.
VS III™	N.O.	✓	✓	✓	✓	N.O.	✓	N.O.	N.O.	N.O.
Astral™	Pediatrica	Nasale	Nasale	Nasale	Nasale Ultra	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.

N.O. = La maschera non è stata omologata per questo apparecchio.

✓ = Compatibile X = Non compatibile

Cuscini nasali

Apparecchio	AirFit™ P10 For AirMini™	AirFit™ P10 / AirFit™ P10 for Her	Mirage Swift™	Mirage Swift™ II	Swift™ FX / Swift™ FX for Her / Swift™ FX Bella / Swift™ FX Bella Gray	Swift™ LT	Swift™ LT for Her / Swift™ LT-F
AirMini™	✓	X	X	X	X	X	X
Air 10 Serie	X	Cuscini ²	N.O.	Cuscini	Cuscini	Cuscini	Cuscini
Lumis™	X	Cuscini ²	N.O.	Cuscini	Cuscini	Cuscini	Cuscini
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	X	Cuscini	Cuscini	Cuscini	Cuscini	Cuscini	Cuscini

Apparecchio	AirFit™ P10 For AirMini™	AirFit™ P10 / AirFit™ P10 for Her	Mirage Swift™	Mirage Swift™ II	Swift™ FX / Swift™ FX for Her / Swift™ FX Bella / Swift™ FX Bella Gray	Swift™ LT	Swift™ LT for Her / Swift™ LT-F
S9 Escape™	X	Cuscineti	Cuscineti	Cuscineti	Cuscineti	Cuscineti	Cuscineti
AutoSet CS™ 2	X	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.
AutoSet CS™ (S9)	X	Cuscineti ²	Cuscineti	Cuscineti	Cuscineti	Cuscineti	Cuscineti
AutoSet CS™ (S9 PaceWave) / AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	X	Cuscineti ²	Cuscineti	Cuscineti	Cuscineti	Cuscineti	Cuscineti
C-Series Tango™	X	Nessuna impostazione richiesta. Consultare il proprio medico prima di passare a un tipo diverso di maschera.					
S7™ Lightweight	X	Nessuna impostazione richiesta. Consultare il proprio medico prima di passare a un tipo diverso di maschera.					
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	X	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE
S7 AutoSet Respond™	X	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE
S8™ Auto 25	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 AutoSet Spirit™	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 AutoSet Vantage™	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 Escape™	X	Necessita di taratura della pressione a 12 cm H ₂ O. Rivolgersi al proprio medico e consultare la guida per l'utente.					
S8 Escape™ II	X	Necessita di taratura della pressione a 12 cm H ₂ O. Rivolgersi al proprio medico e consultare la guida per l'utente.					
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 AutoSet Spirit™ II	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 Compact™	X	Nessuna impostazione richiesta. Consultare il proprio medico prima di passare a un tipo diverso di maschera.					
VPAP™ III / VPAP™ III ST	X	MIRAGE ²	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE
VPAP™ III ST-A	X	MIRAGE ²	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	X	SWIFT ²	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ Adapt SV	X	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.
VPAP™ Adapt (S9)	X	Cuscineti ²	Cuscineti	Cuscineti	Cuscineti	Cuscineti	Cuscineti
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	X	Cuscineti ²	Cuscineti	Cuscineti	Cuscineti	Cuscineti	Cuscineti
VPAP™ Malibu	X	SWIFT ²	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ Auto 25	X	SWIFT ²	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
Auto 25 (S9)	X	Cuscineti ²	Cuscineti	Cuscineti	Cuscineti	Cuscineti	Cuscineti
VPAP™ S / VPAP™ ST	X	SWIFT ²	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9) / VPAP™ ST-A (S9)	X	Cuscineti ²	Cuscineti	Cuscineti	Cuscineti	Cuscineti	Cuscineti
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	X	Cuscineti ²	Cuscineti	Cuscineti	Cuscineti	Cuscineti	Cuscineti
VPAP™ Tx	X	CUSCINETTI ²	CUSCINETTI	CUSCINETTI	CUSCINETTI	CUSCINETTI	CUSCINETTI
Stellar™	X	CUSCINETTI ^{1,2}	CUSCINETTI ¹	CUSCINETTI ¹	CUSCINETTI ¹	CUSCINETTI ¹	CUSCINETTI ¹
VS Ultra™ / VS Integra™	X	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.
VS III™	X	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.
Astral™	X	N.O.	Cuscineti	Cuscineti	Cuscineti	Cuscineti	Cuscineti

¹ Lo SmartStop può non funzionare come descritto quando si usa la maschera con gli apparecchi Stellar.

² L'accuratezza del volume corrente e del volume minuto può diminuire quando si utilizza la maschera AirFit P10 nelle modalità bilevel, in particolare alle elevate pressioni di supporto.

N.O. = La maschera non è stata omologata per questo apparecchio.

✓ = Compatibile X = Non compatibile



 **ResMed Ltd**
1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153 Australia

Vedere ResMed.com per le altre sedi ResMed internazionali. Per informazioni su brevetti e su altra proprietà intellettuale, vedere ResMed.com/ip. AcuCare, Lumis, AirFit, AirTouch, AirMini, S9, S9 AutoSet, S9 Elite, S9 Escape, AutoSet, Tango, S8, S8 AutoSet Vantage, S8 Escape, S8 Elite, S8 Compact, VPAP, VPAP Adapt SV, VPAP Tx, Stellar, Mirage, Mirage Micro, Mirage Vista, Mirage Kidsta, Ultra Mirage, Activa, Pixi, Swift, Mirage Swift e Quattro sono marchi di proprietà di ResMed Ltd; Astral, Tango, AutoSet, Escape, S9, VPAP, Adapt SV, Stellar, Mirage, Quattro, Activa, Kidsta, Swift e Vista sono nomi di prodotto registrati presso l'ufficio statunitense di marchi e brevetti. Astral, VS Ultra, VS Integra e VS III sono marchi di proprietà di ResMed Paris SAS. © 2018 ResMed Ltd. 1017543/11 2018-11

ResMed.com

 0123