

Swift™ LT

MASQUE NARINAIRE

Guide de mise en place



- Tout en maintenant les coussins en place au niveau de votre nez, tirez sur le harnais pour le faire passer par-dessus votre tête.
- Le harnais devrait reposer à mi-chemin entre vos oreilles et vos yeux.



- Ajustez les sangles supérieures en tirant dessus simultanément jusqu'à ce que la position du harnais soit confortable.
- Veillez à ne pas les serrer excessivement.



- Répétez l'étape 2 pour les sangles arrière.
- Veillez à ne pas les serrer excessivement.



- Faites pivoter le corps du masque pour positionner les coussins narinaires selon l'angle qui vous convient le mieux.
- Raccordez le tuyau court du Swift LT au circuit respiratoire de l'appareil.
- Mettez l'appareil sous tension.



- Vous êtes maintenant prêt à utiliser le Swift LT.



Facultatif

- Pour mettre le tuyau dans d'autres positions, utilisez la bague de fixation prévue à cet effet.

- Pour la mettre en place, placez-la dans la boucle supérieure du harnais.

- Selon la flexibilité voulue, fixez-y soit le tuyau court, soit le circuit respiratoire de l'appareil.

- Vous pouvez positionner le circuit d'un côté ou de l'autre de votre visage ou encore au centre.

- Si les coussins tirent au niveau de vos narines, ajustez la longueur du circuit au niveau de la bague de fixation.

 Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au *Manuel utilisateur du masque narinaire Swift LT*.