

## Mirage™ SoftGel

NESEMASKE

### Tilpasningsguide



- Vri MicroFit-skruen til posisjon 24, slik at pannestøtten er strukket helt ut.



- Ta av den nedre hodestroppklipsen, hold masken over nesene og dra hodestroppen over hodet.



- Fest den nedre hodestroppklipsen, og pass på at den klikker på plass.



- Tilpass de øvre stroppene jevnt. Ikke stram for hardt til.



- Tilpass de nedre stroppene til masken sitter komfortabelt. Ikke stram for hardt til.



- Den ene enden av luftslangen kobles til svivelen, mens den andre enden kobles til apparatet.
- Slå på apparatet.



- Tilpass skruen for å fjerne eventuelle lekkasjer ved nesene.



- Tilpass de nedre stroppene for å fjerne eventuelle lekkasjer ved overleppen.