

Tilpasningsguide



- Før du tilpasser masken, skal du fjerne kneleddet fra masken ved å presse klemmeklaffene.



- Koble kneleddet til enhetens luftslange.



- Med begge nedre hodestroppene løst skal du holde masken mot ansiktet og trekke hodestroppene over hodet.



- Før de nedre stroppene under ørene, og før hodestroppene i en sløyfe inn i de nedre festene på maskerammen.



- Løsne borrelåsen, trekk de øvre hodestroppene jevnt til de er komfortable og sitter stramt, og sett på borrelåsen igjen.



- Gjenta trinn 5 med de nedre hodestroppene.



- Fest kneleddsettet og luftslangen til masken ved å presse klemmeklaffene og skyve dem inn i maskerammen.
- Slå på apparatet.

Mirage™ FX
NESEMASKE