

## Laget spesielt for kvinner



Quattro™ FX for Her er en lett helmaske med diskret design, som gir brukere et effektivt alternativ til konvensjonell helmaskebehandling.

### Fordeler for deg

#### **Finn riktig størrelse, sving ned masken og den vil forsegle seg.**

Quattro FX for Her gir deg verktøyene du trenger for å få best mulig tilpasning for pasientene dine, første gang, hver gang. **Svingforseglingsteknikken** og spesialverktøyet for valg av størrelse, gjør det enklere å finne riktig maskestørrelse samt tilpasse og forsegle masken. Dermed sparer du både tid, penger og ekstra pasientbesøk.

#### **Du sparer tid og penger**

Den fjæringsaktige kombinasjonen av Spring Air™-puten og hodestroppholderen gjør at det ikke er nødvendig å bruke pannestøtte. Dette eliminerer et ekstra justeringspunkt, og sikrer at tilpassingen av Quattro FX for Her går raskt og uproblematisk.

#### **Pasientene godtar lettere behandlingen**

Komforten, ytelsen og følelsen av åpenhet som Quattro FX for Her tilbyr, gjør det enklere for pasientene å godta og fortsette behandlingen, både under og etter titreringen.

### ... og pasientene dine

#### **Kvalitet og ytelse opprettholdes**

De nye teknologiene som er brukt i Spring Air-puten og hodestroppholderen, gir samme stabilitet og vinkeljustering som den konvensjonelle pannestøtten. Quattro FX for Her leverer den nødvendige kvaliteten og ytelsen i en mer diskret helmaske.

#### **Frihet**

Det reduserte antallet kontaktpunkter med ansiktet reduserer risikoen for hudirritasjoner, samtidig som et klart synsfelt bidrar til å bryte ned de fysiske og emosjonelle barrierene som er forbundet med behandlinger hvor det benyttes helmaske.

#### **God nattesøvn**

Med hodestroppalternativer for ordning av håret er Quattro FX for Her tilpasset hennes personlige stil ... håret kan være oppsatt eller løst og over eller under hodestroppene.



**Quattro™ FX for Her**  
FULL FACE MASK

Mindre maske. Mer deg.



## Teknologifokus

**Finn riktig størrelse, sving ned masken og den vil forsegle seg. NYHET**

Quattro FX gjør det enkelt å finne riktig størrelse samt tilpasse og forsegle masken.

**Spesialverktøyet for valg av størrelse** gjør det enkelt å finne perfekt størrelse.

Når du har funnet riktig maskestørrelse, tilpasser du masken ved hjelp av **svingforseglingsteknikken**:

- 1 Start med å plassere puten i en vinkel mot neseryggen.
- 2 Sving deretter den nedre delen av masken ned mot ansiktet for å forsegle den.

Quattro FX for Her: sitter som den skal, forseglers sikkert ... ved første forsøk.

### Klart synsfelt

og en følelse av åpenhet ved at helmasken starter halvveis opp på neseryggen. Rammen er dessuten mindre i størrelse, slik at det er langt mer komfortabelt å sove på siden.

### Det innebygde ventildesignet

fordeler luften skånsomt og stille.

### Fleksibel og slitesterk hodestroppholder

som er sterk nok til å stabilisere masken på ansiktet, men myk nok til å gi brukeren mulighet til å bevege på seg i søvne.

### Kneleddet kan roteres 360°


slik at slangen blir enklere tilgjengelig.

### Den nydesignede hodestroppen strammer mindre

og har en konturert kronestropp som sitter godt øverst på hodet og unngår det følsomme nakkepartiet.

### Kan tilpasses hennes personlige stil

Enten brukeren har langt eller kort hår, har det oppsatt eller løst, er Quattro FX for Her-hodestroppen komfortabel og praktisk ... og den er utformet i et mer feminint fargespekter, spesielt for henne.

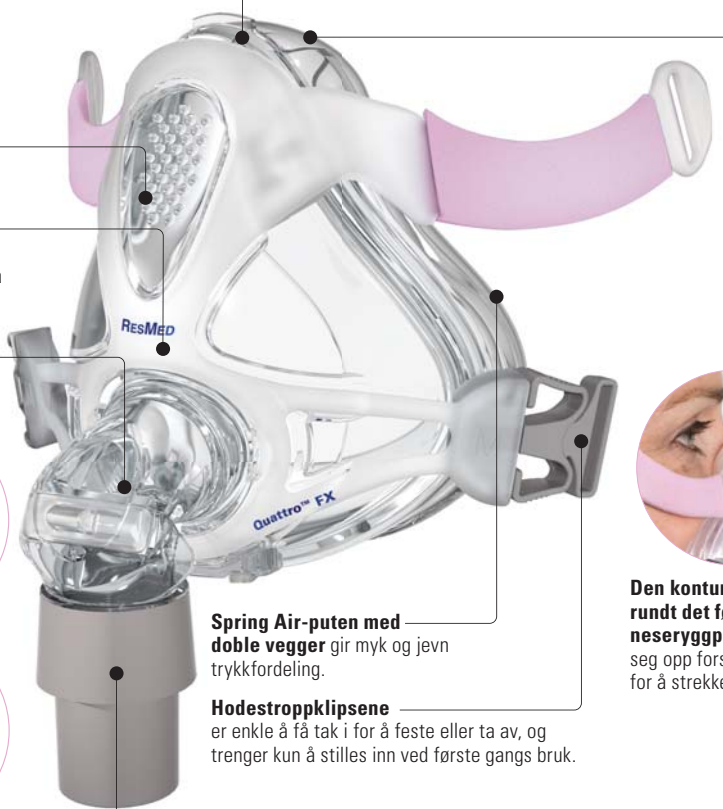

**Spring Air-puten med doble vegger** gir myk og jevn trykkfordeling.

**Hodestroppklipsene** er enkle å få tak i for å feste eller ta av, og trenger kun å stilles inn ved første gangs bruk.

**Svivelen** gjør det enkelt og praktisk å koble til og fra luftslangen.



**Den konturerte putemembranen rundt det følsomme neseryggpartiet** ruller og blåser seg opp forsiktig mot nesen i stedet for å strekke seg over den.

## Produktkoder

Small	62520
Medium	62521

**Quattro™ FX for Her**  
FULL FACE MASK

[www.quattrofx.com](http://www.quattrofx.com)

**Produsent: ResMed Ltd**  
1 Elizabeth Macarthur Drive  
Bella Vista NSW 2153 Australia

**Distribueres av:** ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA. **LECTIP** ResMed (UK) Ltd 96 Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RY UK. Se [www.resmed.com](http://www.resmed.com) for andre steder i verden der ResMed er lokalisert. Quattro er et varemerke for ResMed Ltd. © 2012 ResMed Ltd. Spesifikasjonene kan endres uten varsel. 1015243/1 2012-02