

Tilpasningsguide

Før du tar på masken, fjerner du den oransje støtten til hodestroppholderen fra baksiden av masken og beholder den for fremtidig bruk.



- Sørg for at begge de nedre hodestroppklipsene er åpne, og plassér puten i en vinkel mot neseryggen.



- Hold den øvre maskeposisjonen og sving den nedre halvdel av masken ned mot ansiktet.



- Hold masken godt fast mot ansiktet og trekk hodestroppene over hodet.



- Før de nedre stroppene under ørene og knepp hodestroppklipsene inn i nedre del av hodestroppholderen.



- Løsne borrelåsen av merket Velcro®, trekk jevnt i de øvre hodestroppene til de sitter godt og behagelig og fest borrelåsen igjen.



- Gjenta trinn 5 med de nedre hodestroppene.



- Koble den ene enden av luftslangen til svivelen og den andre enden til apparatet.
- Slå på apparatet.

Tips én



- Påse at hodestroppene er riktig plassert på hodet.

Tips to



- Pass på at masken sitter midt på neseryggen og ikke trykker mot øynene.

Quattro™ FX
FULL FACE MASK

www.quattrofx.com