

Swift™ LT

NESEPUTESYSTEM

Tilpasningsanvisning



- Hold putene under nesen, trekk hodestroppene over hodet.
- Hodestroppene bør sitte midt mellom ørene og øynene.



- Juster de øverste stroppene ved å trekke jevnt i dem til det føles behagelig.
- Ikke trekk for hard til.



- Gjenta punkt 2 med de bakre stroppene.
- Ikke trekk for hardt til.



- Bruk klipsjusteringen og plasser neseputene i den beste vinkelen.
- Kople den korte Swift LT slangen til apparatets luftslange.
- Slå på apparatet.



- Swift LT er nå riktig påsatt og klar til bruk.



Valgfritt

- For alternative slangeplasseringer, bruk slangeholderen.



- For å feste slangeholderen, skyv den inn i spennen på den øverste hodestroppen.
- Fest enten den korte slangen eller apparatets luftslange i holderen, alt avhengig hvor mye fleksibilitet som trengs.
- Slangen kan legges på én av sidene av ansiktet eller midt på.
- Dersom putene trekker mot nesen, justerer du slangen i slangeholderen.

⚠ For opplysninger henvises det til bruksanvisningen til *Swift LT-neseputesystem*.