



Mirage Activa™ Näsmask

INPASSNINGSGUIDE

Så här passar du in din Mirage Activa Näsmask



- 1
- Frigör en av hättans klämmor från masken. Placera maskkudden över näsan och dra hättan över huvudet.
 - Koppla den fria klämman till maskramen.



- 2
- Justera de övre och nedre remmarna på hättan tills maskkudden sitter löst på ansiktet. Panndynorna bör snudda lätt vid pannan.



- 3
- Om panndynorna inte vidrör pannan kan du justera pannstödet genom att trycka ner fliken.
 - Luta dynorna framåt för att flytta upp fliken. Luta dynorna bakåt för att flytta ner fliken.



- 4
- Koppla huvudluftslangens ena ända till flödesgeneratoren och den andra ändan till svängtappen på masken.
 - Koppla maskbågen till maskramen. Skjut in den med fast hand tills den klickar in sig på rätt plats.



- 5
- Sätt på flödesgeneratoren och låt kudden blåsas upp. Om luft läcker ut runt kudden lyfter du bort masken en smula från ansiktet. Sätt sedan tillbaka den igen.
 - Du kanske kommer att behöva justera om remmarna och/eller pannstödet. Dra inte åt remmarna alltför hårt. Se till att ActiveCell™ kammaren på maskkudden har blåsts upp lagom och jämt.
 - Tryck på klämmorna på hättan för att ta bort masken. Dra sedan bort masken och hättan från huvudet.

