

Tillpassningsguide för Quattro™ Air



- Avlägsna knäröret från masken genom att trycka på sidoknapparna och dra bort knäröret.
- Dra huvudbandet över huvudet med de båda nedre huvudbandsremmarna lösgjorda.



- Justera det övre huvudbandets båda remmar tills masken sitter stadigt.



- För de nedre remmarna under öronen och trä in huvudbandet i de nedre krokarna på ramen.



- Justera de nedre huvudbandsremmarna tills masken sitter stadigt.
- Tillpassningen ska göra att masken sitter fast ordentligt utan att kännas obekvämt.
- Spänn inte åt för hårt.



- Anslut luftslangen från apparaten till knäröret.
- Sätt fast knäröret vid masken genom att trycka på sidoknapparna och skjuta in knäröret i masken.
- Starta apparaten så att den blåser luft.



- Lösgör kardborrbandsflikarna på de övre huvudbandsremmarna.
- Flytta de båda remmarna så att de fördelas jämnt, bara så mycket som krävs för en tättslutande passform, och sätt sedan fast fästflikarna igen.
- Masken är nu klar för användning.



Quattro Air for Her är utformad så att du får plats med håret ovanför och nedanför huvudbandet.

Quattro™ Air
Quattro™ Air for Her
FULL FACE MASK (HELMASK)

Komponentkort för Quattro™ Air



Quattro Air-huvudband
62757 Small
62756 Standard



Quattro Air for Her-huvudband
62758 Small
62759 Standard



Knärör med swivel
62762



Maskram
62760 (XS/S)
62761 (M/L)



Mjukdel
62736 (XS)
62737 (S)
62738 (M)
62739 (L)

Produktkoder

| | |
|---|--------------|
| Quattro Air-masksystem, Small | 62709 |
| Quattro Air-masksystem, Medium | 62710 |
| Quattro Air-masksystem, Large | 62711 |
| Quattro Air for Her-masksystem, X-Small | 62746 |
| Quattro Air for Her-masksystem, Small | 62747 |
| Quattro Air for Her-masksystem, Medium | 62748 |

 För närmare information, se **användarguiden** för Quattro Air/Quattro Air for Her Full Face Mask (helmask).

Quattro™ Air
Quattro™ Air for Her
 FULL FACE MASK (HELMASK)