

## Tillpassningsguide

Innan du tillpassar masken tar du bort den organgefärgade fjädringen från maskens baksida och sparar det för senare användning.



- Öppna båda de nedre clipsen på huvudbandet och placera mjukdelen i vinkel mot näsryggen.



- Håll maskens övre del på plats och sväng maskens nedre del ner mot ansiktet.



- Håll masken stadigt mot ansiktet och dra huvudbandet över huvudet.



- För de nedre remmarna under öronen och fäst huvudbandet med clipsen vid fjädringens nedre del.



- Öppna Velcro® fliken och dra åt de övre remmarna lika mycket på varje sida tills de sitter bekvämt och fäst sedan fliken på nytt.



- Upprepa steg 5 med huvudbandets nedre remmar.



- Koppla ena änden av luftslangen till swiveln och den andra änden till flödesgeneratoren.
- Koppla på flödesgeneratoren.

### Tips ett



- Se till att huvudbandet är korrekt placerat på huvudet.

### Tips två



- Se till att masken sitter på mitten av näsryggen och att den inte täcker ögonen.

**Quattro™ FX**  
FULL FACE MASK

[www.quattrofx.com](http://www.quattrofx.com)