


Swift™ FX Nano - tillpassningsguide



- Se till att nederdelen av öppningen på mjukdelen riktas in mot undersidan av din näsa och placera sedan masken över näsan.
- Dra sedan huvudbanden över huvudet så att de befinner sig mitt emellan öronen och ögonen.



- Justera det översta bandet först genom att dra det genom spännet, ett hack i taget, tills masken sitter bekvämt över näsan.
- Spänn inte åt för hårt.

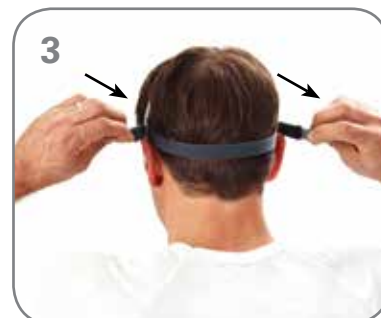

- Det bakre bandet ska sitta alldeles ovanför öronen på huvudets baksida.
- Justera de båda spännena på det bakre tygbandet samtidigt.



- Placera det bakre bandet under eller över håret så att det passar för din frisyr.



- Justera mjukdelen tills den sitter bekvämt på näsan.
- Anslut den korta slangens fria ände till luftslangen på din apparat och starta apparaten.



- Kontrollera om det förekommer något läckage och justera vid behov. Om luft läcker ut ska det bakre bandet justeras innan det övre bandet justeras.
- Masken är nu klar för användning.

Mjuka omslag som tillval




- Linda de mjuka omslagen runt banden och vik ned den övre fästansordningen över den nedre.
- De mjuka omslagen ska placeras på kinderna med fästansordningarna på utsidan.

Obs! För ytterligare information, se användarguiden till Swift FX Nano / Swift FX Nano for Her Nasal Mask.

Swift™ FX Nano
Swift™ FX Nano for Her
NASAL MASK

Swift™ FX Nano - komponentkort

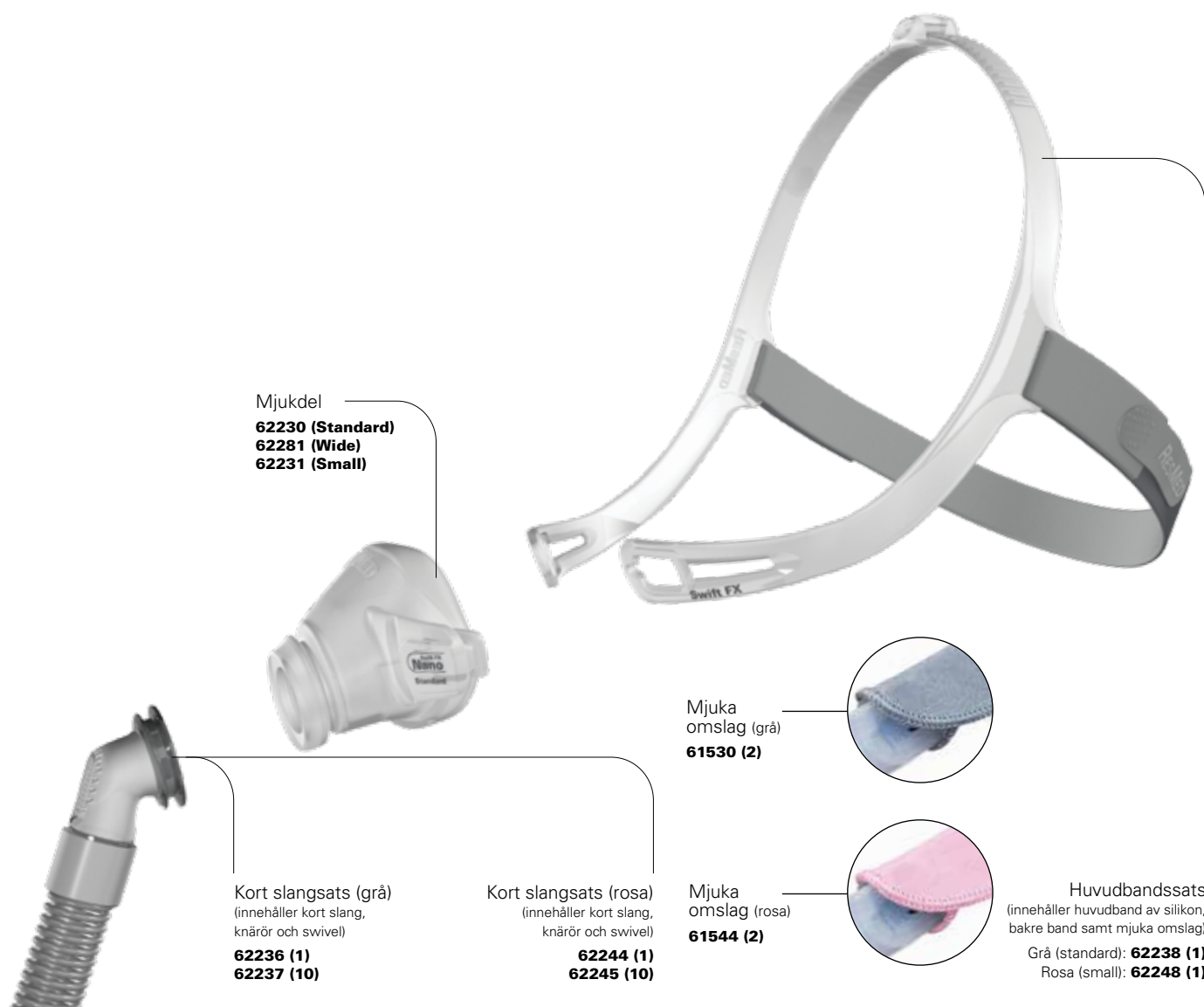

Produktkoder

	Europa 1	Europa 2	Europa 3
Swift FX Nano masksystem* (Standard)	62202	62204	62206
Swift FX Nano masksystem* (Wide)	62253	62255	62257
Swift FX Nano for Her masksystem** (Small)	62203	62205	62207

Europa 1: Engelska (brittisk), franska, tyska och italienska (Schweiz)

Europa 2: Engelska, danska, finska, norska och svenska

Europa 3: Engelska, tjeckiska, holländska (Belgien), franska (Belgien), tyska (Belgien), grekiska, ungerska, italienska, polska, portugisiska, ryska, slovakiska, spanska och turkiska

* Innehåller mjukdel (Standard eller Wide), kort slangsats (grå) samt Swift FX Nano huvudbandsats (grå).

** Innehåller mjukdel (Small), kort slangsats (rosa) samt Swift FX Nano for Her huvudbandsats (rosa).

 Se bruksanvisningen till Swift FX Nano/Swift FX Nano for Her nasal mask för mer information.