

Mall för storlek och tillpassning

1. Skriv ut detta pappersark.
2. Klipp ut mönstret av dynan med en sax längs de streckade linjerna. Konturerna visar faktisk storlek.
3. Dynan i **storlek Large anses vara standardvalet** och är anpassad för maskstorlekarna medium, large och extra large. Dynan i storlek Small är anpassad för masker i storlekarna small, extra small och petite.
4. Placera den urklippta mallen på ansiktet för att bestämma vilken storlek på dyna du behöver. **Om du ligger mellan storlekarna rekommenderar vi att välja storlek Large.**



Som vägledning ska dynan sluta någonstans mellan pupillen och yttre ögonvrån, se ovan.

Dynan kan enkelt justeras i olika vinklar för att passa olika personers ansiktsform.

**Korrekt storlek och tillpassning
förbättrar maskkomfort.**



Anpassad för masker i storlek
MEDIUM, LARGE och EXTRA LARGE

Stor dyna

Vidaste ställe: 10,7 cm Högsta ställe: 5,1 cm



Anpassad för masker i storlek
SMALL, EXTRA SMALL och PETITE

Liten dyna

Vidaste ställe: 8,9 cm Högsta ställe: 3,8 cm



Gecko™
NASAL PAD

© ResMed 2011 618203/1 2011-07