

Liste de compatibilité entre les masques et les appareils

Ce document liste les masques compatibles avec les appareils de pression positive ResMed ainsi que le réglage de masque requis le cas échéant. Pour de plus amples informations sur l'utilisation de ces appareils, veuillez vous référer aux guides utilisateur correspondants.

Remarque : certains de ces produits ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Masques faciaux 1

Appareil	AcuCare™ F1-4	AirFit™ F30i¹ / AirFit™ F30i Non Magnetic¹	AirFit™ F30	AirTouch™ F20 / AirTouch™ F20 for Her	AirFit™ F20 / AirFit™ F20 for Her / AirFit™ F20 Non Magnetic
AirCurve™ 11 VAuto / AirCurve™ 11 S	X	Facial	Facial	Facial	Facial
AirCurve™ 11 ASV	X	Facial	Facial	Facial	Facial
AirSense™ 11	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial
AirMini™	X	X	✓	✓	✓
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial
AirCurve™ 10 ASV / AirCurve™ 10 ASVAuto	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial
AirCurve™ 10 ST-A	N/V	Facial³	Facial³	Facial	Facial
S9 AutoSet™ / S9 AutoSet™ for Her / S9 Elite™	N/V	Facial	N/V	Facial	Facial
S9 Escape™ / S9 Escape™ Auto	N/V	Facial	N/V	Facial	Facial
C-Series Tango™	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
S7 Elite™	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
S8 AutoSet Vantage™	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL
S8 Compact™	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL
S8 Escape™	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
S8 Escape™ II	N/V	N/V	N/V	La pression doit être étalonnée à 12 cm H2O. Adressez-vous à votre clinicien et vérifiez le guide utilisateur.	
S8 AutoSet™ II	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ III	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VPAP™ III ST-A	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VPAP™ Adapt SV	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VPAP™ Adapt (S9)	N/V	Facial	N/V	Facial	Facial
VPAP™ Adapt (S9 ASV)	N/V	Facial	N/V	Facial	Facial

Appareil	AcuCare™ F1-4	AirFit™ F30i ¹ / AirFit™ F30i Non Magnetic ¹	AirFit™ F30	AirTouch™ F20 / AirTouch™ F20 for Her	AirFit™ F20 / AirFit™ F20 for Her / AirFit™ F20 Non Magnetic
VPAP™ Auto 25	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ Auto (S9)	N/V	Facial	N/V	Facial	Facial
VPAP™ Malibu	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VPAP™ S / VPAP™ ST	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	N/V	Facial	N/V	Facial	Facial
VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	N/V	N/V	N/V	Facial	Facial
VPAP™ COPD (S9)	N/V	N/V	N/V	Facial	Facial
S9 VPAP™ Tx	N/V	Facial ²	N/V	Facial	Facial
VPAP™ Tx	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
Lumis™ Tx	N/V	N/V	N/V	Facial	Facial
Stellar™	N/V	N/V	N/V	FACIAL	FACIAL
VS Ultra™ / VS Integra™	✓	N/V	N/V	N/V	N/V
VS III™	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
Astral™	FACIAL	N/V	N/V	FACIAL	FACIAL

¹ La fonction SmartStop peut ne pas fonctionner comme décrit lorsque ce masque est utilisé avec certains appareils de PPC ou d'aide inspiratoire avec PEP.

² À l'exclusion des modes PAC et iVAPS. Compatible uniquement avec une plage de pression entre 4 et 25 cm H2O.

³ Cette association de masque et d'appareil a été jugée sûre sur la base de l'évaluation de la précision du monitoring de la pression, du volume, de la ventilation minute et de la fréquence respiratoire et de ses alarmes le cas échéant. De petites variations de rendement peuvent être observées, en particulier à des pressions ou des débits plus élevés. Conformément à la pratique clinique attendue, l'efficacité de la ventilation et des alarmes doit être vérifiée par le clinicien.

N/V = le masque n'a pas été validé pour cet appareil.

✓ = Compatible X = Incompatible

Masques faciaux 2

Appareil	AirFit™ F10 / AirFit™ F10 for Her	Mirage Quattro™	Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her	Mirage Liberty™	Ultra Mirage™	Hospital Full Face
AirCurve™ 11 VAuto / AirCurve™ 11 S	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
AirCurve™ 11 ASV	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
AirSense™ 11	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
AirMini™	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
AirCurve™ 10 ASV / AirCurve™ 10 ASVAuto	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
AirCurve™ 10 ST-A	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
S9 AutoSet™ / S9 AutoSet™ for Her / S9 Elite™	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
S9 Escape™ / S9 Escape™ Auto	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
C-Series Tango™	Aucun réglage requis. Veuillez consulter votre clinicien avant de changer de type de masque.					
S7 Elite™	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Vantage™	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 Compact™	Aucun réglage requis. Veuillez consulter votre clinicien avant de changer de type de masque.					
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL

Appareil	AirFit™ F10 / AirFit™ F10 for Her	Mirage Quattro™	Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her	Mirage Liberty™	Ultra Mirage™	Hospital Full Face
S8 Escape™	La pression doit être étalonnée à 12 cm H2O. Adressez-vous à votre clinicien et vérifiez le guide utilisateur.					
S8 Escape™ II	La pression doit être étalonnée à 12 cm H2O. Adressez-vous à votre clinicien et vérifiez le guide utilisateur.					
S8 AutoSet™ II	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ III	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ III ST-A	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ Adapt SV	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FULL FACE ¹	FACIAL	FACIAL
VPAP™ Adapt (S9)	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
VPAP™ Adapt (S9 ASV)	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
VPAP™ Auto 25	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ Auto (S9)	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
VPAP™ Malibu	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL
VPAP™ S / VPAP™ ST	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
VPAP™ COPD (S9)	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
S9 VPAP™ Tx	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
VPAP™ Tx	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL
Lumis™ Tx	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
Stellar™	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL
VS Ultra™ / VS Integra™	✓	✓	N/V	✓	✓	✓
VS III™	✓	✓	N/V	✓	✓	✓
Astral™	N/V	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL

Masques nasaux 1

Appareil	AirFit™ N30 for AirMini	AirFit™ N30i ¹ / AirFit™ N30	AirFit™ N20 / AirFit™ N20 for Her	AirTouch™ N20 / AirTouch™ N20 for Her	AirFit™ N10 / AirFit™ N10 for Her	Swift™ FX Nano / Swift™ FX Nano for Her	Mirage™ FX / Mirage™ FX for Her	Nasal pour milieu médical
AirCurve™ 11 VAuto / AirCurve™ 11 S	X	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Nasal	Nasal
AirCurve™ 11 ASV	X	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Nasal	Nasal
AirSense™ 11	X	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Nasal	Nasal
AirMini™	✓	X	✓	✓	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	X	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Nasal	Nasal
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	X	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Nasal	Nasal
AirCurve™ 10 ASV / AirCurve™ 10 ASVAuto	X	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Nasal	Nasal
AirCurve™ 10 ST-A	X	Narinaire ³	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Nasal	Nasal
S9 AutoSet™ / S9 AutoSet™ for Her / S9 Elite™	X	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Nasal	Nasal
S9 Escape™ / S9 Escape™ Auto	X	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Nasal	Nasal
C-Series Tango™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	Aucun réglage requis. Veuillez consulter votre clinicien avant de changer de type de masque.	
S7 Elite™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD

Appareil	AirFit™ N30 for AirMini	AirFit™ N30i ¹ / AirFit™ N30	AirFit™ N20 / AirFit™ N20 for Her	AirTouch™ N20 / AirTouch™ N20 for Her	AirFit™ N10 / AirFit™ N10 for Her	Swift™ FX Nano / Swift™ FX Nano for Her	Mirage™ FX / Mirage™ FX for Her	Nasal pour milieu médical
S8 AutoSet Vantage™	X	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	STANDARD
S8 Compact™	X	N/V	N/V	N/V	Aucun réglage requis. Veuillez consulter votre clinicien avant de changer de type de masque.			
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	X	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	STANDARD
S8 Escape™	X	N/V	N/V	N/V	La pression doit être étalonnée à 12 cm H2O. Adressez-vous à votre clinicien et vérifiez le guide utilisateur.			
S8 Escape™ II	X	N/V	La pression doit être étalonnée à 12 cm H2O. Adressez-vous à votre clinicien et vérifiez le guide utilisateur.					
S8 AutoSet™ II	X	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	STANDARD
VPAP™ III	X	N/V	N/V	N/V	MIRAGE	MIRAGE	STANDARD	N/V
VPAP™ III ST-A	X	N/V	N/V	N/V	MIRAGE	MIRAGE	STANDARD	N/V
VPAP™ Adapt SV	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	VISTA ¹	VISTA
VPAP™ Adapt (S9)	X	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Nasal	Nasal
VPAP™ Adapt (S9 ASV)	X	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Nasal	Nasal
VPAP™ Auto 25	X	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	STANDARD
VPAP™ Auto (S9)	X	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Nasal	Nasal
VPAP™ Malibu	X	N/V	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	VISTA ¹	MERIDIAN
VPAP™ S / VPAP™ ST	X	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	STANDARD
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	X	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Nasal	Nasal
VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	X	N/V	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Nasal	Nasal
VPAP™ COPD (S9)	X	N/V	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Nasal	Nasal
S9 VPAP™ Tx	X	Narinaire ²	Narinaire	N/V	Narinaire	Narinaire	Nasal	Nasal
VPAP™ Tx	X	N/V	N/V	N/V	NARINAIRE	NARINAIRE	NASAL	NASAL
Lumis™ Tx	X	N/V	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Nasal	Nasal
Stellar™	X	N/V	NARINAIRE	NARINAIRE	NARINAIRE ¹	NARINAIRE ¹	NASAL	NASAL
VS Ultra™ / VS Integra™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VS III™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	✓
Astral™	X	N/V	Narinaire	Narinaire	N/V	N/V	Nasal	Nasal

¹ La fonction SmartStop peut ne pas fonctionner comme décrit lorsque ce masque est utilisé avec certains appareils de PPC ou d'aide inspiratoire avec PEP.

² À l'exclusion des modes PAC et iVAPS. Compatible uniquement avec une plage de pression entre 4 et 25 cm H2O.

³ Cette association de masque et d'appareil a été jugée sûre sur la base de l'évaluation de la précision du monitoring de la pression, du volume, de la ventilation minute et de la fréquence respiratoire et de ses alarmes le cas échéant. De petites variations de rendement peuvent être observées, en particulier à des pressions ou des débits plus élevés. Conformément à la pratique clinique attendue, l'efficacité de la ventilation et des alarmes doit être vérifiée par le clinicien.

N/V = le masque n'a pas été validé pour cet appareil.

✓ = Compatible X = Incompatible

Masques nasaux 2

Appareil	Mirage Micro™	Ultra Mirage™ II	Mirage Activa™	Mirage Activa™ LT	Mirage™ SoftGel	Mirage Vista™	Meridian	Mirage Kidsta™	Mirage Micro™ for Kids	Pixi™
AirCurve™ 11 VAuto / AirCurve™ 11 S	X	X	X	Nasal	X	X	X	X	X	N/V
AirCurve™ 11 ASV	X	X	X	Nasal	X	X	X	X	X	N/V
AirSense™ 11	N/V	N/V	N/V	Nasal	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
AirMini™	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	N/V	N/V

Appareil	Mirage Micro™	Ultra Mirage™ II	Mirage Activa™	Mirage Activa™ LT	Mirage™ SoftGel	Mirage Vista™	Meridian	Mirage Kidsta™	Mirage Micro™ for Kids	Pixi™
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	N/V	N/V
AirCurve™ 10 ASV / AirCurve™ 10 ASVAuto	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	N/V	N/V
AirCurve™ 10 ST-A	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	N/V	N/V
S9 AutoSet™ / S9 AutoSet™ for Her / S9 Elite™	Nasal	Nasal Ultra	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	N/V	N/V	N/V
S9 Escape™ / S9 Escape™ Auto	Nasal	Nasal Ultra	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	N/V	N/V	N/V
C-Series Tango™	Aucun réglage requis. Veuillez consulter votre clinicien avant de changer de type de masque.						N/V	N/V	N/V	N/V
S7 Elite™	STANDARD	ULTRA	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/V	N/V	N/V	N/V
S8 AutoSet Vantage™	STANDARD	ULTRA	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	N/V	N/V	N/V
S8 Compact™	Aucun réglage requis. Veuillez consulter votre clinicien avant de changer de type de masque.						N/V	N/V	N/V	
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	STANDARD	ULTRA	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	N/V	N/V	N/V
S8 Escape™	La pression doit être étalonnée à 12 cm H2O. Adressez-vous à votre clinicien et vérifiez le guide utilisateur.						N/V	N/V	N/V	
S8 Escape™ II	La pression doit être étalonnée à 12 cm H2O. Adressez-vous à votre clinicien et vérifiez le guide utilisateur.						N/V	N/V	N/V	
S8 AutoSet™ II	STANDARD	ULTRA	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	N/V	N/V	N/V
VPAP™ III	STANDARD	ULTRA	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/V	N/V	N/V	N/V
VPAP™ III ST-A	STANDARD	ULTRA	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/V	STANDARD	STANDARD	N/V
VPAP™ Adapt SV	VISTA ¹	ULTRA	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	VISTA	VISTA	N/V	N/V	N/V
VPAP™ Adapt (S9)	Nasal	Nasal Ultra	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	N/V	N/V	N/V
VPAP™ Adapt (S9 ASV)	Nasal	Nasal Ultra	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	N/V	N/V	N/V
VPAP™ Auto 25	STANDARD	ULTRA	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	N/V	N/V	N/V
VPAP™ Auto (S9)	Nasal	Nasal Ultra	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	N/V	N/V	N/V
VPAP™ Malibu	MERIDIAN	ULTRA	N/V	N/V	N/V	VISTA	MERIDIAN	N/V	N/V	N/V
VPAP™ S / VPAP™ ST	STANDARD	ULTRA	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	N/V	N/V	N/V
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	Nasal	Nasal Ultra	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	N/V	N/V	N/V
VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	Nasal	Nasal Ultra	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	N/V	N/V	Pédiatrique
VPAP™ COPD (S9)	Nasal	Nasal Ultra	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	N/V	N/V	Pédiatrique
S9 VPAP™ Tx	Nasal	Nasal Ultra	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	N/V	N/V	Pédiatrique
VPAP™ Tx	NASAL	NASAL-ULTRA	NASAL	NASAL	NASAL	NASAL	N/V	NASAL	N/V	N/V
Lumis™ Tx	Nasal	Nasal Ultra	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	N/V	N/V	Pédiatrique
Stellar™	NASAL	ULTRA	NASAL	NASAL	NASAL	NASAL	N/V	NASAL	N/V	Pédiatrique
VS Ultra™ / VS Integra™	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VS III™	✓	✓	✓	✓	N/V	✓	N/V	✓	N/V	N/V
Astral™	Nasal	Nasal Ultra	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	N/V	Nasal	Nasal	Pédiatrique

N/V = le masque n'a pas été validé pour cet appareil.

✓ = Compatible X = Incompatible

Masque narinaire

Appareil	AirFit™ P30i ¹	AirFit™ P10 For AirMini™	AirFit™ P10 / AirFit™ P10 for Her	Swift™ FX / Swift™ FX for Her	Swift™ FX Bella / Swift™ FX Bella Gray	Swift™ LT / Swift™ LT for Her	Mirage Swift™ II	
AirCurve™ 11 VAuto / AirCurve™ 11 S	Narinaire	X	Narinaire ²	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	
AirCurve™ 11 ASV	Narinaire	X	Narinaire ²	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	
AirSense™ 11	Narinaire	X	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	
AirMini™	X	✓	X	X	X	X	X	
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	Narinaire	X	Narinaire ²	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	Narinaire	X	Narinaire ²	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	
AirCurve™ 10 ASV / AirCurve™ 10 ASVAuto	Narinaire	X	Narinaire ²	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	
AirCurve™ 10 ST-A	Narinaire ⁴	X	Narinaire ²	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	
S9 AutoSet™ / S9 AutoSet™ for Her / S9 Elite™	Narinaire	X	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	
S9 Escape™ / S9 Escape™ Auto	Narinaire	X	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	
C-Series Tango™	N/V	X	Aucun réglage requis. Veuillez consulter votre clinicien avant de changer de type de masque.					
S7 Elite™	N/V	X	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	
S8 AutoSet Vantage™	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	
S8 Compact™	N/V	X	Aucun réglage requis. Veuillez consulter votre clinicien avant de changer de type de masque.					
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	
S8 Escape™	N/V	X	La pression doit être étalonnée à 12 cm H2O. Adressez-vous à votre clinicien et vérifiez le guide utilisateur.					
S8 Escape™ II	N/V	X	La pression doit être étalonnée à 12 cm H2O. Adressez-vous à votre clinicien et vérifiez le guide utilisateur.					
S8 AutoSet™ II	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	
VPAP™ III	N/V	X	MIRAGE ²	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	
VPAP™ III ST-A	N/V	X	MIRAGE ²	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	
VPAP™ Adapt SV	N/V	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	
VPAP™ Adapt (S9)	Narinaire	X	Narinaire ²	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	
VPAP™ Adapt (S9 ASV)	Narinaire	X	Narinaire ²	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	
VPAP™ Auto 25	N/V	X	SWIFT ²	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	
VPAP™ Auto (S9)	Narinaire	X	Narinaire ²	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	
VPAP™ Malibu	N/V	X	SWIFT ²	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	
VPAP™ S / VPAP™ ST	N/V	X	SWIFT ²	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	Narinaire	X	Narinaire ²	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	
VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	N/V	X	Narinaire ²	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	
VPAP™ COPD (S9)	N/V	X	Narinaire ²	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	
S9 VPAP™ Tx	Narinaire ³	X	Narinaire ²	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	
VPAP™ Tx	N/V	X	NARINAIRE ²	NARINAIRE	NARINAIRE	NARINAIRE	NARINAIRE	
Lumis™ Tx	N/V	X	Narinaire ²	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	
Stellar™	N/V	X	NARINAIRE ^{1,2}	NARINAIRE ¹	NARINAIRE ¹	NARINAIRE ¹	NARINAIRE ¹	
VS Ultra™ / VS Integra™	N/V	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	
VS III™	N/V	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	
Astral™	N/V	X	N/V	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	

¹ La fonction SmartStop peut ne pas fonctionner comme décrit lorsque ce masque est utilisé avec certains appareils de PPC ou d'aide inspiratoire avec PEP.

² La précision du volume courant/de la ventilation minute peut être atténuée lorsque le masque AirFit P10 est utilisé en mode de ventilation à deux niveaux de pression (S, T, ST), en particulier si l'aide inspiratoire est élevée.

³ À l'exclusion des modes PAC et iVAPS. Compatible uniquement avec une plage de pression entre 4 et 25 cm H₂O.

⁴ Cette association de masque et d'appareil a été jugée sûre sur la base de l'évaluation de la précision du monitoring de la pression, du volume, de la ventilation minute et de la fréquence respiratoire et de ses alarmes le cas échéant. De petites variations de rendement peuvent être observées, en particulier à des pressions ou des débits plus élevés. Conformément à la pratique clinique attendue, l'efficacité de la ventilation et des alarmes doit être vérifiée par le clinicien.

N/V = le masque n'a pas été validé pour cet appareil.

✓ = Compatible X = Incompatible